

## サムポストスプリント 作成手順資料

パシフィックサプライ(株) 事業開発本部

#### ①目的•対象者

把持肢位を取れない方のスプリントとして使用

適応 正中神経麻痺 軽度の片麻痺の把持肢位 保持・訓練用 母指の捻挫 急性MP関節炎 CM関節炎 など



#### ②型紙について

作製時間に限りがある場合は、プレカット製品(元々型紙の形をしたシート製品)を推奨

サイズ展開

第2-5MP関節の幅:

6~7.5cm:Sサイズ

7.5~9センチ: Mサイズ






サム・ポストスプリント Image 1 of 6



#### 型紙(トレース)

• プラスチックの長さの求め方

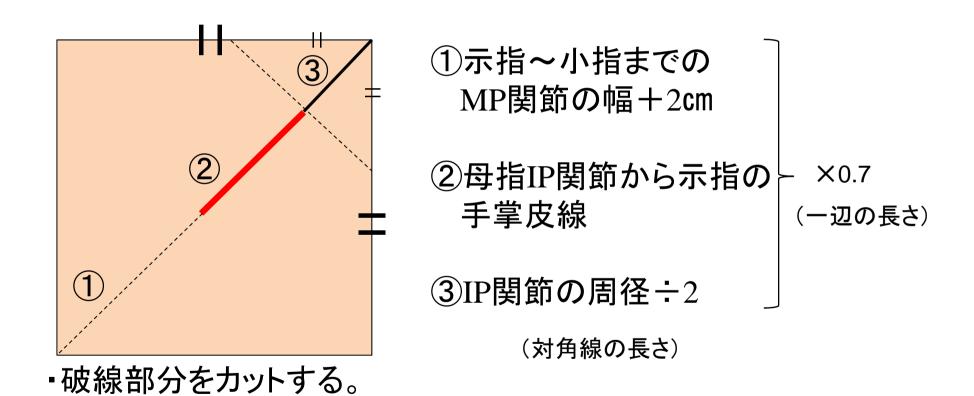


#### ※オルフィキャスト使用の場合

• 以下の長さを一辺とした正方形を作る (中指ラインの近位手掌皮線~手関節皮線)×2




中指ライン近位手掌 皮線~手関節皮線

2倍し、一片の辺とした正方形を作る

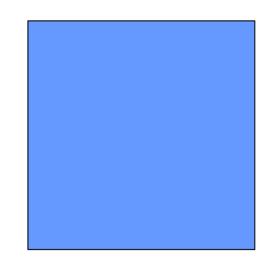

#### ※オルフィキャスト使用の場合


• オルフィキャストの長さの求め方

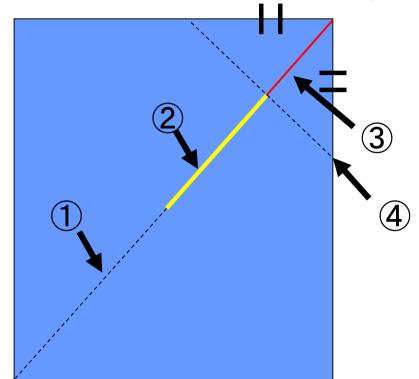

・破線部分をカットする。

- ①示指~小指までの MP関節の幅+2cm
- ②母指IP関節から示指の 遠位手掌皮線
- ③IP関節の周径÷2

# 完成イメージ

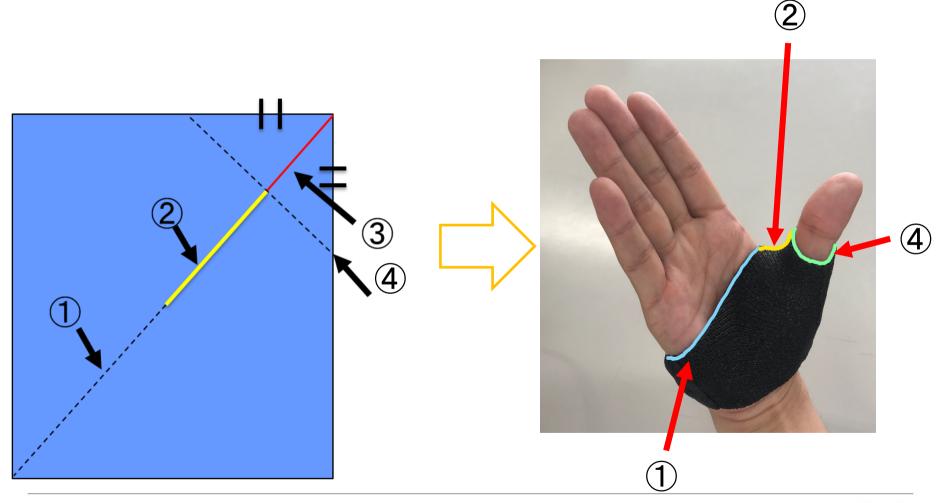

#### カットする長さ

- ①示指~小指までの MP関節の幅+2cm= cm
- ②母指IP関節から示指の 遠位手掌皮線= cm
- ③IP関節の周径÷2 = cm
- (1)+(2)+(3)= cm

# ③シートの切り出し方

1、シートをお湯に入れ温める。

時間の目安(65℃の場合)

オルフィットソフト・ソフトNS・ハード・ハードNS・アクアNS

→縁が5mmほど透明になる(本体は半透明)

他のシート→約1分後







- 2、シートを取り出す。(詳細は⑥参照)
- 3、シートをカットする。

医療用はさみを使用。ジョキジョキと音がするくらいが切りやすい。刃の先に手を置かないよう気をつける。

## 4シートを温める

- 1. シートをお湯(65℃~75℃)の中に入れる。
- 2. シートが完全にやわらかくなる。(=モールドできる状態になる)まで待つ。

取り出す時間の目安(65℃のお湯) オルフィットソフト・ソフトNS・アクアフィット:透明

オルフィキャスト:10秒

そのほかのシート:約3分後








後ろのヒートパンライナーが見えるまで!

## ⑤手の肢位の確認

- 1.机のコーナーを使用する。
- →セラピストがモールドしながら様々な角度から手の 状態を確認できるようにする。
- 2.セラピストはモールドする手の正面に立つ。

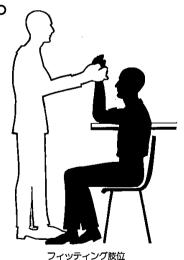

#### 4モールドする前に







1. お湯でセラピスト・患者様の手 と腕を湿らす。湿らさないと・・・



- やけどを引き起こす可能性。
- ・拘縮・痙縮が強くなる。
- ・シートがはがしにくくなる。

方法:ヒートパンの網を引き揚げ、 その網についた水でぬらす。

## 4モールドする前に



シートを取り出す 網を上げてお湯から出す。 両手で持つとシートの誤接着を抑えられる。



(プラスチックシートの場合) ・机の上やふたの裏の冷たい水 滴をつけて表面を冷やす。

※タオルで水気をふき取るだけだと熱いため危険。

## 4モールドする前に



#### (オルフィキャストの場合)

お湯から引き揚げた後、縮んでいるため少し引っ張り戻す。



バスタオルでしっかり水気 を吸い取る。

※この時に水気が多く残っていると、乾く際にスプリントが縮んだり、ベルトを付けにくくなるので注意。



1:シートを写真の向きで手に当てる。






2: 橈側側のシートを貼り 合わせる。

※つなぎ目が母指から浮 かないように注意



3:尺側側のシートを背側 (中・環指の間)に貼り合 わせる。

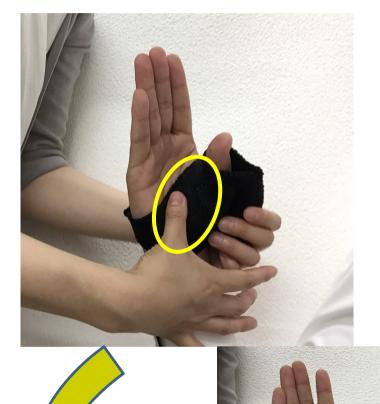

4:母指・小指対立アーチ を取る。

注:母指、示指でつまみ動作がとれるよう意識する。

5:母指近位にしわがあったら、背側側へなでる。

## 8チェックポイント



1:手関節の動きが妨げられていないか。

#### 8チェックポイント



2:母指IPの動きが妨げられていないか。

IPでカットし、ヒートガンで軟化させ丸める。

## 8 チェックポイント

3:四指MPの動きが妨げられ 4:把持肢位がとれているか。 ていないか。





# ⑨トリミング(掌側)

·近位·遠位手掌皮線 5mm下




·IP関節 5mm下

- 手関節に当たらない

# ⑨トリミング(背側)

・中手骨頭に当たらない

中指の長軸の延長

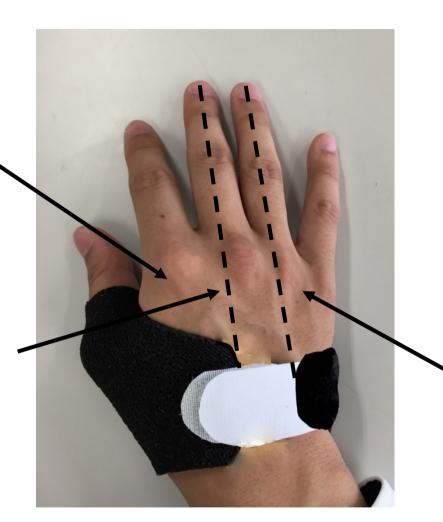

・環指の長軸 の延長


#### ⑩縁が気になる場合は…




モールド後、縁のギザギザが気になる場合はヒートガンで熱し、なでる。

#### ⑪テープの付け方

・片手で装着できるよう、橈側にフックテープ、尺側にループテープを付ける。

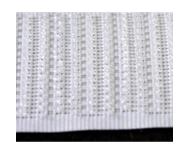

フックテープ (ザラザラ)

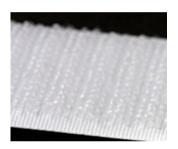


ループテープ (ふわふわ)

製作直後は本体が湿っているためベルトがはがれやすい。そのため次の方法で、はがれを防ぐ。


#### フックテープの場合

・乾いた端材をヒートガンで熱し、間にはさむ。

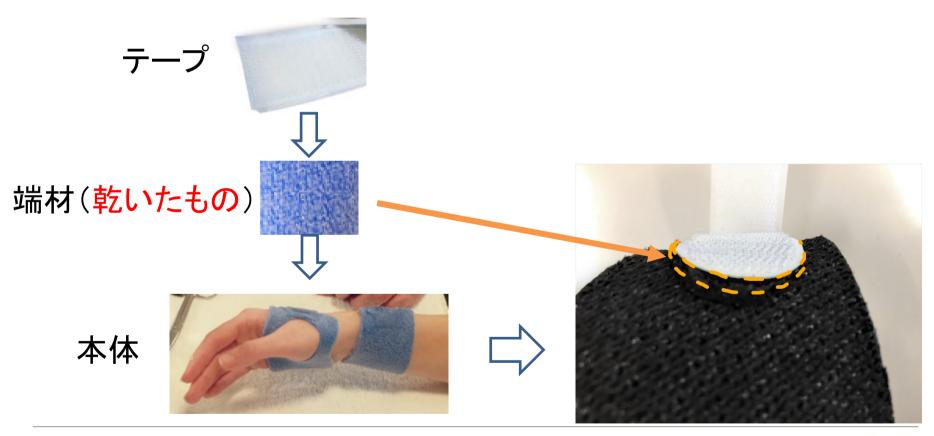

# ループテープの場合

フックテープと同様に乾いた端材をはさみ、ループテープの端をオルフィキャストで覆う。

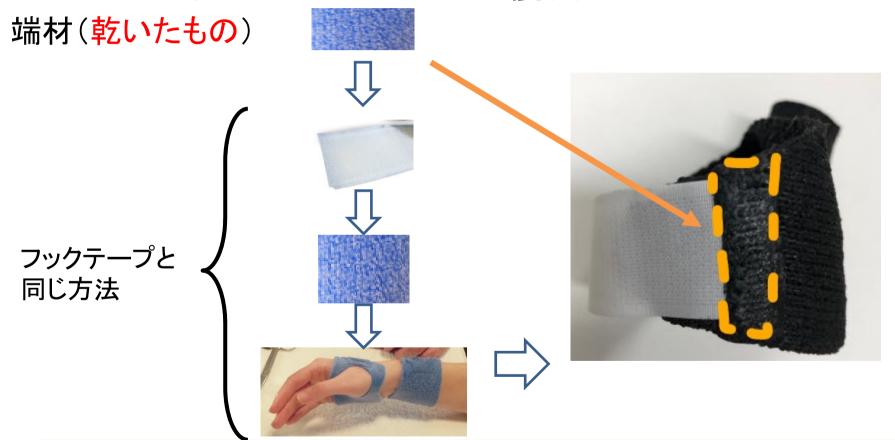

#### テープ取り付け時の注意点

剥がれを防ぐため角を丸く切る。



ループテープがねじれないようにする。

