
脳卒中片麻痺用カペナースプリント 製作例

パシフィックサプライ株式会社 事業開発本部 オズール・オルフィット事業課

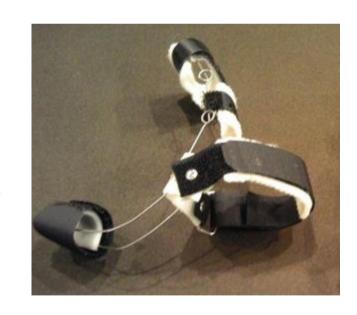

1. 対象者・目的


対象者:訓練を続けても自力 で手指を伸展できず、つまみ 動作が取れない方

目的:外部動力によりつまみ動作ができるようにする

スパイダーでは見た目の問題 や使用時にかさばり、ご使用 いただけないケースがある





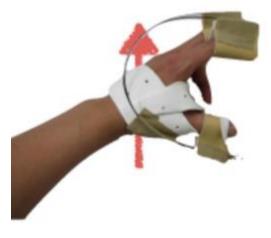



2. 用意するもの

- ステンレス線(幅1mm程)50cm
- オルフィキャスト1,3mm厚、 もしくはNSでないシート製品
- オスベルクロ
- メスベルクロ
- ペンチ
- ・ニッパー
- ・ループプライヤー








ケイバ(KEIBA) プロホビー ワイヤーループプライヤー HRC-D34

3. ばね本体の製作

- 1) ばねの先端を示指先端から 5cmほど伸ばした状態にする。
- 2) 一度手から離し、ばねを手の形状に沿うよう、手で曲げていく。手を開いた時の形状に合うようにする。

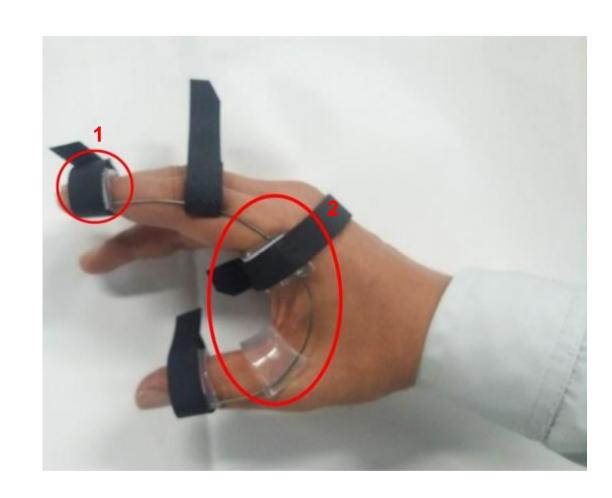


- 3. ばね本体の製作
- 3) 〇の箇所を90度にル<u></u> ププライヤーで折り曲げる。

ばねの先端は中指へ向くようにする。


- 4) 母指IPで、2)と同じよう に折り曲げる。
- ※上からばねの進行方向を 確認し曲げるようにする。
- ※ループプライヤー
- 三角の棒の向きに曲がる



- 3. ばね本体の製作
- 5) 反対側も4) と同じようにする。
- 6) 3) と同じく手に合わせ 全 体的に曲げる。
- 7) 2)と同じく中指先端部分を2か所プライヤーで曲げる
- 8) 先端をループプライヤー で加工した後ペンチでつぶす。
- 9)1)のばねを細く切ったオ ルフィキャストで巻きつけ、 貼り合わせる。

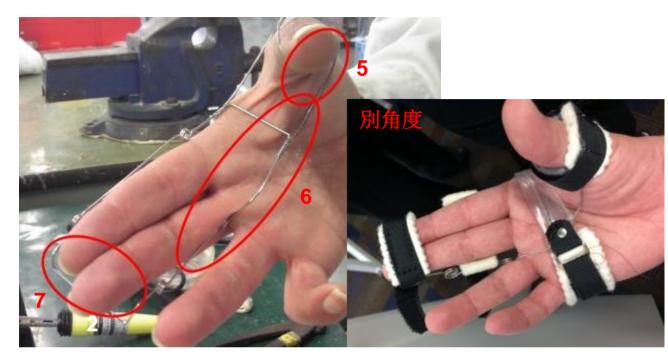



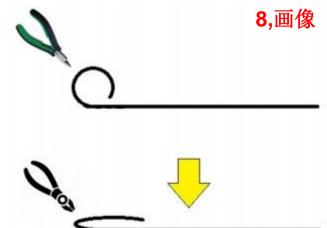


- 4. カフ・ベルトの取り付け
- 1) オルフィキャストをA~Cの3 本用意する。

幅は1,5cm (各関節に当たる場合はより細くする) • 2つ折り以上にする。


2) ばねを手に付けた状態で、 キャストA~Cを手に貼り合わせ る。

指の背側→ 掌側→ 背側の順で巻く。

この時必ずばねの**内側から貼る**。

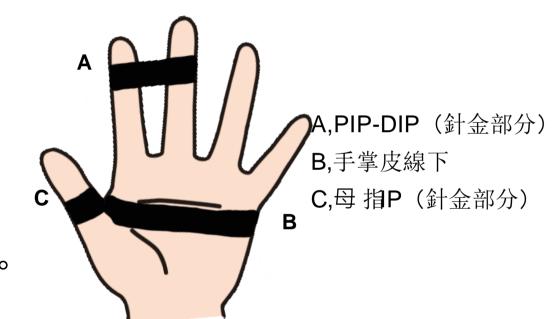

- 4. カフ・ベルトの取り付け
- 3) 背側の余分なシートをカットす
- る。Bは背側・掌側半分ずつ残す。
- 4) フックテープを幅5mm~1cm程 にカットし、本体に貼り付ける。 その後ループテープを巻き付け、 必要な幅・長さにカットする。
- ※より実用的なスプリントにする場合-最初のばね(示中指DIP)を背側側に沿わせる

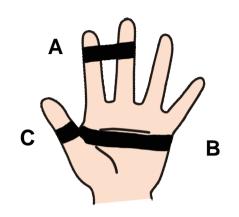

A,PIP-DIP(針金部分) B,手掌皮線下 C,母 指P(針金部分)

