

保証書

品名	コンフォートスポーツ			
お客様	ご住所 〒			
	(フリガナ)			
	お名前			
ご購入年月日	西暦	年	月	日
販売店名				
保証期間	ご購入日より 2ヶ月間			

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償交換をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障又は不具合が発生した場合、ご購入の販売店までご連絡ください。

保証規程

1. 保証期間はご購入年月日から2ヶ月間です。
2. 無償交換には、保証書および販売時のレシートの提出を要します。
3. 次の場合には保証は致しかねます。
 - (1) 保証書を紛失された場合
 - (2) 火災、地震等の天災地変による故障、損傷が生じた場合
 - (3) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障、損傷が生じた場合
 - (4) 保証書のご購入年月日、お客様欄、販売店名の記入の無い場合、または不当に変更を加えられた場合
 - (5) 取扱説明書に記載されていない誤った使用・装着・洗濯方法をされた場合
 - (6) お客様による誤った修理・改造・分解をされた場合
 - (7) 爪等の鋭利な物によるひっかき、地面等との接触や摩擦による擦れなど、品質に関わらない故障・損傷が生じた場合
 - (8) 製品のシリアルナンバーが分からない場合
 - (9) その他弊社が保証の必要がないと判断した場合
4. ご相談窓口は、ご購入の販売店にて承ります。
5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
6. 保証書の再発行はいたしません。

パウアーファインド社 正規販売代理店

パシフィックサプライ株式会社 (本社) 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL.072-875-8008(代) FAX.072-875-8010(代)

2024.12

コンフォートスポーツ 取扱説明書



SUPPORTING ATHLETES

パウアーファインドのサポーターに関しては、
下記サイトにも多くの情報を掲載しています。

パウアーファインド 特設サイトはこちら ▶

<https://bauerfeind.p-supply.co.jp/>



Instagram



Facebook



X

パウアーファインド社発行の取扱説明書（多言語対応版）を製品へ封入しておりますが、日本語ページについては、こちらの取扱説明書をご覧ください。

コンフォートスポーツ BAUERFEIND



- 注意**
- 必ず両足揃えた状態でご使用ください。
 - 左右の足のサイズが異なる場合は、サイズの大きい方をお選びください。
 - 足の赤みや圧迫などの変化が無いが、フィッティング状態を定期的にチェックすることをお勧めします。

コンフォートスポーツはウォーキングからスポーツまで幅広く適応したインソールです。


- 特殊技術による的確な方向指示、サポート、衝撃吸収
- 適度なアーチサポートによりフィット感が高まります。
- 表面カバーには除菌銀イオンが含まれています。

主な適応

足の変形（扁平足、外反扁平足など）
痛みの緩和、動作のサポート

コンフォートスポーツの装着方法

- 図1** インソールの着脱に十分なスペースがあるか確認してください。また、靴に付属のインソールは抜いてください。
- 図2** インソールの上に足を置き、つま先との間に最低1cmの隙間があるか確認してください。
- 図3** 前足部(C¹)、中足部(C²)、後足部(C³)が均等に支えられるようにし、インソールの端に足がかからないか確認してください。
- 図4** インソールを靴底へしっかり挿入してください。

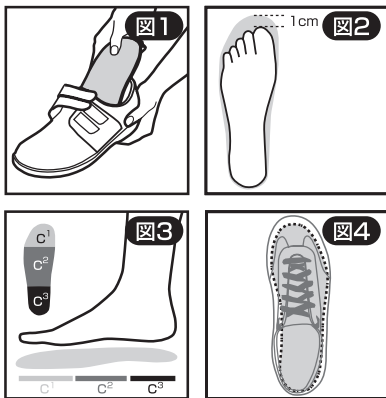

お手入れの方法



注意

- 使用後は必ず取り外し、湿気を外に逃がすようお手入れをお願いします。
- 洗濯機はご使用いただけません。
- 表面カバー部分は液体洗剤を付けたスポンジで汚れをふき取ってください。液体洗剤が残らないように、完全にふき取ってください。放熱器、ヘアドライヤーや直射日光に当たらないよう、製品を乾かしてください。



手洗い



×漂白剤



×アイロン



×ドライクリーニング




×乾燥機

サイズ (cm)

サイズ	35	36	37	38	39	40	41
①足長実寸 (cm)	21.5-22.5	22.5-23.5	23.0-24.0	23.0-24.5	24.0-25.0	24.5-26.0	25.5-26.5
②踵～メタパッド上端 (cm)	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0

サイズ	42	43	44	45	46	47	48
①足長実寸 (cm)	26.0-27.0	27.0-28.0	27.5-28.5	28.5-29.5	29.0-30.0	30.0-31.0	31.0-32.0
②踵～メタパッド上端 (cm)	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5

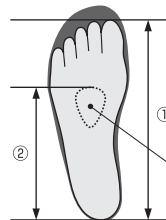

- ※必ずかかとをあわせ、指先までの足の実際の寸法を測ってサイズをお確かめください。
- ※メタパッドの位置を必ずお確かめください。前足部(MTP関節)に干渉しないようにご注意ください。

メタパッド



注意

製品にはシリアルナンバーが記載されたタグが縫製されています。（一部のソックス・インソール製品を除く）
シリアルナンバーがわからない場合、保証期間内であっても製品の保証対象外となりますのでタグは切り取らないようにお願いいたします。