

移乗用具

etac®  
Creating Possibilities

# エタック ベッドストリング

## 取扱説明書



この度は『エタック ベッドストリング』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本製品の機能を生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解ください。その後、大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合があります。  
必ずご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認ください。

**k** パシフィックサプライ株式会社

※Kマークは川村義肢株式会社の登録商標です。

※製品に関するお問い合わせは本取扱説明書最終ページをご参照ください。

転載複写厳禁

# 本製品の特徴

---

ベッドフレームやヘッドボードに固定して使用します。

対象者の残存機能を生かし自立移動をサポートします。

握り手が8ヶ所あり、使用状況、場面、用途に応じて使い分けができます。

## もくじ

1. 安全にご使用いただくために.....	3
2. 各部の名称・仕様.....	4
3. ご使用前に.....	5
4. 使用方法.....	6
5. お手入れ方法・保管方法.....	8
6. 廃棄方法.....	8
7. 保証書.....	9
8. メモ.....	10

### 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよくご理解の上本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。


# 1. 安全にご使用いただくために



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 使用方法については専門家の指導を受けてください。
- ご使用前は必ず以下の点を点検のうえご使用ください。
  - 握り手や本体がほつれていたり破れていたりしないか？
  - 握り手や本体に異物が刺さっていないか？
- ベッドの端で利用する時には転落しないようにご注意ください。
- 握り手以外のところを持って引っ張らないでください。
- ベッドに固定する際は、固定箇所の取り付け強度を確認したうえで行ってください。
- 用途以外の使用は危険ですので、絶対になさらないでください。

## 2.各部の名称・仕様

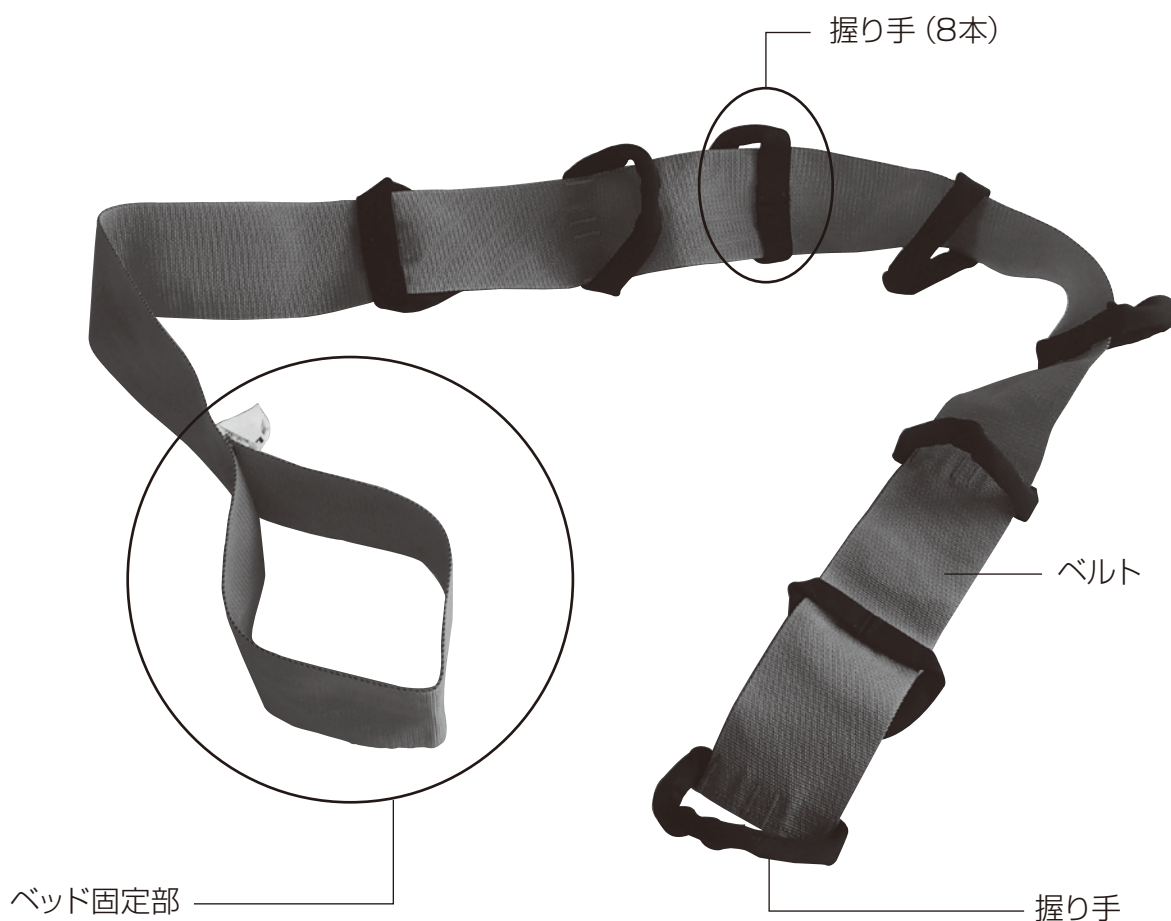

	サイズ
サイズ	幅7.5×長さ170 (cm)
重量	400g
最大使用者体重	150kg
材質	ポリエステル
製造国	スウェーデン

※材質についてアレルギー反応の原因となる性質は報告されておりません。  
※商品仕様は予告なく変更する場合がございます。

# 3.ご使用前に




この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 使用方法については専門家の指導を受けてください。
- 最大使用者体重（150kg）を超える方には使用しないでください。

## 3-1 ベッドへの固定方法

- 1 固定箇所の取り付け強度を確認したうえで、本製品の固定部を固定箇所に通します。

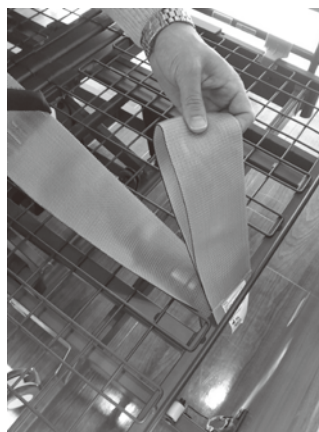

- 2 固定部の輪になった部分にベルトを通します。




- 3 たるまないようにベルトを引っ張り、しっかり固定します。



# 4.使用方法

※イラスト解説のため、ベッドのサイドレールは省略しております。

## 4-1 臥位から長座位へ起き上がり

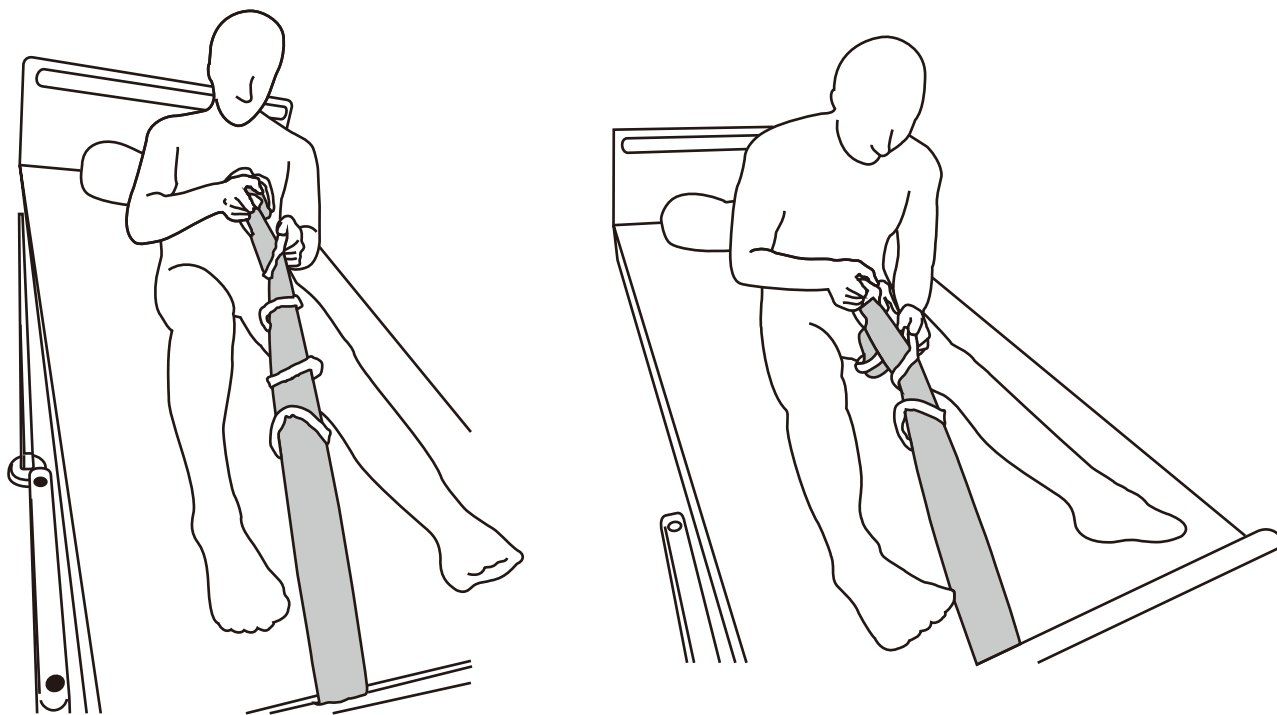


ベッドの足側フレームに固定したベッドストリングを使用し、握り手を順に手繰り寄せて体を起こす。

---


## 4-2 臥位から端座位へ起き上がり

①

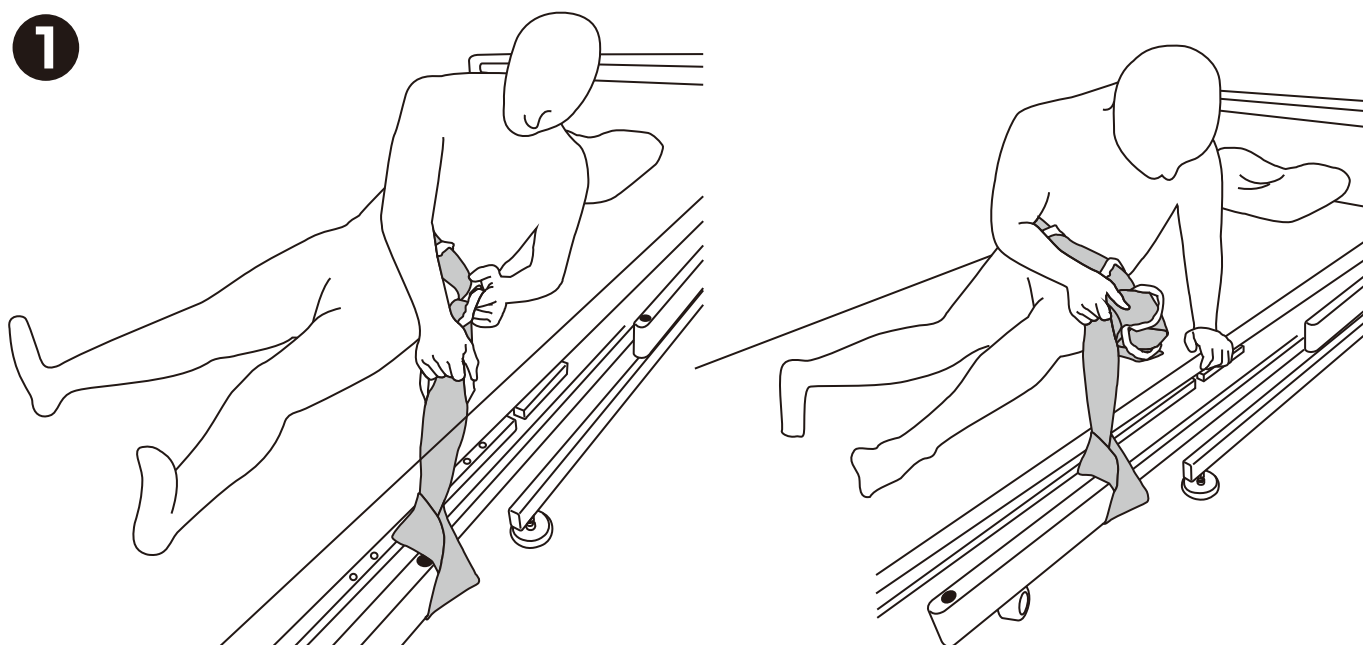

ベッドサイドフレームに固定したベッドストリングを使用し、握り手を順に手繰り寄せて斜めに体を起こす。

②

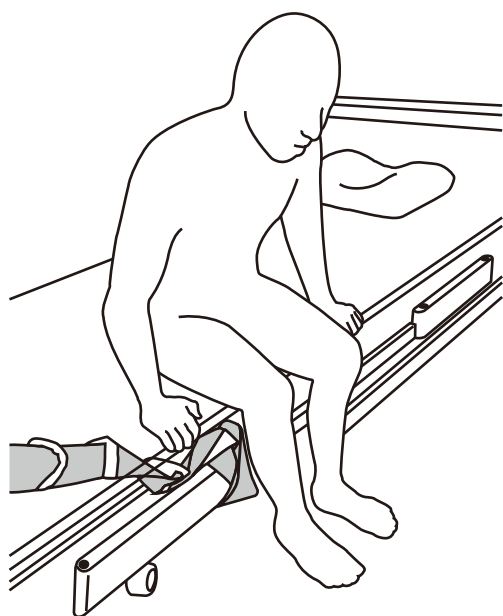

足を下ろして端座位へ

# 5. お手入れ方法・保管方法

---

## お手入れ方法・保管方法

汚れたら80℃以下でお洗濯してください。

干される際は風通しのよい場所で陰干ししてください。

低温(60℃以下)での乾燥機のご使用が可能です。

漂白剤・柔軟剤のご使用ならびにドライクリーニングはお避けください。

風通しがよく、直射日光が当たらない場所で保管してください。

# 6. 廃棄方法

---

本製品を廃棄する際は、各自治体の指示に従ってください。

# 7. 保証書

本製品は、当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一商品開封時に不良がございましたら保証規程に基づき無償修理致します。その際は現品に本保証書を添えて弊社またはご購入の販売店までご提出ください。

品名	エタック ベッドストリング			
お客様	ご住所 〒	TEL		
	(フリガナ)			
	お名前			
お買い上げ日 西暦 年 月 日				
販売店名				
保証期間	2年間			

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障又は不具合が発生した場合、弊社もしくはご購入の販売店までご連絡ください。
- 保証期間が過ぎた後の故障等についてご不明の場合、弊社またはご購入の販売店までお問い合わせください。

## 保証規程

1. 保証期間はご購入日から2年間です。保証期間内に発生した故障については、無償修理致します。
2. 無償修理には、保証書の提出を要します。
3. 次の場合には保証はできません。
  - (1) 保証書を紛失された場合
  - (2) 取扱説明書に記載されていない誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造・分解による故障・損傷
  - (3) 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
  - (4) 保証書にご購入日、お客様名の記入のない場合、または不当変更を加えられた場合
  - (5) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
4. ご相談窓口は、弊社営業所またはご購入の販売店にて承ります。
5. 保証書の保証対象とならない故障および損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無償修理致します。
  - (1) 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
  - (2) 保証書の再発行はいたしません。

●輸入・販売元

**k** パシフィックサプライ株式会社

本社営業部 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL (072) 875-8013 FAX (072) 875-8015

# 8. ㄨㄚ

---



●輸入・販売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

- 大阪営業所 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1  
TEL 072 (875) 8011 FAX 072 (875) 8015
- 札幌営業所 〒060-0051 札幌市中央区南1条東6-2-12 松浦ビル1F  
TEL 011 (218) 5801 FAX 011 (218) 5805
- 仙台営業所 〒980-0873 仙台市青葉区広瀬町3-3 ハイアット広瀬町102号室  
TEL 022 (227) 1820 FAX 022 (227) 1821
- 東京営業所 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3-12 グレイスビル2F  
TEL 03 (3352) 0757 FAX 03 (3355) 3154
- 名古屋営業所 〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西3-5  
TEL 0568 (34) 2696 FAX 0568 (34) 2697
- 広島営業所 〒733-0035 広島市西区南観音7-5-13 ロイヤルシャトー中田1F  
TEL 082 (293) 6255 FAX 082 (293) 6299
- 福岡営業所 〒812-0054 福岡市東区馬出2-2-12  
TEL 092 (641) 8151 FAX 092 (641) 0444

<http://www.p-supply.co.jp/>

販売店