

移乗用具

etac®
Creating Possibilities

エタック サテンシートベース (左右スライド)

取扱説明書



この度は『エタック サテンシートベース (左右スライド)』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本製品の機能を生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解ください。その後、大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合があります。
必ずご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認ください。

k パシフィックサプライ株式会社

※Kマークは川村義肢株式会社の登録商標です。

※製品に関するお問い合わせは本取扱説明書最終ページをご参照ください。

転載複写厳禁

エタック サテンシートベース (左右スライド) の特徴

- 本製品は低摩擦のサテン生地で作られたベッドシートです。ベッド上での寝返り、左右移動を少ない力で行うことができます。
- 別売りのアシストシート、サテンシートコンビ（上下スライド）と組み合わせて使用することで、対象者の身体状況や使用場面に合わせ多用途にお使いいただけます。

もくじ

1. 安全にご使用いただくために……………	3
2. 各部名称と仕様……………	3
3. ご使用前に……………	4
4. 使用方法	
4-1 利用者自身による臥位から端座位への起き上がり……………	6
4-2 ベッド上での横移動（別売りアシストシート併用）……………	7
4-3 介助による体位交換（別売りアシストシート併用）……………	8
5. お手入れ方法・保管方法……………	9
6. 廃棄方法……………	9
7. メモ……………	10

1. 安全にご使用いただくために



注意


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

使用方法については専門家の指導を受けてください。

ご使用前は必ず以下の点を点検の上ご使用ください。

- シートがほつれたり破れていないか？
- シートに異物が刺さっていないか？
- 対象者がベッドの端に移動する、もしくは介助者が対象者をベッドの端に移動させる時には転落しないようご注意ください。
- ベッドサイドに座る際、摩擦面上に座ってください。摩擦面がない部分には座らないようにしてください。滑り落ちる恐れがあります。
- シートの上に立たないでください。すべて転倒する恐れがあります。
- 火気やタバコのご使用は引火の恐れがございますのでお避けください。
- 用途以外の使用は危険ですので、絶対になさらないでください。

2. 各部名称と仕様

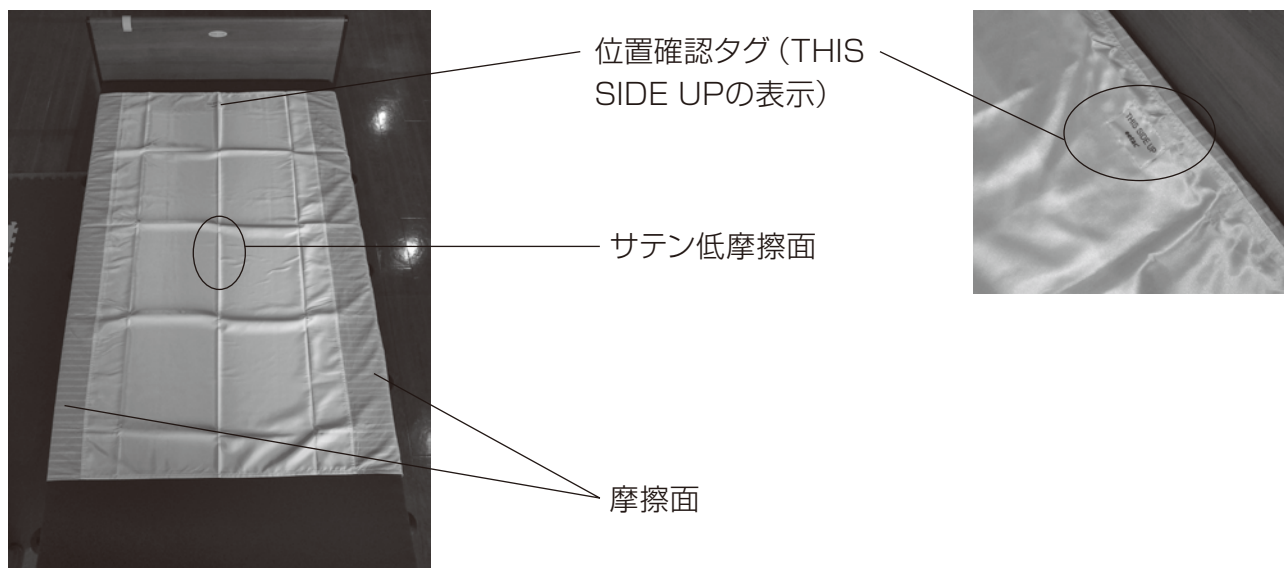

※画像はサテンシートベース (左右スライド)

	サテンシートベース (左右スライド)	サテンシートベース (左右スライド) L	サテンシートベース (左右スライド) Lボックス
サイズ	幅200×長さ140 (cm)	幅200×長さ200 (cm)	幅90×長さ200×マチ20 (cm)
重量	510g	640g	580g
最大使用者体重	200kg	200kg	200kg
材質	綿60% ポリエステル40% (サテン低摩擦面 ポリエステル)		
製造国	スウェーデン		

3.ご使用前に




注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 使用方法については専門家の指導を受けてください。
- 最大使用者体重（200kg）を超える方には使用しないでください。

3-1 マットレスへの装着方法（サテンシートベース（左右スライド）、サテンシートベース（左右スライド）L）


※写真はサテンシートベース（左右スライド）

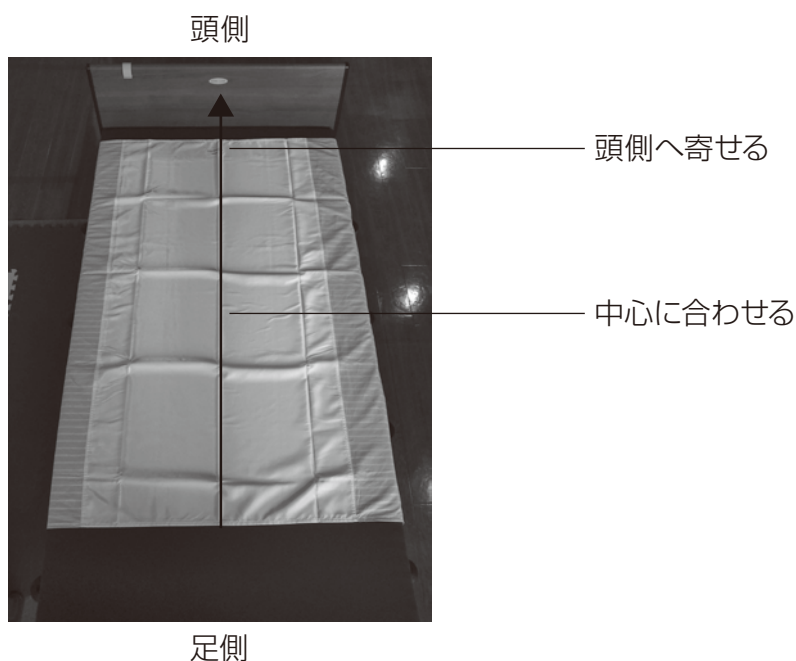

- ① 位置確認タグを表面の頭側に合わせて本製品をマットレスの上に装着します。このとき本製品の中心をマットレスの中心に合わせます。サテンシートベースの場合は上図のように頭側へ寄せてください。
- ② しわにならないように全体を伸ばし、余った部分をマットレスの下に巻き込みます。


3-2 マットレスへの装着方法 (サテンシートベース (左右スライド) Lボックス)

1

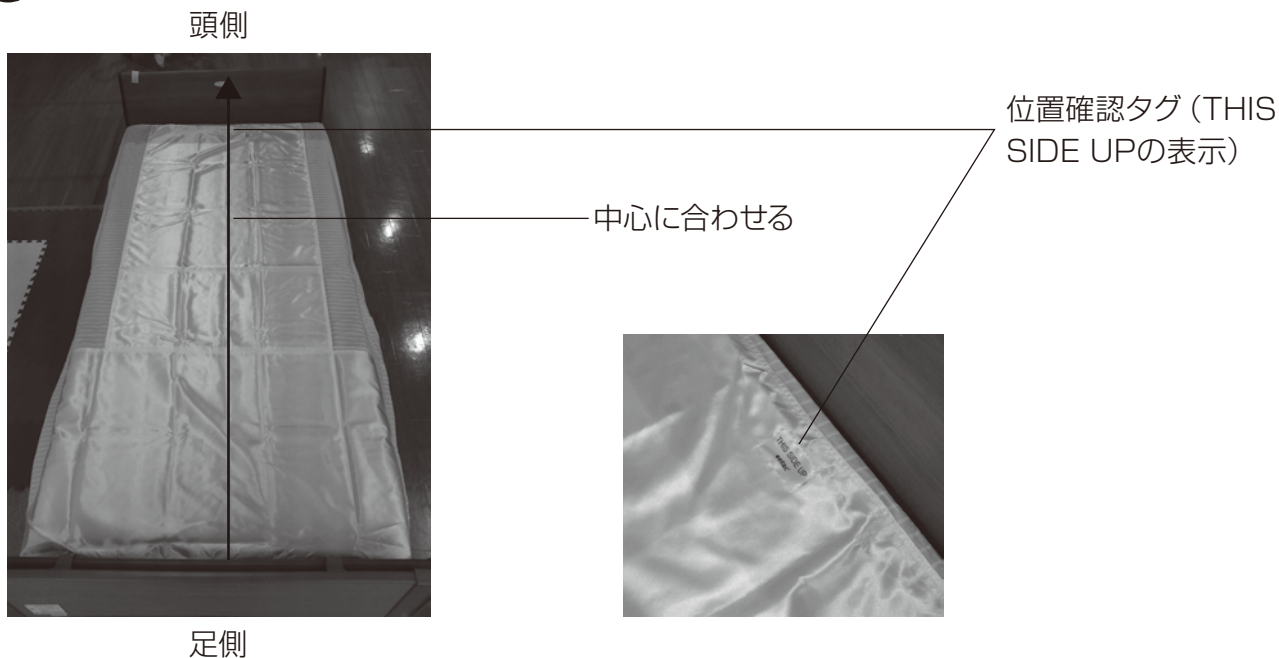

位置確認タグを表面の頭側に合わせて本製品をマットレスに装着します。このとき本製品の中心をマットレスの中心に合わせます。


2

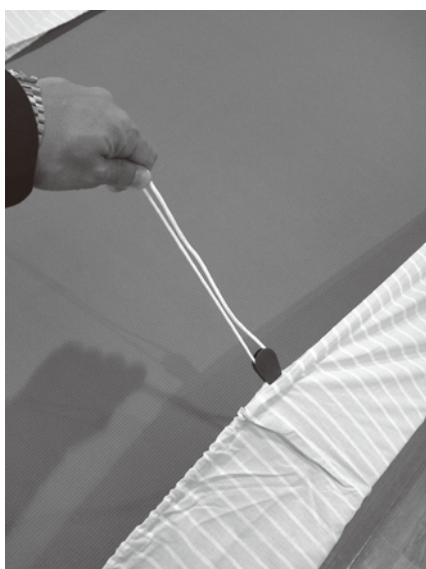

裏面左右二箇所にある紐を両方引き、本製品をマットレスにぴったり合わせます。その後、黒プラスチック製のゆるみ止め留め具を紐の根元までスライドさせて、固定します。

4.使用方法

4-1 利用者自身による臥位から端座位への起き上がり

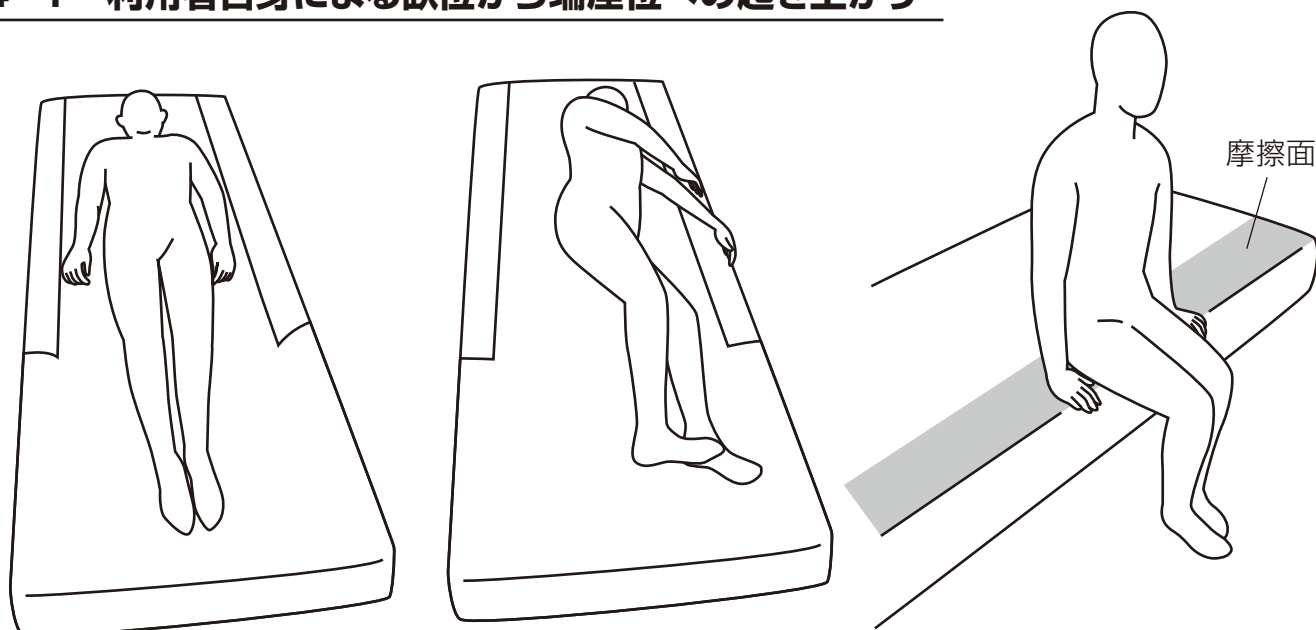


※イラストはサテンシートベース（左右スライド）Lボックス

サテン低摩擦面は左右方向のみ滑りやすくなっております。寝返りを行う場合は必ず衣服を着てください（裸ではサテンの低摩擦効果が半減します）。対象者が裸の場合は別売りのアシストシート、サテンシートコンビ（上下スライド）と組み合わせてお使いください。

※端座位の際（右上のイラスト）滑らないことを目的にマットレス両サイドは摩擦面（しま模様の生地）になっております。ベッドサイドにお座りになる際は、必ず摩擦面側に座るようにしてください。

4-2 ベッド上での横移動（別売りアシストシート併用）

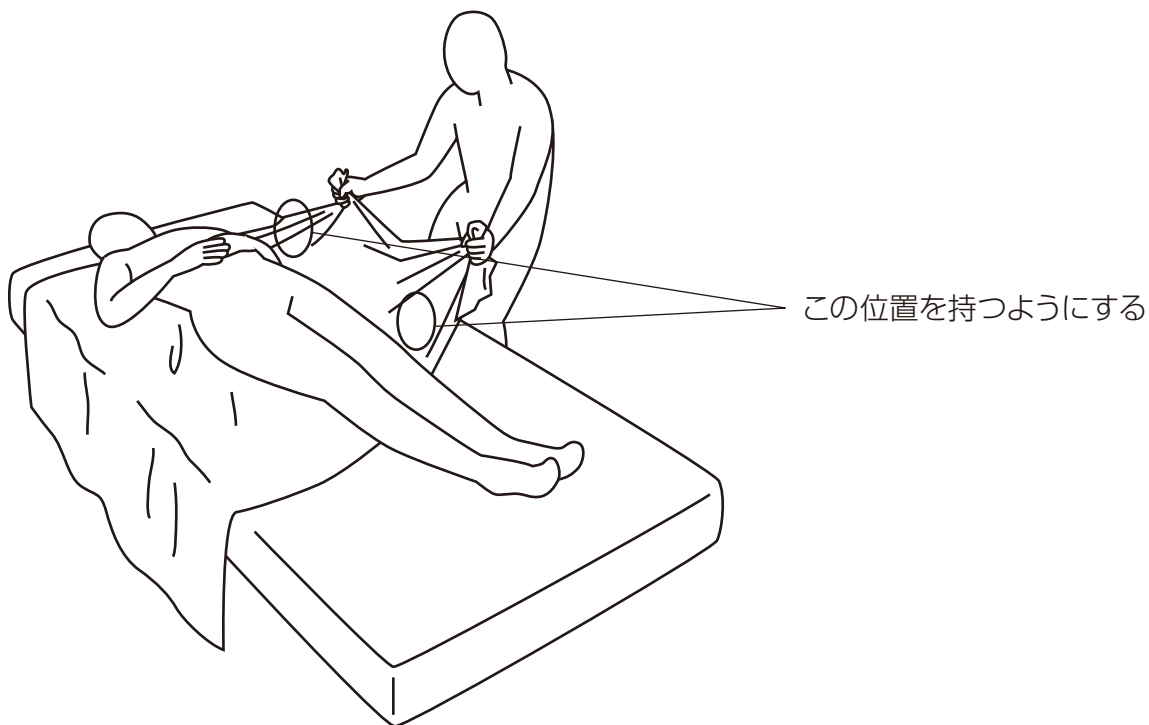

本製品の上にアシストシートを敷いた状態で対象者がベッド上に寝ている状態から、アシストシートを引き出し、イラストのようにして介護者が持ちます。このとき出来るだけ対象者に近い位置でアシストシートを握るようにします（イラストでは握り方をお示しするために、介助者が対象者から離れています）




介助者は両足を肩幅に開き、かつ前後に足を開いて立ちます。背筋を伸ばした状態で、下肢の筋力を使いながらゆっくりアシストシートを引いて対象者を移動させます。
大変滑りやすくなっておりますので、勢い余ってベッドから落下しないように充分注意してください。

4-3 介助による体位交換（別売りアシストシート併用）



4-2の方法で左右どちらかに移動したあと、寝返る向きと反対側のアシストシートで対象者の体を包み込みます。

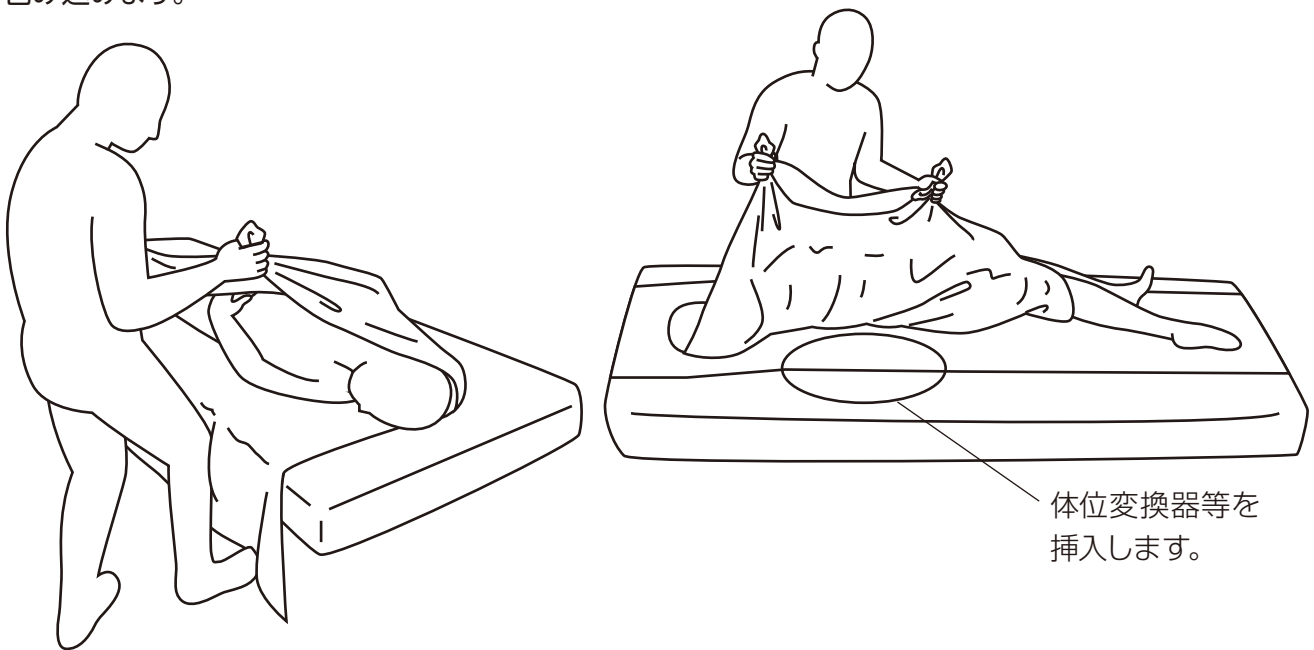

介助者はアシストシートの端を握り、ゆっくり手前に引きます。このときできるだけ対象者に近い位置のアシストシートを握るようにします。

体位変換器等を利用し、希望する体位を保持します。

5. お手入れ方法・保管方法

汚れたら80℃以下でお洗濯し、天日干ししてください。

低温(60℃以下)での乾燥機のご使用、低温でのアイロンがけが可能です。

漂白剤・柔軟剤のご使用ならびにドライクリーニングはお避けください。

風通しがよく、日光に当たらない場所で保管してください。

6. 廃棄方法

本製品を廃棄する際は、各自治体の指示に従ってください。

7. 雑

●輸入・販売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

- 大阪営業所 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072 (875) 8011 FAX 072 (875) 8015
- 札幌営業所 〒060-0051 札幌市中央区南1条東6-2-12 松浦ビル1F
TEL 011 (218) 5801 FAX 011 (218) 5805
- 仙台営業所 〒980-0873 仙台市青葉区広瀬町3-3 ハイアット広瀬町102号室
TEL 022 (227) 1820 FAX 022 (227) 1821
- 東京営業所 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3-12 グレイスビル2F
TEL 03 (3352) 0757 FAX 03 (3355) 3154
- 名古屋営業所 〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西3-5
TEL 0568 (34) 2696 FAX 0568 (34) 2697
- 広島営業所 〒733-0035 広島市西区南観音7-5-13 ロイヤルシャトー中田1F
TEL 082 (293) 6255 FAX 082 (293) 6299
- 福岡営業所 〒812-0054 福岡市東区馬出2-2-12
TEL 092 (641) 8151 FAX 092 (641) 0444

<http://www.p-supply.co.jp/>

販売店