


molift[®]
a part of Etac

モーリフト 下肢切断者用スリング

取扱説明書

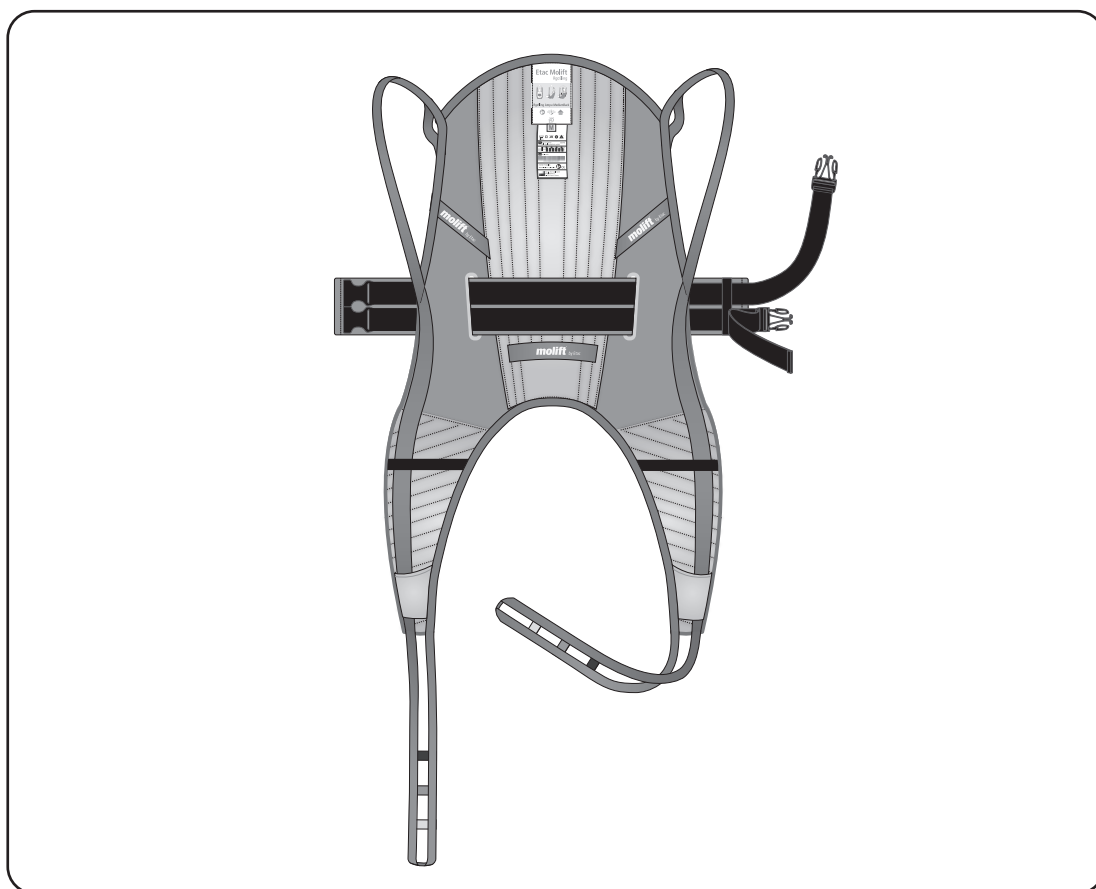

この度は「モーリフト 下肢切断者用スリング」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本製品の機能を生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解ください。その後、大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

k パシフィックサプライ株式会社

※Kマークは川村義肢株式会社の登録商標です。

※製品に関するお問い合わせは本取扱説明書最終ページをご参照ください。

転載複写厳禁

モーリフト 下肢切断者用スリング


モーリフト 下肢切断者用スリングは、切断者や筋緊張の弱い対象者のために設計されたスリングです。また、背部と大腿部にパッドが入っているのでしわができにくく、装着が簡単です。局所的に圧迫を加えることなく、対象者を快適に懸垂します。

モーリフト社製の4点ハンガーのリフト（※）でのご使用をおすすめします。

※モーリフト社製リフト

- ・モーリフト スマート
- ・モーリフト ムーバーシリーズ
- ・モーリフト パートナーシリーズ

4点ハンガー

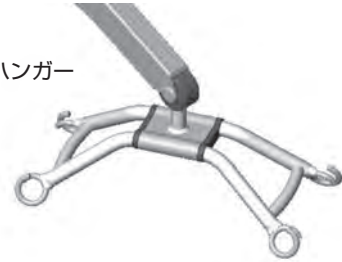

注) リフト本体とスリングは別売です。

2点ハンガーで使用する場合は、事前に使用感を確認ください。
この取扱説明書では、モーリフト社製の床走行式リフトを用いてリフトの操作方法を説明しています。

もくじ

1.安全にご使用いただくために	3
2.各部の名称と説明	6
3.仕様	6
4.使用方法	7
4-1～6 ・座位・臥位での装着方法	7
・座位・臥位での取り外し方法	9
5.保守・点検	10
・お手入れ方法	10
・点検	10
・廃棄方法	10
6.保証書	11

1. 安全にご使用いただくために

ここに記した注意事項は、本製品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですのでよくお読みいただき、正しくお使いください。

スリング・リフト をお使いいただく前に

- スリングやお使いになるリフトを必ず点検し、スリング、リフトおよびリフト関連製品の安全を確認してください。
- 対象者にリフトを使用する前に、介助者は他の人にリフトを使用し、リフトの操作を十分に練習してください。また、介助者はリフトに吊られる体験をしてください。どのように吊られるかを知ることが大切です。ご使用になるスリング全てを使って練習や体験をしてください。

絵表示について

この取扱説明書では様々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上本文をお読みください。

<注意事項> 誤った取扱いによって生じることが想定される内容を、危害や損害の程度に応じて「警告」と「注意」の2つに区分し、説明しています。必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

※レンタルなどで本製品を貸し出す場合には、この取扱説明書も一緒に貸し出してください。

また、説明書をよく読んでから使用するよう指導してください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



警告

スリングやリフトを使用する前に必ず取扱説明書をよく読み、内容を理解してください。内容を理解し、実行できない方には操作させないでください。



警告

リフトの導入、スリングの選択に際しては、医師やPT(理学療法士)、OT(作業療法士)などにご相談ください。
対象者の身体状況によっては、リフトの使用により症状が悪化する恐れがあります。対象者の症状、身体機能および介助者の機器への適応能力などをご相談ください。



警告

使用后、対象者の身体に何か異変があった場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。



警告

操作は必ず介助者が行ってください。
また介助者は対象者を懸垂している間はそばを離れないようにしてください。



警告

本製品の耐荷重は300kgです。体重が300kgを超える方には絶対に使用しないでください。ただしリフトの耐荷重が300kg以下の場合は、リフトの耐荷重を限度としてください。



警告

スリングは対象者の体重や体型を考慮し、身体に合った物をお使いください。
身体に合わない大きすぎるスリングは落下の恐れがあります。
小さすぎるスリングは過度の圧迫を与える恐れがあります。
スリング各サイズの推奨体重や寸法はこの取扱説明書の「3仕様」をご覧ください。



警告

安全のために、ご使用前後に必ずスリングの点検を行ってください。
スリングは消耗品です。使用前後には、ストラップや本体に擦り切れや裂け目、縫い目のほつれなどが
ないか点検してください。何か異常を発見した場合にはただちに使用を中止してください。



警告

スリングの改造やお客さまによる修理はしないでください。
使用中にスリングが破れて落下する可能性がありますので、絶対に改造しないでください。



警告

スリングが車椅子や固定物に引っかかっていないことを確認してからリフトを操作してください。
車椅子や固定物に引っかかっている状態で操作するとけがや破損の原因となる恐れがあります。



警告

リフトで懸垂する際には、スリングのストラップがリフトのフックにしっかりとかかっていることをご確認ください。
ストラップが確実にフックにかかっていないと、対象者がスリングから転落し、けがをする恐れがあります。



警告

リフトのフックからスリングのストラップを外す際には、対象者の体重がスリングにかかっていないことをご確認ください。
対象者が車椅子の座面、ベッド等にしっかりと着地していることを確認してください。



警告

両方の脚部サポートが、両大腿部を包み込むように敷きこまれており、外側の脚部サポートが内側の脚部サポートのガイドループに通っていることを確認してください。



警告

リフトの取扱いについては、ご使用になるリフトに添付されている取扱説明書をよくお読みください。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。



注意

人以外のものを吊らないでください。
故障・事故の原因となります。



注意

モーリフト・下肢切断者用スリングは4点ハンガー用に開発された商品です。
4点ハンガー以外のリフトで使用する場合は、事前に安全性を確認ください。



注意

対象者が安心して快適に移乗できるよう、声かけをしながら対象者の様子に注意して作業してください。
対象者がずり落ちそうになったり、痛みや不安を訴えたりする時にはリフトの使用を中止してください。



注意

リフトを移動させる際には、対象者の手足がリフトやベッド、車椅子などにぶつからないよう十分にご注意ください。




注意

対象者を懸垂した状態でリフトを移動させる際には、ベッドから車椅子へ移乗する際の方向転換など、ごく短い距離の移動のみに使用してください。
車椅子などのように部屋から部屋へ移動する為には使用しないでください。


2. 各部の名称と説明

スリングは頭部を支える「頭部サポート」の有無によって、「下肢切断者用スリング 頭部サポートなし」と「下肢切断者用スリング 頭部サポートあり」の2種類があります。頭部・体幹の支持力が弱い対象者には「下肢切断者用スリング 頭部サポートあり」をお使いください。

下肢切断者用スリング（頭部サポートなし）

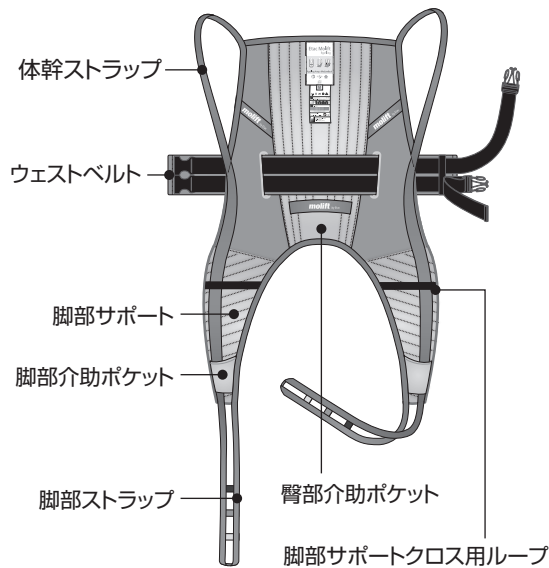

下肢切断者用スリング（頭部サポートあり）

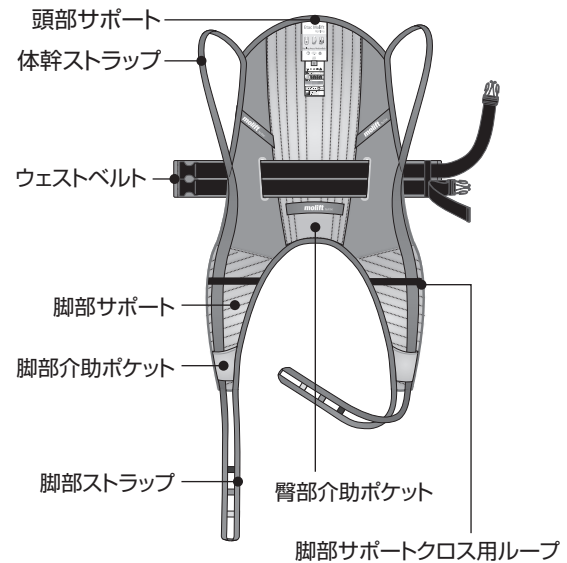

3. 仕様

適 応：本製品は以下の4点ハンガーのリフトでのご使用をおすすめします。

- ・モーリフト スマート
- ・モーリフト ムーバーシリーズ
- ・モーリフト パートナーシリーズ

材 質：ポリエステル、ポリエチレンフォーム

耐荷重：(XXS～XXLサイズ) 300kg

<サイズ表> 下表の「推奨体重」および対象者の体型、身長を考慮し、サイズをお選びください。

スリング			対象者	
サイズ	ラベルの色	耐荷重	推奨体重	ウェストサイズ
XXS	ピンク色	300kg	12～17kg	60～85cm
XS	水色		17～25kg	67～92cm
S	赤色		25～50kg	75～105cm
M	黄色		45～95kg	90～110cm
L	緑色		90～165kg	110～135cm
LL	青色		160～240kg	112～140cm
XXL	白色		230～300kg	115～150cm


4. 使用方法

頭部サポートありを用いて説明いたします。

⚠ 注意


スリングの装着、取り外しの際は、スリングを急激に引っ張らないでください。スリングを急激に引っ張ると、対象者が前方にバランスを崩す可能性があります。スリングはゆっくりと動かし、また片手で対象者の身体を支えながら作業してください。

4-1. 座位での装着 (スリングの準備)

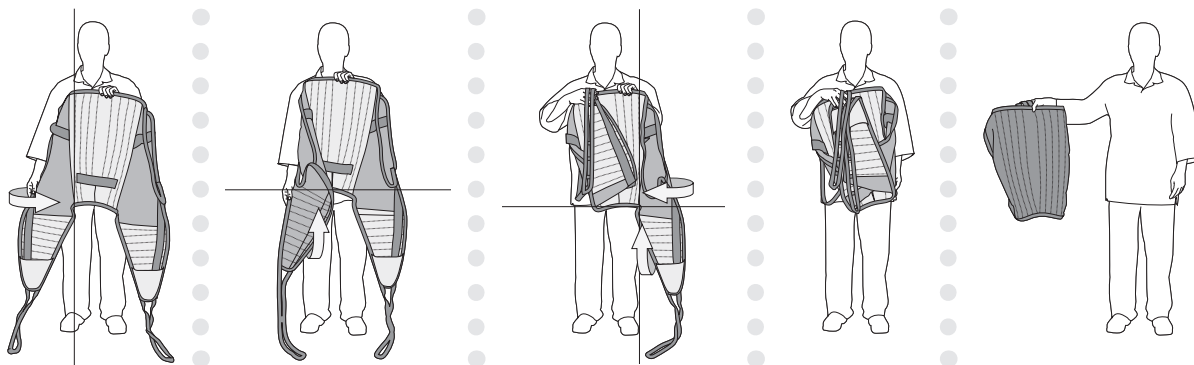


図のように脚部サポートを背部側に折り畳むと、敷き込みがしやすくなります。
(ウェストベルトは折りたたまず横に出したままにしてください。)


4-2. 座位での装着

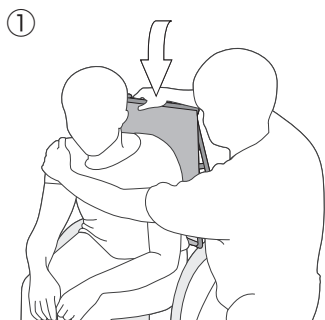

① 片手でスリングを持ち、もう一方の手で利用者を支えます。折りたたんだスリングを利用者の背中の後ろに差し込みます。

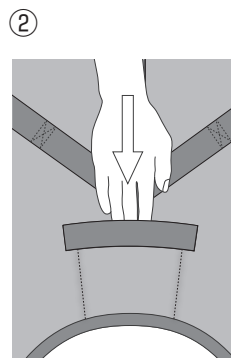


② スリングの介助ポケットに開いた手を差し込み、スリングが座面に触れるまでスリングを押し下げます。

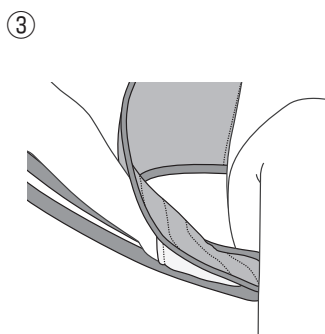


③ ウェストベルトと脚部サポートを前方へ引き出します。切断した脚側、両側切断の場合は、短い脚側*の脚部サポートを太ももの下に差し込み、両方の太ももの下を通して、反対側に引き出します。もう一方の脚部サポートも同様に敷き込み、反対側に引き出します (閉脚吊)。


*両大腿切断の方は、安全のためベーシックシート型スリングをご使用ください。

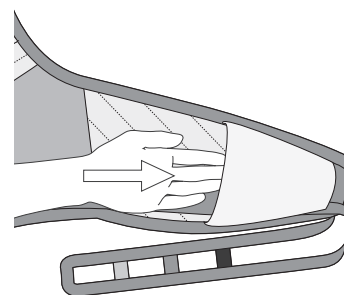

脚部サポートの端にある介助ポケットを使うと差し込みやすくなります。

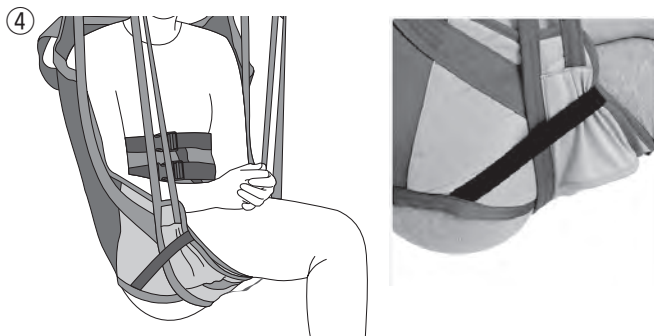


④ 後から敷きこんだ脚部サポートを、先に敷き込んだ脚部サポートの外側にあるガイドループに通します。

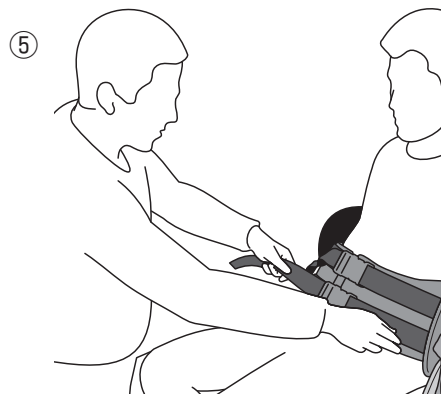


⑤ ウェストベルトを締めます。ウェストベルトは、吊り上げ時に締め直すことができます。


4-3. 臥位での装着

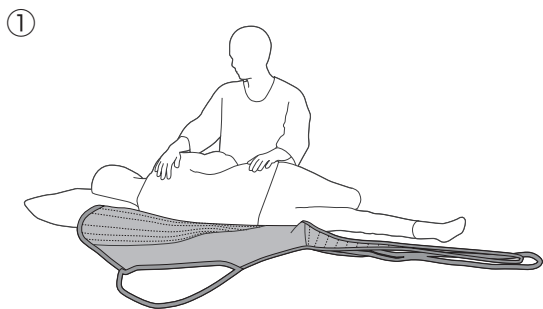


① 利用者を介助者側に向けて側臥位にします。利用者が安全に側臥位になれる側に向けましょう。

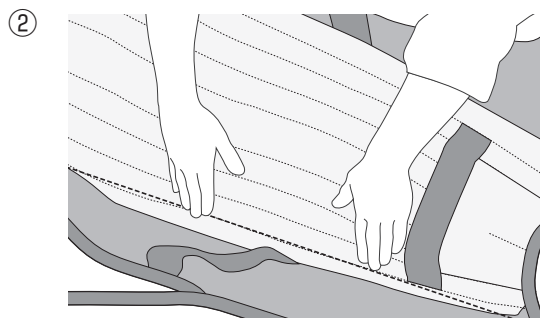

② スリングを利用者の背中側に置きます。対象者が仰向けに戻った時に、スリングの下端中央が対象者の尾骨部分にくる位置に置き、スリングの中心が対象者の脊柱と平行になるようにします。スリングの折目を利用者とマットレスの間に沿わせスリングを固定します。

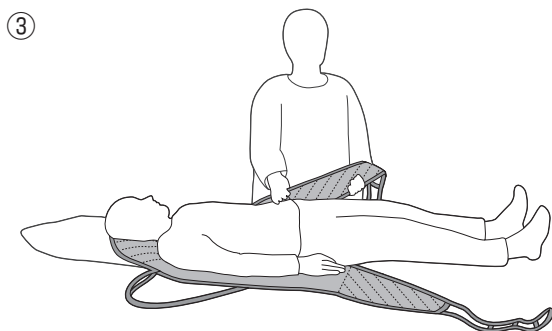


③ 利用者を仰向けに戻し、手前側のスリングとウェストベルトを引き出します。利用者がスリングの中心に位置するようにします。利用者を反対側に倒す時は、ベッドから転がり落ちないように注意して下さい。
※この後は、ベッドに背上げ機能がある場合は、それを利用することもできます。

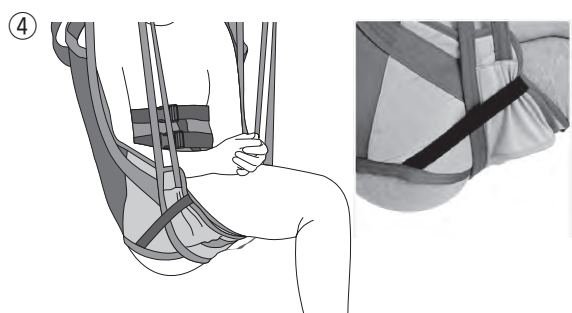


④ ウェストベルトを使用者の腰に巻き締めて下さい。ウェストベルトは、吊り上げ開始時やスリングのストラップにテンションがかかった時に締め直すことができます。切断した脚側、両側切断の場合は、短い脚側*の脚部サポートを、両方の太ももの下を通して、反対側に引き出します。もう一方の脚部サポートも同様に敷き込み、反対側に引き出します（閉脚吊）。後から敷きこんだ脚部サポートを、先に敷き込んだ脚部サポートの外側にあるガイドループに通します。
※両大腿切断の方は、安全のためベーシックシート型スリングをご使用ください。


4-4.持ち上げ

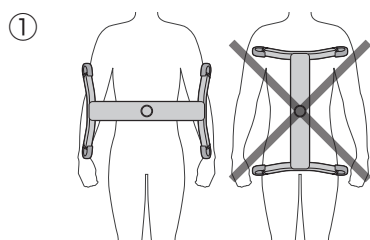



① 利用者が意図せずスリングから滑り出てしまうのを防ぐため、ハンガーは常に利用者を横切る向きにしてください。

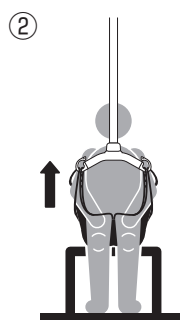

② ハンガーのフックにスリングのストラップを取り付けます。

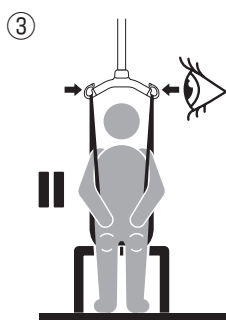


③ リフトのハンガーを上げ、対象者を持ち上げずにストラップを伸ばします。スリングが利用者に正しく取り付けられていること、およびストラップのループが吊り下げフックに正しく取り付けられていることを確認してください。

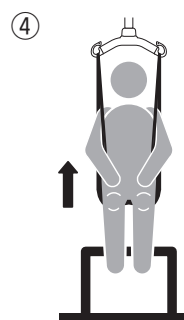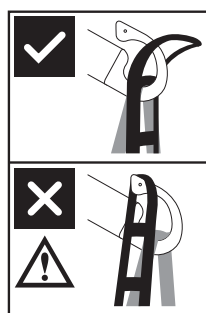

④ 利用者を必要以上に持ち上げないでください。リフトの車輪はロックしないください。


4-5.スリングの調整とチェックポイント

- ①ハンガーがユーザーの顔から離れるようにする。
- ②ウェストベルトをロックし、締める
- ③脚部サポートを利用者の下に重ねて敷く。
- ④ 一方の脚部サポートをもう一方の脚部サポートのガイドループに通す。

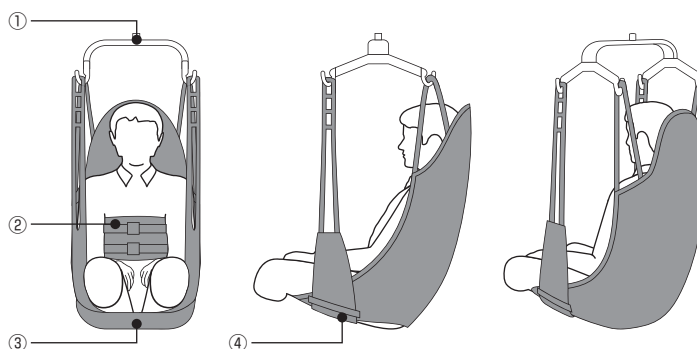


4-6.スリングの取り外し方 (座位)


取り外し方法は、装着方法と逆の手順です。「座位での装着方法」もご参照ください。

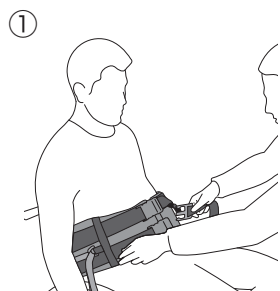

① 対象者を車椅子に降ろします。この時、対象者が快適な座位姿勢が取れるようにスリング背面の握り手を引いて位置を調整します。スリングのストラップが十分にゆるんだところでストラップをフックから外し、リフトを遠ざけます。ウェストベルトのバックルを外します。

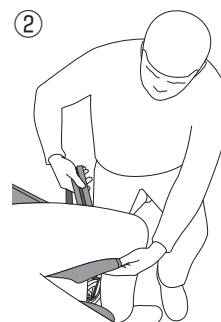


② 利用者の大腿部の下で、脚部サポートを下に折り込み、引き抜いて取り外します。

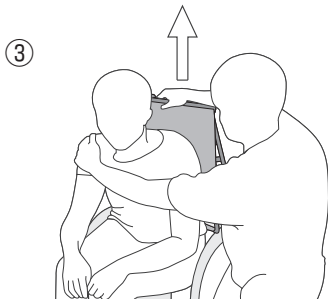

椅子の横に立ち、片手で支えながら利用者を前に傾けます。もう一方の手でスリングを引き抜き、利用者を椅子の背もたれにもたれさせます。スリングを強く引き上げると、利用者が前に倒れて怪我をする恐れがあります。常に片手で利用者を支えてください。

4-7.スリングの取り外し方 (臥位)

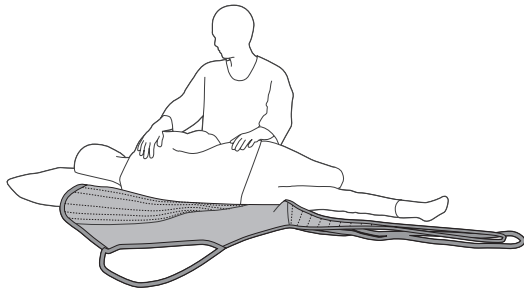

取り外し方法は、装着方法と逆の手順です。「臥位での装着方法」もご参照ください。

スリングのストラップをハンガーから外します。ウェストベルトのバックルを外します。利用者が安全な向きに横向きにします。スリングを真ん中で折り、利用者の背中の外側に置きます。次に利用者を反対側に寝かせ、スリングを引き抜きます。利用者を反対側に寝かせる時は、利用者がベッドから転がり落ちないように注意してください。

5. 保守・点検

お手入れ方法

- 85℃以下でのお洗濯が可能です。
洗濯機で洗う場合にはネットのご使用をお勧めいたします。
- オートクレープ(加圧殺菌)のご使用が可能です。(85℃、30分)
- 漂白剤のご使用はお避けください。

点検



警告

安全にお使いいただくために、必ず定期的な点検を行ってください。
スリングの劣化・交換時期は使用状況により異なります。異常がある場合はすみやかに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

- 下記の項目について毎日あるいは随時、点検を行ってください。

頻度	点検項目	点検内容
毎日	スリング本体の劣化	スリング本体に破れ、縫い目のほつれ等がないかを確認してください
毎日	ストラップの劣化	ストラップに傷、劣化等がないかを確認してください
随時	汚れ	スリングが汚れていないか確認してください

廃棄方法

- モーリフト 下肢切断者用スリングを廃棄される場合には、各自治体の規則に従ってください。

6. 保証書

本製品は、当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一製品開封時に不良がございましたら保証規程に基づき無償修理いたします。その際は現品に本保証書を添えて弊社またはご購入の販売店までご提出ください。

品名	モーリフト 下肢切断者用スリング				
お客様	ご住所 〒				
	(フリガナ)	TEL			
	お名前				
	ご購入年月日	西暦	年	月	日
販売店名					
保証期間	2年間				

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障又は不具合が発生した場合、弊社もしくはご購入の販売店までご連絡ください。
- 保証期間が過ぎた後の故障等についてご不明な場合、弊社もしくはご購入の販売店までお問い合わせください。

保証規程

1. 保証期間はご購入年月日から2年間です。保証期間内に発生した故障については、無償修理いたします。
2. 保証の対象となる部分はこの商品一式です。ただし、各部の消耗・劣化による故障、損傷は除きます。
3. 無償修理には、保証書の提出を要します。
4. 次の場合には保証はできませんが、特にご希望の方には実費にて修理いたします。
 - (1) 保証書を紛失された場合
 - (2) 取扱説明書に記載されていない誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造・分解による故障・損傷
 - (3) 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
 - (4) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
5. ご相談窓口は、弊社営業所またはご購入の販売店にて承ります。
6. 保証書の保証対象とならない故障および損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無償修理いたします。
7. その他
 - (1) 保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - (2) 保証書の再発行はいたしません。
 - (3) 送料につきましては、保証期間内は弊社負担、保証期間外はお客様負担とさせていただきます(保証規定6.の場合を除く)。

●輸入・販売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

本社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL (072)875-8008 FAX (072) 875-8010

●輸入・販売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL (072)875-8008 FAX (072) 875-8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

販売店

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2025.3