


# ビッグトラック

ablenet<sup>®</sup>

## 取扱説明書

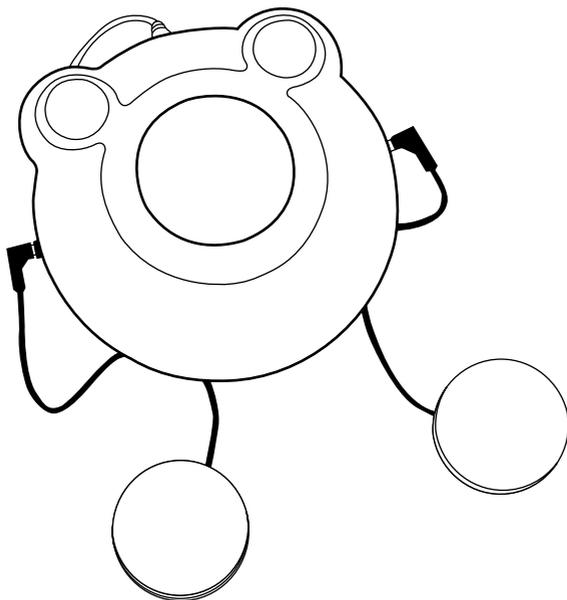

この度は『ビッグトラック』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。  
本製品の機能を生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず  
この取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解ください。その後、大切に  
保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合があります。  
必ずご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認ください。

**R** パシフィックサプライ株式会社

# ビッグトラックについて

---

## 「ビッグトラック」とは…

- パソコンの画面上のマウスカーソルを操作できる機械式のトラックボールです。
- 肢体不自由のある方に、大きなボールの操作と安定した本体部分にある各ボタンの操作によってパソコン操作を支援する機器です。
- 左・右クリックボタンに加え、左クリックを押した状態を保持するドラッグ機能を備えています。
- 外部スイッチを使用して左・右クリック操作を行なうことが可能です。
- USBで操作します。
- WindowsパソコンもしくはMacで動作します。

## もくじ

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. 安全にご使用いただくために…………… | 3  |
| 2. 各部の名称・仕様……………      | 5  |
| 3. ご使用方法……………         | 6  |
| 4. お手入れ方法・保管・廃棄……………  | 8  |
| 5. 保証書……………           | 9  |
| 6. 修理……………            | 10 |

# 1. 安全にご使用いただくために

本製品を活用し、安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は必ず保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

## 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる方に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

|   |   |
|---|---|
|  <b>警告</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
|  <b>注意</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。 |
|---|--|

## 1-1 警告に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品はパソコン操作を行なうための入力支援機器です。他の目的で使用しないでください。特に生命維持に関係する装置には一切使用しないでください。
- 本製品の使用により障害を生じる可能性があります。使用中に身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
- 落雷の恐れがある状況下でのご使用はお止めください。
- 修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。
- 使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 使用する方または支援する方は本製品の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

## 1-2 注意に関する事項




この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 本製品は精密な電子部品が組み込まれております。以下のような場所で本製品を使用又は保管した場合、動作不良や故障の原因となりますので絶対に避けてください。
  - (1) 直射日光のあたる場所、高温多湿な場所、ほこり・ちりの多い場所
  - (2) 冷暖房機器・加湿器のそば
  - (3) 水に濡れやすい場所
  - (4) 振動のある場所
- 濡れた手で本製品本体や接続ケーブル、接続コネクタに触れないでください。故障及び感電の恐れがあります。
- 本製品本体に唾液、水、粉塵、ごみ等がかからないようにしてください。動作不良や、故障の原因となります。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- ベンジン、シンナー、アルコール等で拭かないでください。材質の変色や変形の原因となります。
- 直接日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブなど）の近くで使用しないでください。熱により変形を起こす原因となります。
- 酸素やオゾン等、腐食性ガスの発生する場所での使用はお止めください。
- 本製品の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までお問い合わせください。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れ等に気づいた場合は販売店までご連絡ください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。またその際発生した損傷、利益損失に関しては弊社では責任を負うことはできませんのでご了承ください。
- 本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品と異なっている場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

# 2.各部の名称・仕様

## 2-1 構成部品と各部の名称

本製品は次の部品で構成されています。付属品に不足はないかご確認ください。

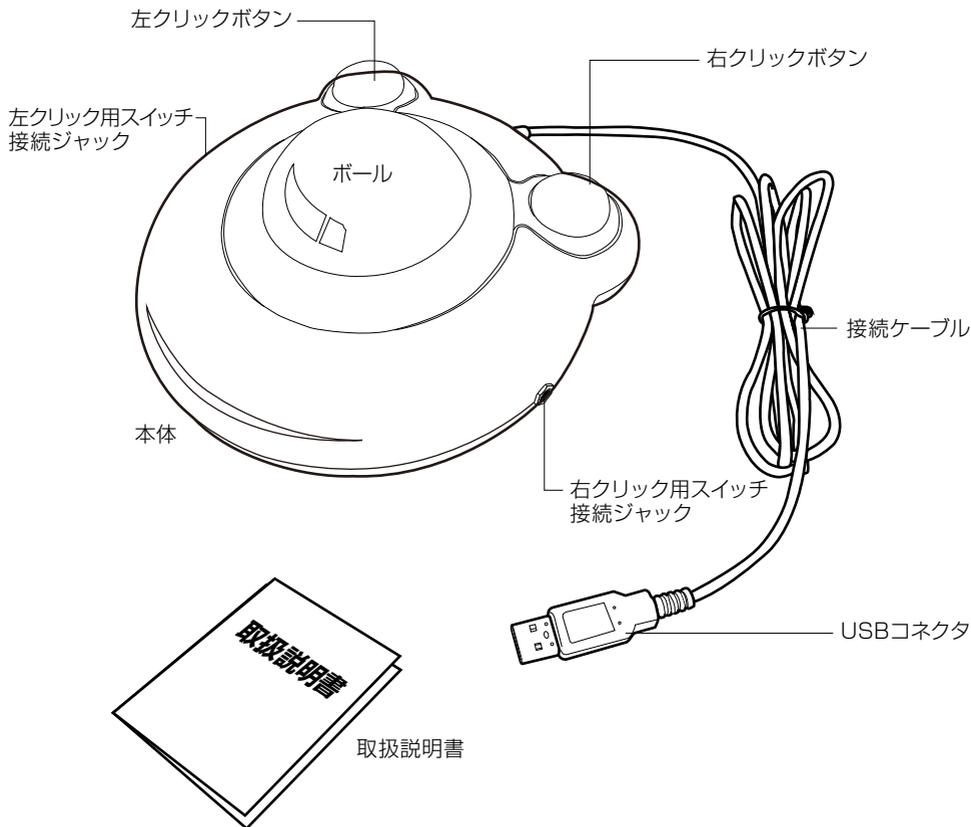

## 2-2 製品仕様

| 部分名称 | 仕様        |   |
|------|-----------|---|
| 本体   | 横×縦×高さ    | 約170×170×80 (mm)                                    |
|      | 重量        | 約530g   |
|      | ボール直径     | 約75mm   |
|      | 接続ケーブル長   | 約1.6m (USBコネクタ含む)                                   |
|      | スイッチ用ジャック | 3.5mmモノラルジャック                                       |
|      | 接続方式      | USB   |
|      | 動作OS      | Windows:Windows98SE以降<br>Mac:MacOS 9/MacOS X 10.1以降 |

※上記の動作環境を満たす機器であっても全ての機器での動作を保証するものではありません。

# 3. ご使用方法

## 3-1 使用する前に



### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品はパソコン操作を行なうための入力支援機器です。他の目的で使用しないでください。特に生命維持に関係する装置には一切使用しないでください。
- 本製品の使用により障害を生じる可能性があります。使用中に、身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
- 落雷の恐れがある状況下での使用はお止めください。
- 修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。
- 使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。



### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 使用する方または支援する方は本製品の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。


## 3-2 各部の機能に関して

| 各部名称                   | 機能説明   |
|------------------------|--|
| ボール                    | マウスカーソルの操作を行ないます。<br>ボールを転がす方向にマウスカーソルが移動します。  |
| 左クリックボタン               | マウスの左クリックと同じ動作をします。                            |
| 右クリックボタン               | マウスの右クリックと同じ動作をします。ドラッグ機能があります。(3-5)           |
| 左・右クリック用<br>スイッチ接続ジャック | 外部スイッチを接続することで<br>それぞれ左クリックボタン・右クリックボタンを代替します。 |
| USBコネクタ                | パソコンのUSBポートに接続します。                             |

## 3-3 USBポートに接続する

- ・本製品のUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続してください。自動的に使用できる状態になります。
- ・本製品をパソコンのUSBポートに接続するときや、取り外しを行なう際にパソコンの電源をオフにする必要はありません。

※USBポートに接続する場合、WindowsもしくはMacで動作します。対応OSは5ページの2-2製品仕様でご確認ください。

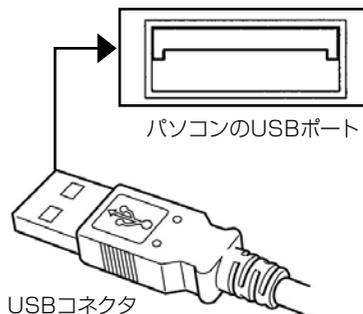

---

### **3-4 ドラッグ機能**

- ・アイコンにカーソルを合わせ、右クリックを2回押します。
- ・カーソルを動かすとアイコンを移動することができます。
- ・ドラッグ機能を解除したい場合、アイコンを移動したいところで左右どちらかのクリックボタンをクリックしてください。

### **3-5 スイッチの接続**

- ・本製品の左・右クリックボタンの操作が難しい場合、外部スイッチで操作を代替することが可能です。
- ・本体左側面にある「左クリック用スイッチ接続ジャック」は左クリックボタンを、本体右側面にある「右クリック用スイッチ接続ジャック」は右クリックボタンを代替します。
- ・ジェリービーンズスイッチツイスト、スペックスイッチといったエーブルネット製のスイッチはもとより、パシフィックサブライ製スイッチなど3.5mmモノラルプラグ形状のスイッチが接続可能です。

### **3-6 マウスカーソルの移動スピードの調節**

- ・Windows・MacOS 9の場合、「コントロールパネル」内の「マウス」で調節を行なってください。
- ・MacOS X 10.1以降の場合、「システム環境設定」内の「キーボードとマウス」で調節を行なってください。

# 4.お手入れ方法・保管・廃棄

---

- ・本製品のお手入れの際は、固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- ・本製品は湿気やほこりの多い場所、高温になる場所や振動のある場所には、保管しないでください。故障の原因となります。
- ・本製品が故障した場合、販売店までご連絡ください。
- ・本製品を廃棄する際は、各自治体の規則に従ってください。

※ Windowsは米国 Microsoft Corporationの登録商標です。

※ Macintosh、Mac、Mac OSは米国Apple Inc.の登録商標です。

# 5.保証書

本製品は、当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一商品開封時に不良がございましたら保証規程に基づき無償修理致します。その際は現品に本保証書を添えて弊社またはご購入の販売店までご提出ください。

|                 |         |     |  |  |
|-----------------|---------|-----|--|--|
| 品名              | ビッグトラック |     |  |  |
| お客様             | ご住所 〒   |     |  |  |
|                 |         | TEL |  |  |
|                 | (フリガナ)  |     |  |  |
|                 | お名前     |     |  |  |
| お買い上げ日 西暦 年 月 日 |         |     |  |  |
| 販売店名            |         |     |  |  |
| 保証期間            | 2年間     |     |  |  |

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障又は不具合が発生した場合、弊社もしくはご購入の販売店までご連絡ください。

## 保証規程

1. 保証期間はご購入日から2年間です。保証期間内に発生した故障については、無償修理致します。
2. 無償修理には、保証書の提出を要します。
3. 次の場合には保証はできませんが、特にご希望の方には有償にて修理致します。
  - (1) 保証書を紛失された場合
  - (2) 取扱説明書に記載されていない誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造・分解による故障・損傷
  - (3) 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
  - (4) 保証書にご購入日、お客様名の記入のない場合、または不当変更を加えられた場合
  - (5) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
4. ご相談窓口は、弊社営業所またはご購入の販売店にて承ります。
5. 保証書の保証対象とならない故障および損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無償修理致します。
  - (1) 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
  - (2) 保証書の再発行はいたしません。

# 6.修理

---

故障した場合はお買い上げ頂きました販売店を通じて修理を致します。

- 本製品の修理は、ご購入後3年目以降5年目迄は有償にてお受けいたします。
- ご購入後5年以降の修理については、お受けできません。
- 本製品の保証期間内による故障については、保証規定に従い、  
無償修理又は有償修理となります。
- 保証期間経過後も本書は保管してください。無償、有償を問わず修理には、  
保証書の提示を要します。
- 修理は部品の補修、取り換えではなく、新品との交換となります。

# 7. メモ

---

●販売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1  
TEL 072 (875) 8008 FAX 072 (875) 8010

---

<https://www.p-supply.co.jp/>

販売店