

保証書

品名	マニユTrain			
お客様	ご住所 〒			
	(フリガナ)			
	お名前			
ご購入年月日	西暦	年	月	日
販売店名				
保証期間	ご購入日より 2ヶ月間			

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償交換をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障又は不具合が発生した場合、ご購入の販売店までご連絡ください。

保証規程

1. 保証期間はご購入年月日から2ヶ月間です。
2. 無償交換には、保証書および販売時のレシートの提出を要します。
3. 次の場合には保証は致しかねます。
 - (1) 保証書を紛失された場合
 - (2) 火災、地震等の天災地変による故障、損傷が生じた場合
 - (3) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障、損傷が生じた場合
 - (4) 保証書のご購入年月日、お客様欄、販売店名の記入の無い場合、または不当に変更を加えられた場合
 - (5) 取扱説明書に記載されていない誤った使用・装着・洗濯方法をされた場合
 - (6) お客様による誤った修理・改造・分解をされた場合
 - (7) 爪等の鋭利な物によるひっかき、地面等との接触や摩擦による擦れなど、品質に関わらない故障・損傷が生じた場合
 - (8) 製品のシリアルナンバーが分からない場合
 - (9) その他弊社が保証の必要がないと判断した場合
4. ご相談窓口は、ご購入の販売店にて承ります。
5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
6. 保証書の再発行はいたしません。

パウアーファインド社 正規販売代理店

パシフィックサプライ株式会社 (本社) 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL.072-875-8008(代) FAX.072-875-8010(代)

2024.12

マニユTrain 取扱説明書



SUPPORTING ATHLETES

パウアーファインドのサポーターに関しては、
下記サイトにも多くの情報を掲載しています。

パウアーファインド 特設サイトはこちら ▶

<https://bauerfeind.p-supply.co.jp/>



Instagram



Facebook



X

パウアーファインド社発行の取扱説明書（多言語対応版）を製品へ封入しておりますが、日本語ページについては、こちらの取扱説明書をご覧ください。

マニュTrain



- スポーツ時など、激しい運動をされる際にお使いください。
- 長時間身体を動かさない（座るなど）時には、使用をお控えください。

マニュTrainは手首の不安から解き放つ、スポーツに最適なサポーターです。

- 伸縮性のあるニット生地によって快適な装着感です。
- ストラップによって手首の安定を三段階に調整できます。
- シリコンパッドが手首の筋をマッサージします。




主な適応

- * オーバーユースによる痛み
- * 骨膜炎
- * 変形性手関節症
- * 不安定症

長ベルトの装着方法

※固定力を強くしたい場合


- ①シリコンパッドのくぼみと骨突起部が合うようにマニュTrain本体を装着します。
- ②ストラップのベルクロ*を親指下部に貼り付け、ストラップを手の甲側に回します。この時手首を安定させるために手首を手の甲側に少し曲げます。
- ③ストラップを小指の外側から手の平側に回します。
- ④次に人差し指と親指の間を通したあと、手の甲側に回し、⑤⑥⑦、親指側の手首に回して、最後にぐるりと手首に巻きつけます。

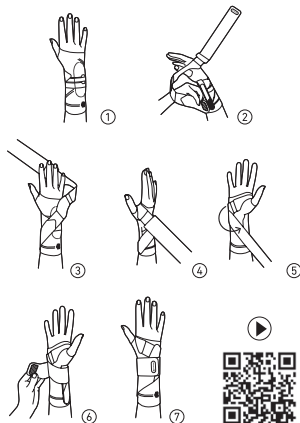

※動画でもご確認くださいませ。QRコードからご参照ください。

短ベルトの装着方法

- ①②③ストラップを中央の接続部分から取り外し、④親指側にある☒のマークにあわせて、ストラップを取り付けます。
- ⑤手の甲側に回し、⑥最後にぐるりと手首に巻き付けます。
- ①②③ストラップを中央の接続部分から取り外し、④親指側にある☒のマークにあわせて、ストラップを取り付けます。
- ⑤手の甲側に回し、⑥最後にぐるりと手首に巻きつけます。

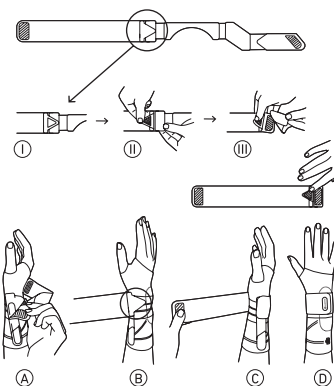

お手入れの方法



注意

- 洗濯は中性洗剤を使用して、30℃以下の水又はぬるま湯で行なってください。
- 洗濯機使用時はネットに入れて洗濯してください。
- ドライヤーやヒーターでは乾かさず、日陰で自然乾燥させてください。
- ドライクリーニングは行なわないでください。



洗濯機使用時
ネットに入れて
洗濯可



×漂白剤



×アイロン



×ドライクリーニング



×乾燥機

サイズ



サイズ	1	2	3	4	5	6
周径 (cm)	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20

- ※手首の一番細い部分をご計測ください。
- ※製品には左・右がございます。
- ※本製品は改良のため、予告なく変更を行なう場合があります。
- ※廃棄については各自自治体の指示に従ってください。



注意

製品にはシリアルナンバーが記載されたタグが縫製されています。（一部のソックス・インソール製品を除く）
シリアルナンバーがわからない場合、保証期間内であっても製品の保証対象外となりますのでタグは切り取らないようお願いいたします。