

保証書

品名	ゲニユTrain			
お客様	ご住所 〒			
	(フリガナ)			
	お名前			
ご購入年月日	西暦	年	月	日
販売店名				
保証期間	ご購入日より 2ヶ月間			

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償交換をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障又は不具合が発生した場合、ご購入の販売店までご連絡ください。

保証規程

1. 保証期間はご購入年月日から2ヶ月間です。
2. 無償交換には、保証書および販売時のレシートの提出を要します。
3. 次の場合には保証は致しかねます。
 - (1) 保証書を紛失された場合
 - (2) 火災、地震等の天災地変による故障、損傷が生じた場合
 - (3) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障、損傷が生じた場合
 - (4) 保証書のご購入年月日、お客様欄、販売店名の記入の無い場合、または不当に変更を加えられた場合
 - (5) 取扱説明書に記載されていない誤った使用・装着・洗濯方法をされた場合
 - (6) お客様による誤った修理・改造・分解をされた場合
 - (7) 爪等の鋭利な物によるひっかき、地面等との接触や摩擦による擦れなど、品質に関わらない故障・損傷が生じた場合
 - (8) 製品のシリアルナンバーが分からない場合
 - (9) その他弊社が保証の必要がないと判断した場合
4. ご相談窓口は、ご購入の販売店にて承ります。
5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
6. 保証書の再発行いたしません。

パウアーファインド社 正規販売代理店

パシフィックサプライ株式会社 (本社) 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL.072-875-8008(代) FAX.072-875-8010(代)

2024.12

ゲニユTrain 取扱説明書



SUPPORTING ATHLETES

パウアーファインドのサポーターに関しては、
下記サイトにも多くの情報を掲載しています。

パウアーファインド 特設サイトはこちら ▶

<https://bauerfeind.p-supply.co.jp/>



Instagram



Facebook



X

パウアーファインド社発行の取扱説明書（多言語対応版）を製品へ封入しておりますが、日本語ページについては、こちらの取扱説明書をご覧ください。

ゲニュTrain



注意

- 歩行などの日常生活やスポーツなどの運動をされる際にお使いください。
- 長時間身体を動かさない（座るなど）時には、使用をお控えください。

ゲニュTrainは膝の不安から解き放つ、スポーツに最適なサポーターです。

- ムレ感を抑えた、肌にやさしいニット編み。
- 敏感なひざ裏は薄くて柔らかく、ひざの曲げ伸ばしがスムーズです。
- ひざの上のパッドが、運動中ひざをマッサージし、疲れを軽減します。
- 立体縫製により、高いフィット感がもたらされます。

主な 適応

- * 膝関節の捻挫、変形性関節症、関節炎、外傷後及び術後の炎症
- * 不安定症

ゲニュTrainの装着方法

- 図1** 本体上部のループ部を持ち、足に通します。
- 図2** 膝まで引っ張り上げます。
※その際、爪等でサポーター本体を傷つけないようにご注意ください。
- 図3** シリコンインサートがしっかり膝蓋骨を囲むように調整してください。
- 図4** サポーターを外す際には、下部のループを持ち、下に引っ張るようにして外してください。
※上部をめぐって外すのはおやめください。ステーや本体の破損につながるおそれがあります。



図1

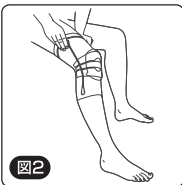


図2



図3

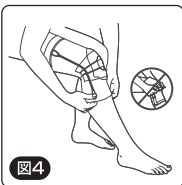


図4

お手入れの方法



注意

- 洗濯は**中性洗剤**を使用して、**30℃以下**の水又は**ぬるま湯**で行なってください。
- 洗濯機使用時はネットに入れて洗濯してください。
- ドライヤーやヒーターでは乾かさず、日陰で自然乾燥させてください。
- ドライクリーニングは行なわないでください。



洗濯機使用時
ネットに入れて
洗濯可



×漂白剤



×アイロン




×ドライクリーニング



×乾燥機

サイズ (cm)

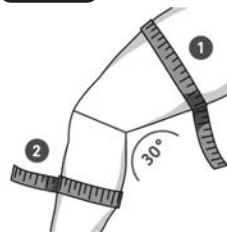

- ※本製品は改良のため、予告なく変更を行なう場合があります。
- ※廃棄については各自治体の指示に従ってください。

サイズ	①大腿部周径	②下腿部周径
0	35~38cm	25~28cm
1	38~41cm	28~31cm
2	41~44cm	31~34cm
3	44~47cm	34~37cm
4	47~50cm	37~40cm
5	50~53cm	40~43cm
6	53~56cm	43~46cm



注意

製品にはシリアルナンバーが記載されたタグが縫製されています。
(一部のソックス・インソール製品を除く)
シリアルナンバーがわからない場合、保証期間内であっても製品の保証対象外となりますのでタグは切り取らないようお願いいたします。