


Viscoペド (41-7510-)

Viscoスポット (40-7422-)

Viscoヒール (Nタイプ: 40-7410-/Kタイプ: 40-7430-)

## Viscoペド

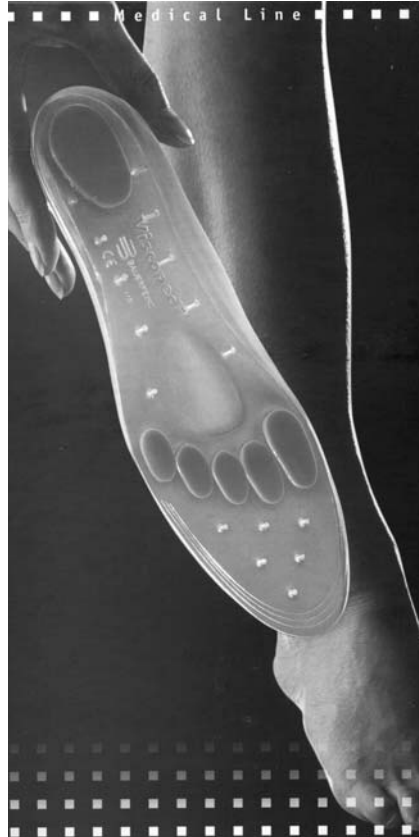

本製品の最初の適合は、医師または義肢装具士が行って下さい。医師または義肢装具士以外によって適合された場合、保証が適用されない場合があります。

### Viscoペドの装着方法

- ① 本製品を左右(左=L、右=R)のマークに従い、靴の踵部分で同じ高さとなるように靴へ挿入します。
- ② サイズが大きすぎる場合、前方部分をはさみでカットして下さい(踵部分のカットはしないで下さい)。カットする場合の基準線が前方部にありますので、それに合わせてカットして下さい。

サイズ (cm)

サイズ	靴サイズ
1	20.5~22cm

サイズ	靴サイズ
2	22.5~24cm

サイズ	靴サイズ
3	24.5~26.0cm

サイズ	靴サイズ
4	26.5~28cm

サイズ	靴サイズ
5	28.5~30cm

## Viscoスポット



本製品の最初の適合は、医師または義肢装具士が行って下さい。医師または義肢装具士以外によって適合された場合、保証が適用されない場合があります。

### Viscoスポットの装着方法

本製品を靴の踵部分に正確にフィットするように挿入します。

サイズ (cm)

サイズ	靴サイズ
1	21.5~26.5cm

サイズ	靴サイズ
2	26.5~31.5cm

## Viscoヒール



本製品の最初の適合は、医師または義肢装具士が行って下さい。医師または義肢装具士以外によって適合された場合、保証が適用されない場合があります。

### Viscoヒールの装着方法

**Viscoヒール N** 本製品を靴の踵部分で正確にフィットするように靴へ挿入して下さい。

**Viscoヒール K** \*内反にするには: Aとマークが入っている方を右側の靴へ、Bとマークの入っている方を左側の靴へ挿入して下さい。踵部で正確にフィットするようにします。

\*外反にするには: Aとマークが入っている方を左側の靴へ、Bとマークの入っている方を右側の靴へ挿入して下さい。踵部で正確にフィットするようにします。

サイズ (cm)

サイズ	靴サイズ
1	16.5~21.5cm

サイズ	靴サイズ
2	21.5~26.5cm

サイズ	靴サイズ
3	26.5~31.5cm



### 使用上の注意

- ① 以下の場合、製品を使用される前に医師にご相談下さい。製品の装着部位に皮膚の疾患/疾病、特に炎症が見られる場合。同様に、腫れが伴い、傷が隆起している場合、または赤みや過度の発熱が見られる場合。
- ② 本製品は複数の方での共用はせず、一個人の方の使用に限定して下さい。
- ③ 誤った使用をされた場合、改造された場合、製品の機能低下を引き起こしますので、保証は適用されません。
- ④ 万一、症状の悪化などの異常に気付いた場合、直ちに医師へ御相談下さい。
- ⑤ 製品の保証期間は弊社出荷日より1年間です。
- ⑥ 廃棄は各自自治体の指示に従って下さい。



### 取扱上の注意

- 本製品は中性洗剤を使用して、30℃以下のお湯または水で洗って下さい。
- 乾燥は、ヒーターや乾燥機などは使用せず、自然乾燥させて下さい。

本製品は改良のため、予告なく変更を行なう場合があります。

Bauerfeind Orthopädie GmbH & Co. KG 正規販売代理店

パシフィックサプライ株式会社 (本社) 大阪府大東市御領1-12-1

〒574-0064

TEL:072-875-8008(代)

FAX:072-875-8010(代)

2009.06