


小電力型ワイヤレスコール登録方法（簡易版）

本資料では送信器と受信器の登録の基本的な方法を説明します。
 詳細な設定や注意事項については、各製品に付属の取扱説明書も併せてお読み願います。

1. 送信器の準備

- 送信器のフタを開けて、付属の電池（CR2）をセットして、ふたを閉めます。
- 入力スイッチを接続して、入力スイッチを押します。
 この時、送信器正面右下の送信灯（小さな窓）が赤く光ったら、信号を発信していることが判ります。

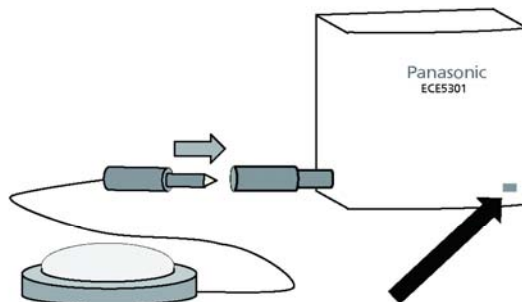

入力スイッチ（別売）
 ※イラストは一例で、ご利用者の身体状況に合わせたものをご用意ください。

送信灯
 電波を送信した時に赤く光ります。


2. 受信器の準備

受信器は「卓上受信器（ECE1601P）」と「携帯型受信器セット（ECE161KP）」があります。
 ご利用される受信器の種類に応じた設定方法を選んで下さい。

2.1 卓上受信器（ECE1601P）の場合 （取扱説明書P9、P10より抜粋）

- 受信器の電源プラグを差し込む
 - 電源表示灯が緑色点滅、用件ランプ1が赤色点滅する。 ← **登録モード**
- 登録ボタンを押して登録したい報知音の用件ランプを赤色点滅させる

例) 壁掛発信器を用件ランプ2に登録する場合

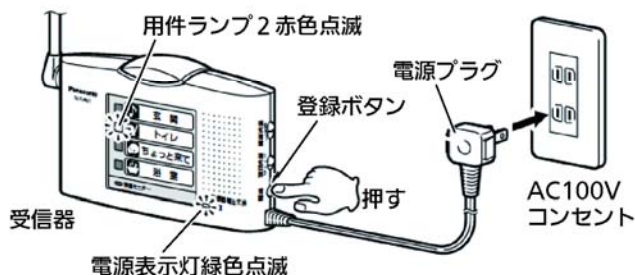

登録ボタンを押す回数	用件ランプ	報知音
—（登録モード時）	1が点滅	プルプル
1回押すと	2が点滅	ブー
2回押すと	3が点滅	ピピッ
3回押すと	4が点滅	ポロロン

登録ボタンを押すごとに上記の表を繰り返します。

- 注** ● 1台でも発信器を登録している場合は、登録ボタンを4回押すと用件ランプは消灯します。
 [押すごとに上記の表と消灯を繰り返します。ただし、消灯から用件ランプ1に戻すときには約1秒間押し続けて下さい。]
- チャイム発信器または熱線センサー発信器と組み合わせると来客報知音「ピンポン」音を鳴らすこともできます。
 詳しくは発信器に付属の説明書を参照してください。

- 発信器の押しボタンを押す


- 受信器に登録される
 - 用件ランプ2が赤色点灯し、報知音が鳴る。



- 注** ● 報知音が止まると用件ランプ2が赤色点滅し、引き続き登録できます。発信器を複数台登録する場合は②、③の操作を繰り返して下さい。
 ● 31台目を登録しようとするとき受信器から警告音「ピッピッピッ」音が鳴り登録できません。
 ● 登録時は着信ランプは点滅しません。

- 登録ボタンを3回押して、用件ランプを消灯させる


●電源表示灯が緑色点灯する。 ← **登録完了**

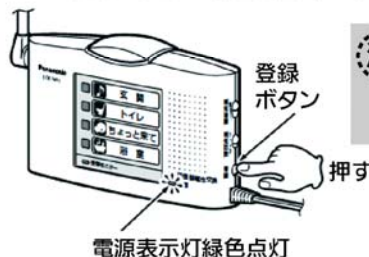

- 注** ● ④の登録から約1分間経過すると、自動的に**登録完了**します。


2.2 携帯型受信器セット (ECE161KP) の場合 (取扱説明書P20~P21より抜粋)

【製造販売元】
パナソニック
エイジフリーライフテック (株)
〒571-8686
大阪府門真市大字門真1048
0120-365-887
受付時間 9:00~17:30
(土、日、祝日休み)

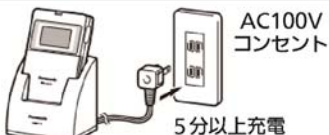

AC100V
コンセント
5分以上充電

① 携帯受信器にニッケル水素電池を入れて、5分以上充電する

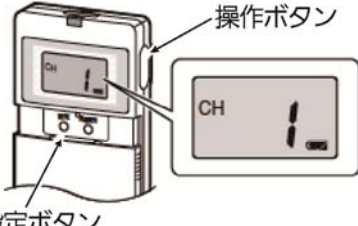


操作ボタン
設定ボタン

② 一度電源を切り、設定ボタンを押しながら操作ボタンを2秒間おして、周波数チャンネルを表示させる (電源を切るには45ページ参照)

③ 携帯受信器と発信器の周波数チャンネルが同じであることを確認する

注) 電源が入らない場合は充電が不足しています。さらに充電してください。




操作ボタン

④ 操作ボタンを押し、設定モードにする。

- 「登録」が点灯し、「CL」が点滅します。

注) すでに発信器が1台以上登録されている場合は通常モードになります。設定ボタンを約2秒間押し続けて設定モードにしてください。

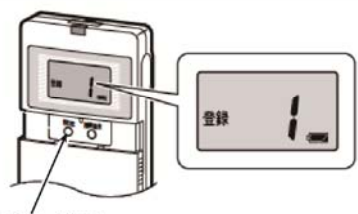


設定ボタン

⑤ 設定ボタンを4回押して、登録番号「1」を点滅させる

- 設定ボタンを短く押すごとに登録番号が「CL」→「PP」→「00」→「0」→「1」…「99」→「CL」…と変わります。


〔設定ボタンを押し続けると、10単位で変わります。また番号を戻すことはできません。〕



入力スイッチを押す

⑥ 入力スイッチを押す
(「1」に登録する場合。「2」以降の数字に登録したい場合は、この操作の前に設定ボタンを押して登録番号を変更します。)

- 登録が完了すると携帯受信器から「ビー」音が1秒間鳴動します。
- 液晶表示部は「1」が点滅し続けます。



操作ボタン

⑦ 操作ボタンを4回押す

- 登録した発信器で使用できます。

注) 操作ボタンを押す回数によって発信器の設定・登録ができます。

操作ボタンを押す	画面表示	内容	参照ページ
1回押す	登録消去表示	登録された発信器を登録消去します。	48ページ
2回押す	音鳴動設定表示	受信時の「報知音」の設定をします。	51ページ
3回押す	振動設定表示	受信時の「振動」の設定をします。	51ページ
4回押す	通常モード	登録した発信器で使用できます。	39ページ

(表示画面は通常モードを示します)

動作確認

● すべての発信器の登録が完了してから、発信器を操作して携帯受信器が正常に動作することを確認してください。

【ご注意】

ご利用に際しては、以下の点に十分注意願います。

- 本ワイヤレスコールシステムは、ナースコールの代替としての使用は出来ません。
- 送信器と受信器の電波の到達距離は、障害物のない場所での水平見通し距離で卓上受信器 (ECE1601P) で約40m、携帯型受信器セット (ECE161KP) で約30mです。ご使用になられる環境で電波が確実に届くことを確認して下さい。
- 送信器に外部スイッチ等を接続して使用する場合は、介助者がケーブルの断線が無いことを常に確認しながら使用してください。
- 各製品に付属の取扱説明書も必ずお読み下さい。