


# LASAL

## ラッサル・フロートクッション

### 取扱説明書

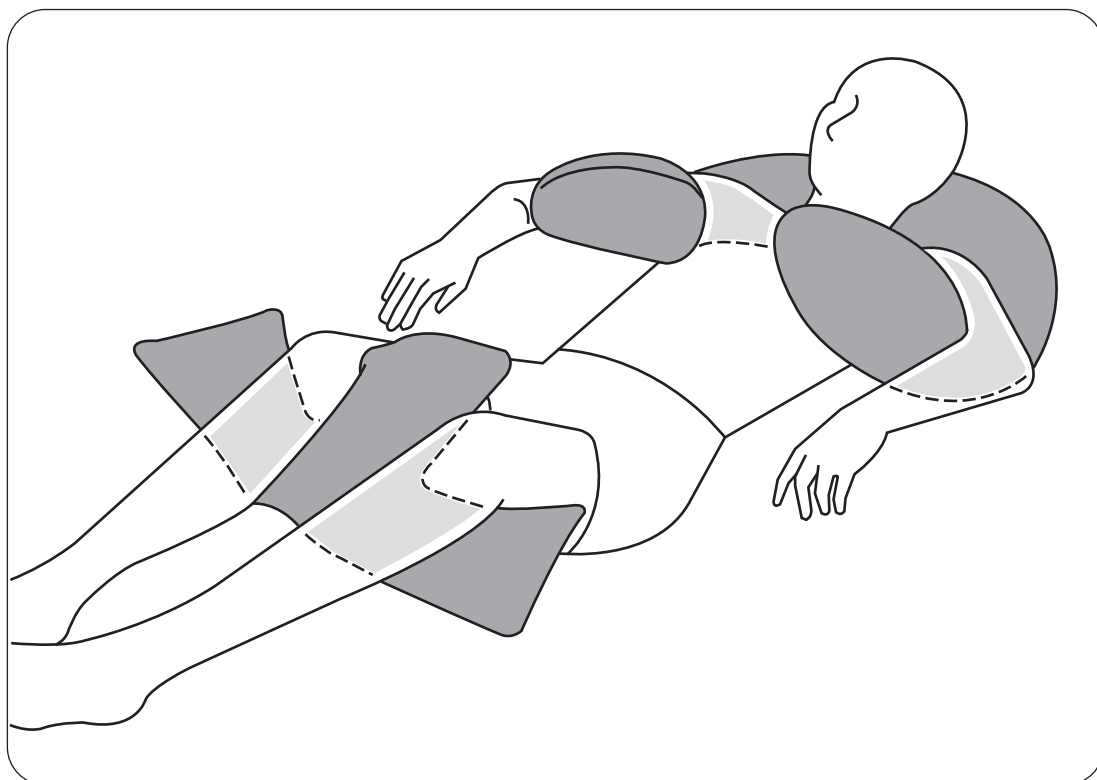

この度は、ラッサル・フロートクッションをご購入頂きまして誠に有難うございます。本製品を安全にご使用頂き、特性を十分に活用して頂く為、ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。また、お読みになられた後も保存し、必要に応じて繰り返しお読み頂けます様お願い申し上げます。

**k** パシフィックサプライ株式会社

※Kマークは川村義肢株式会社の登録商標です。

※製品に関するお問い合わせは本取扱説明書最終ページをご参照ください。

転載複写厳禁

# もくじ

01. 安全にご使用頂くために .....	3
02. 「ラッサル・フロートクッション」の用途及び特徴 .....	4
03. 仕様 .....	4
04. 取扱製品 .....	4～6
05. 使用後のお手入れ・取扱方法 .....	7
06. 入浴時のご利用について .....	8
07. 保証書 .....	9～10

**絵表示について** この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上本文をお読みください。



## 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

# 1. 安全にご使用頂くために

本書では、いろいろな絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の方に加える恐れのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっていますので、内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

## 使用上の注意

1. リハビリ用として使用される場合は、必ず医師、セラピスト、保護者のご指導・ご監督のもとでご利用ください。
2. 救命用や救命胴衣として使用しないでください。
3. 直射日光にさらさないでください。  
クッションの布材が劣化してしまう恐れがあります。
4. 重い物を上に置かないでください。  
ビーズが潰れ十分な浮力と製品特性が活かされなくなります。
5. 火気厳禁。本製品を火の側に置かないでください。引火する恐れがあります。
6. 本製品を絶対に口に被せたり、口の中に入れてください。  
窒息などの危険がございます。
7. はさみやナイフ、カッターなどの鋭利な刃物やザラザラした表面に近づけないでください。  
クッションが破れビーズが漏れ出してしまいます。
8. 過度の重量・衝撃が加わると破損の原因となる場合がございます。  
ご注意ください。
9. 水中では必ず介助者付き添いのもと、ご使用ください。
10. 水中で対象者の身体を動かす際は、クッションを持つのではなく、必ず対象者の身体を持って動かしてください。

## 衛生上の注意

1. 適切な塩素濃度で（維持）・（管理）されたプール内でご使用ください。  
万一、塩素濃度が低い所で使用された場合、水分がクッション内に残りカビが発生する原因になります。  
※本製品をご使用される際、ご利用になるプール施設が国で定められている『プールの衛生基準』が満たされている事をご確認ください。
2. 海水でのご使用は衛生管理上控えてください。

## 2. 「ラッサル・フロートクッション」の用途及び特徴

用途	プール内（日本国内）でのリハビリやアクティビティー時の浮具
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>○本製品は、お子さまから大人の皆さまにご使用頂けるプール用の浮具です。水中での空気による反発を軽減させる為、クッション内へ水を吸収させる事で水中への沈込みの感覚が得られる様になっています。</li> <li>○クッション内に極小のビーズを採用した事で、身体への馴染みが高く、ご使用される方にとって大変快適な製品です。</li> <li>○ビーズ自体が浮力材となっている新しいタイプの浮具です。</li> <li>○必要に応じて複数のクッションを組み合わせる使用することができます。</li> </ul>


## 3. 仕様

材質	本体カバー／ポリエステル 本体内部／難燃性EPSビーズ（発泡ポリスチレン）
通気部	ポリエステル／メッシュ生地
製造国	Cobi Rehab社 / デンマーク製

※商品仕様は予告なく変更する場合がございます。

## 4. 取扱製品


詳しい情報はホームページをご覧ください。

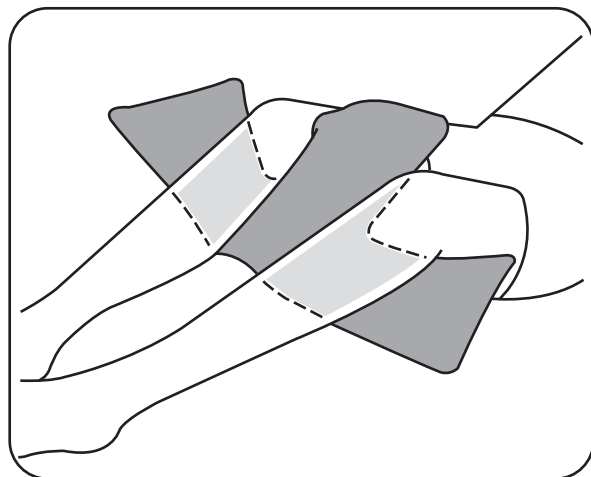

品名	品番	サイズ
Tフロートクッション	29341001	L
	29341002	S




- 救命胴衣として使用しないでください。
- 必要に応じて複数のクッションを組み合わせる使用してください。

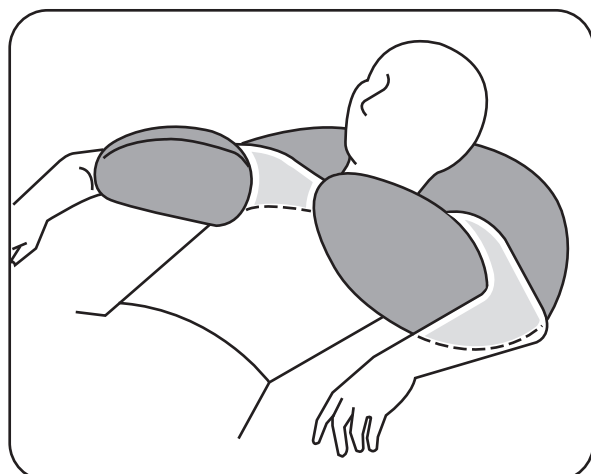

品名	品番	サイズ
バナナフロート	29341003	L
	29341005	M
	29341010	S




- 救命胴衣として使用しないでください。
- 必要に応じて複数のクッションを組み合わせる使用してください。

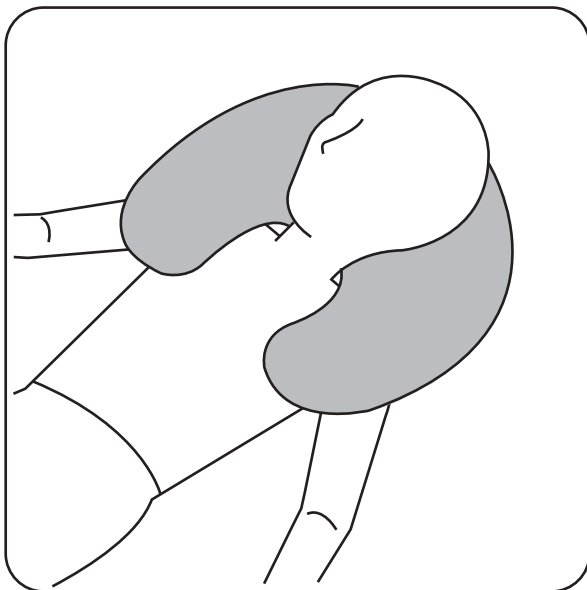

品名	品番	サイズ
ネックフロート	29341012	フリー




- 救命胴衣として使用しないでください。
- 必要に応じて複数のクッションを組み合わせてください。

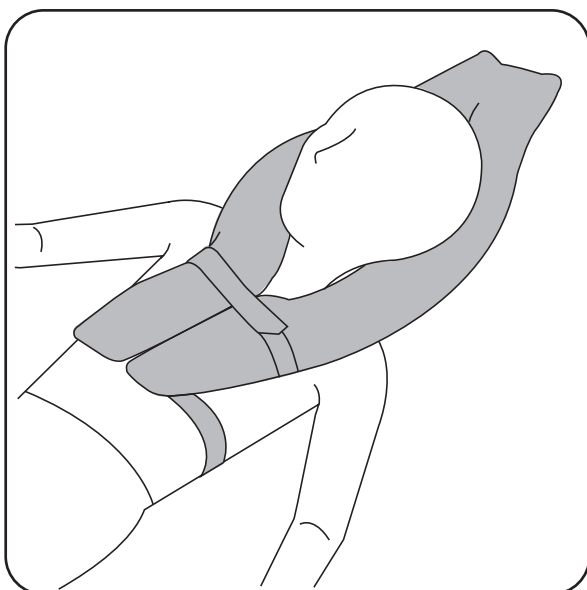


品名	品番	サイズ
カラーフロート	29341007	L
	29341008	M
	29341009	S



- 救命胴衣として使用しないでください。
- 必要に応じて複数のクッションを組み合わせてください。

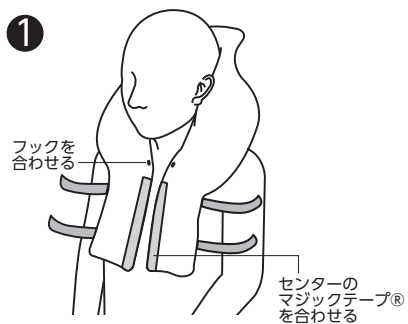

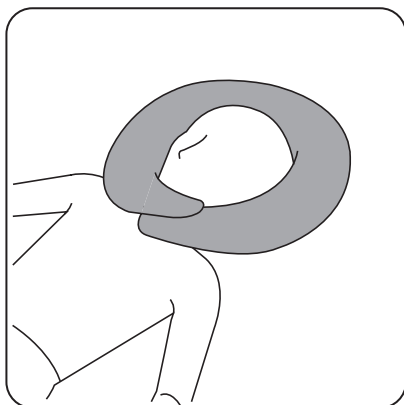


## ネックカラーフロート



品番	サイズ
29341014	L
29341020	S

- 救命胴衣として使用しないでください。
- 必要に応じて複数のクッションを組み合わせてください。

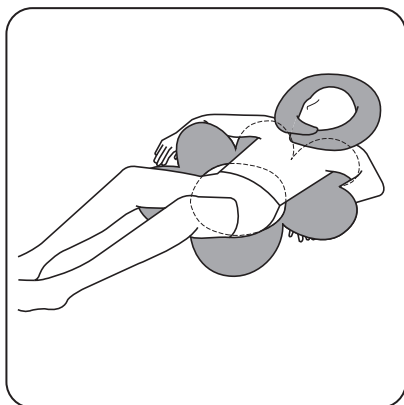


## フラワーフロート



品番	サイズ	寸法
29341017	L	外径80cm (内径28cm)
29341016	S	外径60cm (内径20cm)

- 救命胴衣として使用しないでください。
- 必要に応じて複数のクッションを組み合わせてください。

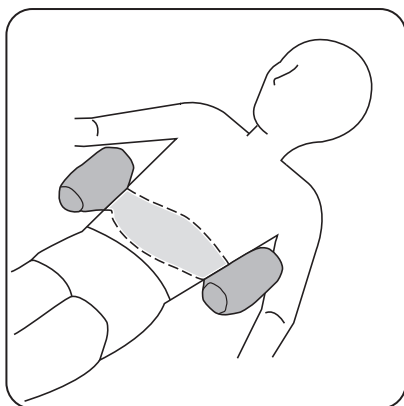

## スタビライザーフロート



品番	サイズ	寸法
29341019	L	長さ88cm 幅 24/29cm
29341018	S	長さ66cm 幅 19/24.5cm

- 救命胴衣として使用しないでください。
- 必要に応じて複数のクッションを組み合わせてください。

# 5. 使用後のお手入れ・取扱方法

## 浸漬保管方法

- ご使用になられた後、プール内で尚且つ遊離残留塩素濃度の条件を満たしている塩素水の中に浮かして保管してください。

## 乾燥保管方法

- 1.クッション内の水分が切れやすいように、台や棚、網を利用した物置などに置いたり掛けたりして乾燥保管してください。

※洗濯バサミを利用して干されますと、クッションに洗濯バサミの型が付いてしまい、場合によっては布地にダメージを与えてしまう事があります。ご利用は控えて頂けますようお願い申し上げます。

※衛生維持の為、クッションの塩素分を水分よりも早く蒸発させない様に、常温常湿の環境で、ゆっくりと乾燥してください。

- 2.クッションを乾かしている間、クッションを揉んだり、裏返ししたりして、クッション内のビーズに空気が通るようにしてください。


- 3.上記手順(2)を繰り返す事で、ゆっくりと乾きます。乾いた後は直射日光が当たらない所で保管してください。

## 長期乾燥保管方法

- 1.衛生維持の為、クッションの塩素分を水分よりも早く蒸発させないために、常温常湿の環境で、ゆっくりと乾燥してください。

- 2.その後直射日光を避けて、高温多湿にならない所で保管してください。

- 3.重い物を上に置かないでください。

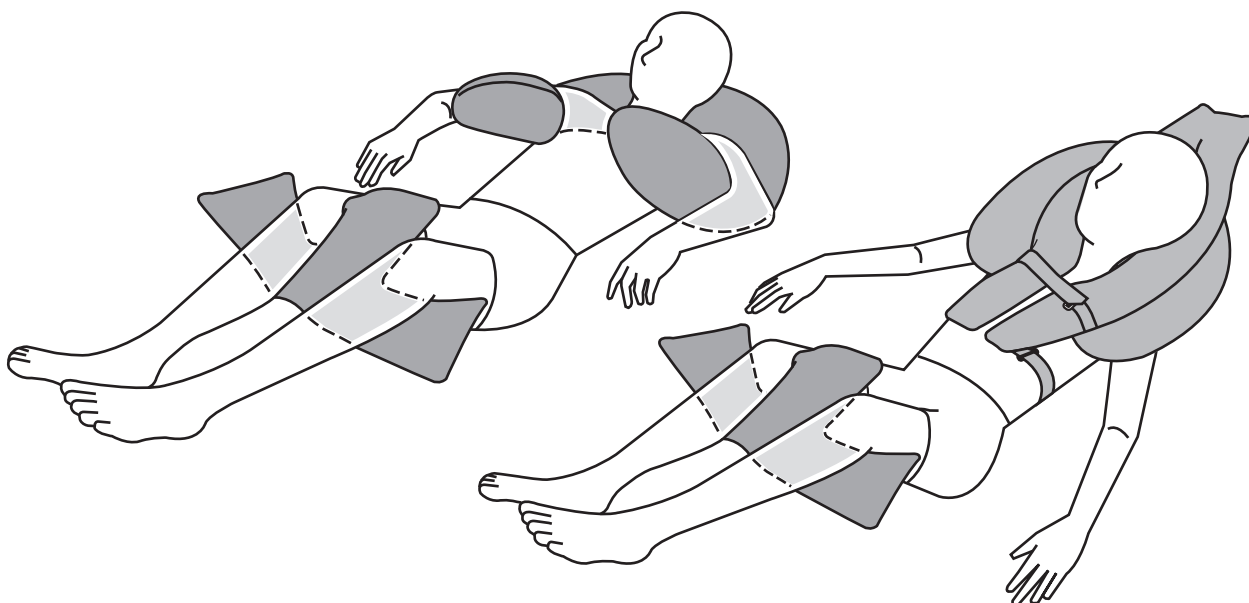

# 6. 入浴時のご利用について

---

在宅における個人様の利用に限定して、入浴時にご利用いただくことを解禁いたしました。以下の点に注意して、ご利用いただきますよう、お願い申し上げます。

## 1. 個人専用としてお使いください

- 基本的には、ご自宅において、ご利用者専用物として、ご利用ください。施設内や他の方との共用はお止めください。

## 2. 使用後は、必ず乾燥させてください

- ご使用后、シャワーなどのきれいな水で汚れを洗い流してください。
- 浴室である程度乾燥させた後、室内もしくは日の当たらない風通しのよいところで、しっかりと乾燥させてください。
- 水気が切れやすいように、台や棚、網などを利用した物置などに置いたり、掛けたりして乾燥させてください。
- クッションを乾かしている間、クッションを揉んだり、裏返しにしたりして、クッション内のビーズに空気が通るようにしてください。
- お客様の保管状態によるカビなどの不具合に関しては、保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

## 3. 入浴時は必ず介助者付き添いのもと、ご使用ください

- 水量にかかわらず、常にご利用者の身体から手を離さないでください。



# 7. 保証書

本製品については裏面記載の「保証規程」により正常な使用状態において、故障が生じた場合に限りお買い上げ日より「2年間」無償で交換致します。

## ラッサル・フロートクッション 保証書

本製品は、当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一、商品開封時に故障、又は不具合がございましたら裏面の保証規程に基づき無料にて交換させていただきます。その際には、現品に本保証書を添えて弊社またはご購入の販売店までご提出ください。

品名	ラッサル・フロートクッション (品番 )				
ご購入年月日	年	月	日	保証期間	購入日より2年
お客さま	お名前				
	ご住所 〒				
	TEL				
販売店	店名				
	住所 〒				
	TEL				

(印)

★商品の性質上、ご使用後の返品・修理はお受け致しかねます。  
あらかじめご了承頂けます様お願い申し上げます。

※本書は再発行致しかねます。大切に保管してください。

※この保証書は、本書及び保証規程に明示した期間・条件の下において無料交換をお約束するもので、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※本製品のご利用中に故障、又は不具合が発生した場合、弊社もしくはご購入の販売店までご連絡ください。

※保証期間が過ぎた後の故障、又は不具合についてご不明な点がございました際には、弊社またはご購入の販売店までお問合せください。

※保証規程は次頁をご覧ください。

**k** パシフィックサプライ株式会社

本社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL 072 (875) 8008

FAX 072 (875) 8010

# 保証規程

## I. 保証規程

- 保証期間中に品質の不完全に基づく故障を生じた場合は、この保証規程により無料で交換致します。
- 保証期間はお買い上げ後2年間です。
- 但し、次の場合は保証期間中でも有料になります。
  - 取り扱い過誤による故障、又は不具合
  - 製品に手を加えた場合の故障、又は不具合
  - 各部の消耗・劣化による故障、又は不具合
  - 天災、地震等の天災による故障、又は不具合
  - ご購入後の輸送や移動、落下による故障、又は不具合
  - 保証書にお買い上げ日の記入や、お名前が無い場合
  - 保証書のご提示がない場合
- 以上の保証は日本国内においてのみ有効です。
- この保証によってお客様の法律上の権限を制限するものではありません。
- 保証対象とならない故障、又は不具合についても弊社の責任に帰す場合は、保証期間に関わらず、無料交換させていただきます。

## II. サービスのご用命

- 保証期間中、万一故障、又は不具合が生じた場合は、弊社もしくはご購入先の販売店まで保証書を添えてお申し出ください。
- 送料につきましては、保証期間内は弊社負担、保証期間外ではお客様のご負担とさせていただきます。

 **パシフィックサプライ株式会社**

〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

<https://www.p-supply.co.jp>

TEL 072-875-8008 FAX 072-875-8010

取扱店

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。