



取扱説明書

あそびかた手引書

この度は、スペースブロックをお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を有効活用いただくための取扱説明書です。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。また、その後はこの取扱説明書を大切に保管し必要に応じて繰り返しお読みください。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告無く変更する場合がございます。

必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書で、ご確認頂きます様にお願いします。

※取扱説明書の著作権は、パンフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可無く取扱説明書の内容のすべて、または一部を複製することをお断りいたします。

スペースブロックとは……………

スペースシリーズは、こどもたちに宇宙を連想させるような、立体空間を駆使した感覚統合訓練機器のラインナップです。

そのスペースシリーズのうちの一つ、3つの星（まるくん・さんかくくん・しかくん）から構成されているスペースブロックは、単体でも様々なあそびが可能です。組み合わせることにより、無限のあそびを創り出す事が可能です。スペースブロックは、無限の可能性を表す宇宙の星を意味しており、この商品に対する想いを表現しています。

もくじ

1. 安全にご使用いただくために……………	P. 3
2. 構成部品と各部の名称……………	P. 4
3. ご使用前の点検・準備……………	P. 5
4. お手入れ方法……………	P. 5
5. 本製品のあそびかた……………	P. 6
6. 保証書……………	P. 14
7. 保証規定……………	P. 15
8. 廃棄方法……………	P. 15
9. 仕様……………	P. 15

1. 安全にご使用いただくために

警告



この表示を無視して誤った取扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- (1) 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。
- (2) 指導者は、使用方法や取扱注意事項等が理解できるまで、ご使用にならないでください。
- (3) 使用前には必ず保守点検（P. 5 ご使用前の点検・準備）を行って下さい。また、保守点検を行っていない場合は使用しないでください。
- (4) 指導者のもとでご使用ください。
- (5) 平らな床の上でご使用ください。またセラピーマット（パシフィックサプライ株式会社総合カタログ参照）の上にて使用してください。
- (6) 戸外では絶対に使用しないでください。
- (7) 階段、縁側などで転落する恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないで下さい。
- (8) 体重75kg以上の方は使用しないでください。
- (9) 二人乗りなど危ない乗り方は絶対にしないでください。
- (10) 踏み台など乗用以外の目的では使用しないでください。
- (11) ファスナーを開閉しないでください。
- (12) 本製品を引きずりながら運ばないでください。製品の外装が破損する恐れがあります。
- (13) 本製品の端に立たないで下さい。転倒する恐れがあります。
- (14) まるくんとしかくんのの上に乗るときは、面ファスナーがしっかりくっついていることを確認した上で乗ってください。また、まるくんとしかくんは片側のみで長手方向に立てた時の上には乗らないでください。不安定で転倒する恐れがあります。
- (15) 分解や改造をしないでください。修理が必要となった場合は必ず販売店へご連絡ください。
- (16) 異常を発見したままで使わないでください。そのまま使うと破損してけがをする恐れがあります。

注意



この表示を無視して誤った取扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- (1) 直射日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブ等）の近くで使用しないでください。熱により変色や変形する恐れがあります。
- (2) ファスナー部分や表面生地は摩擦で火傷や擦り傷を生じる恐れがありますので、着衣でご使用ください。
- (3) まるくんなどブロックの隙間に体の一部が挟まらないようご注意ください。捻挫などを生じる恐れがあります。

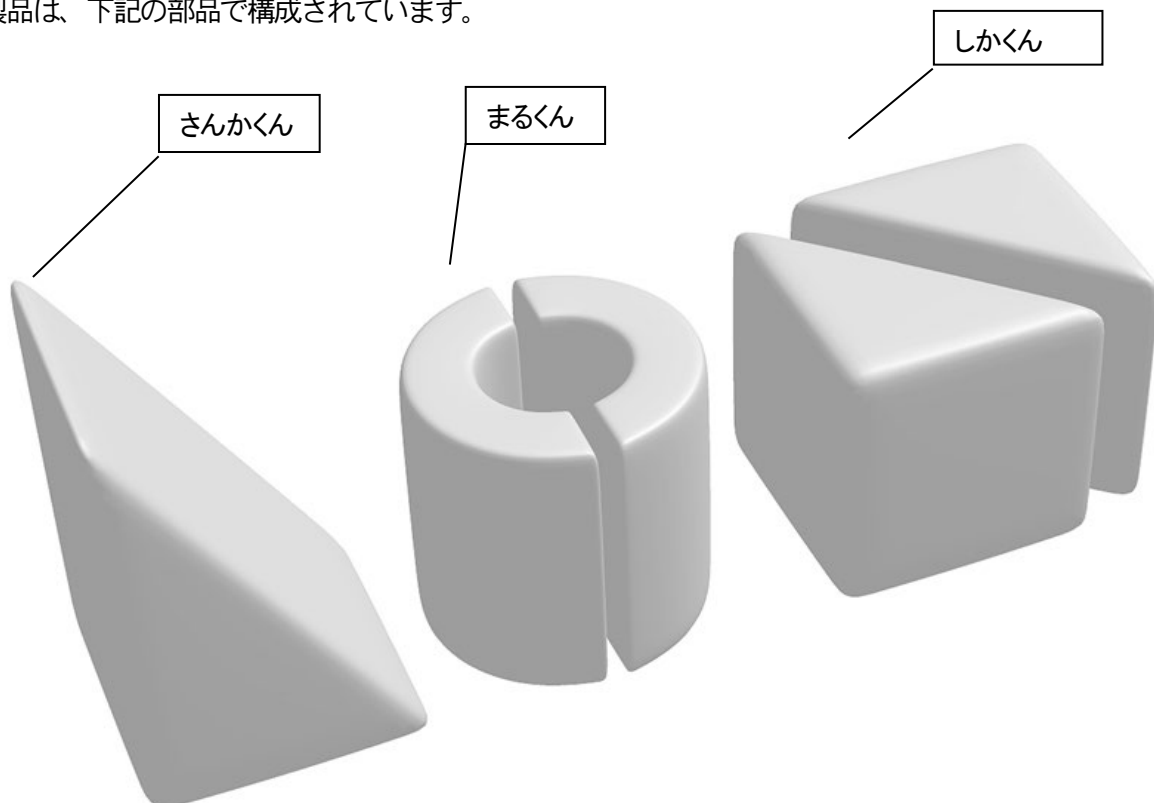
重要なお知らせ

本製品を使う上でのご注意と、本取扱説明書の重要なお知らせです。

- (1) 本書は製品とともに常に手元に保管し、必要に応じてくりかえし読んでください。
- (2) 製品の不断の改良により、詳細において本書の内容と異なる場合があります。不明な事柄については販売店まで問い合わせてください。
- (3) 本製品は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- (4) 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。
- (5) 本書中の図や写真は一部を省略したり抽象化した表現になっているものがあります。
- (6) 本書を紛失または損傷した場合は速やかに販売店までご連絡ください。
- (7) 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁記載漏れなどに気付いた場合は販売店までご連絡ください。
- (8) 本書の全部または一部を無断で転載複製することを禁止します。

2. 構成部品と各部の名称

本製品は、下記の部品で構成されています。



3. ご使用前の点検・準備

注意



本製品に破損や異常がないか、ご使用前に必ず各部を点検して下さい。異常状態のまま、絶対に使用しないでください。

[ご使用前に必ず次の点検を行ってください。]

チェック

- (1) 縫製部分のほつれはないか.....
- (2) 面ファスナーの接着不良はないか.....
- (3) 各部にひび割れや欠け、変形等はないか.....
- (4) その他の異常はないか.....

万一破損や異常が発生した場合はそのまま使用せず、必ず販売店にご連絡ください。
異常状態のまま、絶対に使用しないでください。

4. お手入れ方法

注意



誤ったお手入れをしますと破損の原因になります。
異常を発見された場合はそのまま使用せず、販売店までご相談ください。

- (1) 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布で、から拭きしてください。
- (2) 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、硬くしぼった布で洗剤が残らないように拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- (3) シンナーやアルコール系の溶剤は、絶対に使用しないでください。


5. 本製品のおそびかた

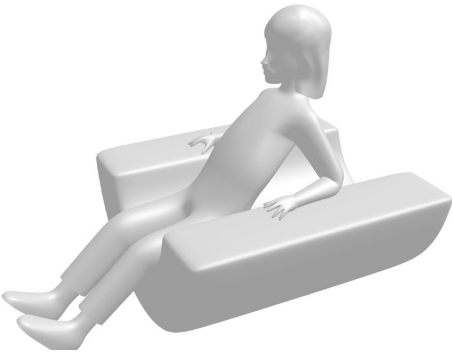
各ブロックのおそびかたを図示しています。ご参照ください。

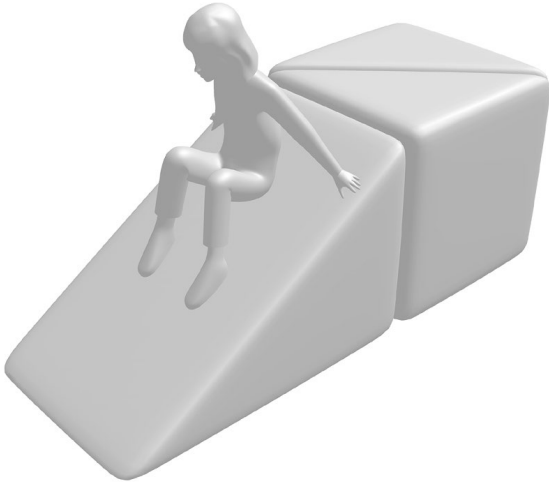
なお、本書に記載していますのは、おそびかたの一例です。導入にあたっては、お子さまに応じて、適正な課題であるかどうか（評価）、課題の調整について必要あるかどうか（適応反応）、お子さま自身で課題に取り組むかどうか（能動性）をご確認いただきご使用ください。

またブロックは組み合わせによって様々なおそび、形に変化します。新規性や多様性など、お子さまや援助される方の柔軟性や創造性を生かして新しいおそびも発見してください。

名称	
ももたろう	
あそび方	必要なもの
	スペースブロック まるくん 一式
まるくんのなかに体をいれて、面ファスナーでしっかり固定します。中から力を入れてまるくんを割って飛び出します。	
このあそびにはこんな意味があります 小さなスペースに閉じこもり、全身に圧迫することによる固有受容覚の入力、割って出ることによって筋トーンを高める運動企画の発達を促します。	
応用工夫など 面ファスナーの力は、しっかり接合部を押さえることで力が大きくなります。簡単に割れるようになれば、接合力をアップして接合力を強め、強度を上げるのはいかがでしょうか。	

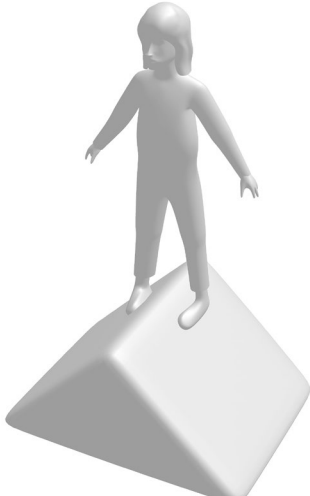
名称 ロープでジャンプ	
あそび方  <p>スイングロープを使って、立てたブロックに飛び乗ります。またロープをたどり次のブロックへわたります。</p>	必要なもの <ul style="list-style-type: none"> ・スペースブロック まるくん 一式 (あるいははしかくんやさんかくんでも可) ・スイングサポートフレーム 一式 (別売品) ・スイングロープ (別売品)
このあそびにはこんな意味があります 重力と動きといった前庭覚の入力を行うことで、運動企画の発達を促します。またロープを使うことにより、身体の両側協応、目と手の協調の発達も促します。	
応用工夫など ブロックをたくさん並べてコースを作れば、室内アスレチックの完成です。	

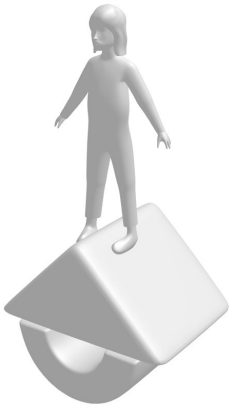
名称 ゆらゆらおふね	
あそび方  <p>まるくんを半分にわけて、横に寝かし、ふねのようにゆらゆら動かしバランスをとります。</p>	必要なもの スペースブロック まるくん 半分
このあそびにはこんな意味があります 重力と動きといった前庭覚の入力を行うことで、姿勢・バランス・重力に対する安心感の発達を促します。	
応用工夫など 座る位置は様々。向きを変えて座りいろんな位置に挑戦しましょう。	

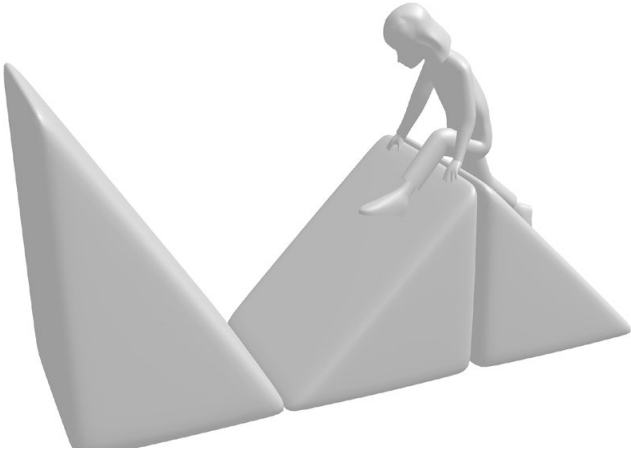
名称 すべり台	
あそび方	必要なもの スペースブロック しかくん一式 さんかくん
	
しかくんとさんかくんを組み合わせ、緩やかなすべり台を設置し、斜辺をすべります。	
このあそびにはこんな意味があります 重力と動きといった前庭覚の入力を行うことで、運動企画の発達を促します。	
応用工夫など ロープと組み合わせることで、更にスリルのある展開が可能です。	

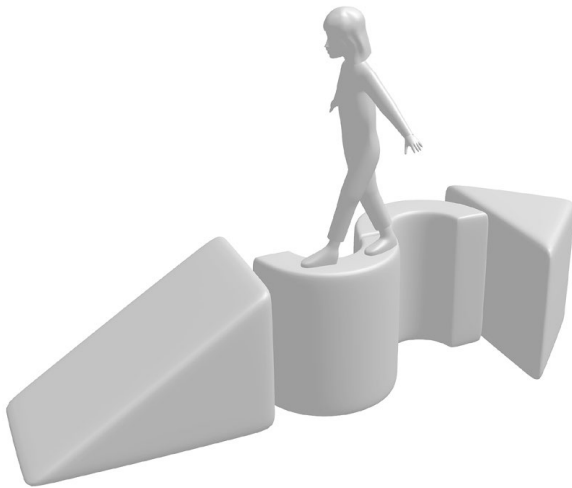
名称 のぼり台	
あそび方	必要なもの スペースブロック しかくん一式 さんかくん (あればスイングサポートフレーム・ロープ)
	
すべり台の逆で、斜辺の急な部分を乗り越えます。	
このあそびにはこんな意味があります 重力と動きといった前庭覚の入力を行うことで、姿勢・バランスなど運動企画の発達を促します。	
応用工夫など ロープを使用すれば、のぼる際の補助になります。	
※さんかくんの支えとして、しかくんなどのブロックを置いてください。	


<p>名称 おうま</p>	
<p>あそび方</p> 	<p>必要なもの</p> <p>スペースブロック しかくん 半分</p>
<p>しかくんを二つに割り、面の広い部分を下に置き、上に座ってバランスをとります。</p>	
<p>このあそびにはこんな意味があります 不安定な場所に座ることでバランス・身体の両側協応の発達を促します</p>	
<p>応用工夫など 特になし。</p>	


<p>名称 バランス（初級）</p>	
<p>あそび方</p> 	<p>必要なもの</p> <p>スペースブロック しかくん 半分</p>
<p>しかくん半分を側面が底になるように置き、やまの上に立ち上がります。足がひろがりやすく、立ち上がる事が難しくなっています。</p>	
<p>このあそびにはこんな意味があります 重力と動きといった前庭覚の入力をする事で、運動企画の発達を促します。</p>	
<p>応用工夫など 特になし。</p>	

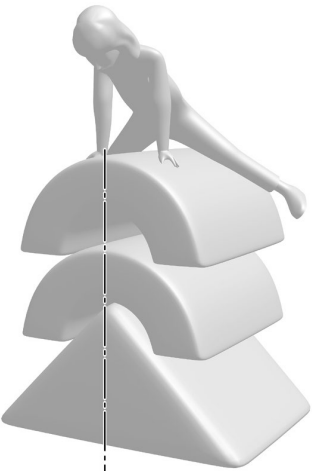
名称 バランス（上級）	
あそび方  <p>まるくん半分を置いた上に、しかくん半分の側面が底になるように置き、やまの上に立ち上がります。足がひろがりやすく、立ち上がる事が難しい事に加えて、まるくんの円運動が加わり、さらに難しくなっています。</p>	必要なもの スペースブロック しかくん 半分 まるくん 半分 ※バランスが取りにくいので、指導者が補助してください。
このあそびにはこんな意味があります 重力と動きといった前庭覚の入力をする事で、運動企画の発達を促します。	
応用工夫など バランス（初級）よりも難易度が格段に高いです。安全面に十分ご注意ください。	

名称 アスレチック 1	
あそび方  <p>さんかくんやしかくんを並べて、乗り越えるコースを作り、アスレチック風に乗り越えていきます。</p>	必要なもの スペースブロック しかくん一式 さんかくん
このあそびにはこんな意味があります 重力と動きといった前庭覚の入力をする事で、運動企画の発達を促します。	
応用工夫など 特になし。	

名称 アスレチック 2	
あそび方  さんかくん、まるくん、しかくんを並べて、乗り越えるコースを作り、アスレチック風に乗り越えていきます。	必要なもの スペースブロック しかくん 半分 さんかくん まるくん
※まるくん同士は片面だけでも面ファスナーで固定してください。	
このあそびにはこんな意味があります 重力と動きといった前庭覚の入力を行うことで、運動企画の発達を促します。	
応用工夫など 安全面に注意して、自由な発想で行ってみてください。	

名称 アスレチック 2+大玉ころがし	
あそび方  さんかくん、まるくん、しかくんを並べて、乗り越えるコースを作り、大きなトレーニングバレーンをコースに沿って転がします。	必要なもの スペースブロック しかくん 半分 さんかくん まるくん
※落下した際の対策など、十分ご注意ください。	
このあそびにはこんな意味があります 重力と動きといった前庭覚の入力を行うことで、姿勢・バランスなど運動企画の発達を促します。	
応用工夫など アスレチック 2 が出来れば挑戦してみてください。	

<p>名称 跳び箱（初級）</p>	
<p>あそび方</p>  <p>しかくん半分を置いた上に、まるくん半分を重ねておいて、跳び箱のように使います。</p>	<p>必要なもの</p> <p>スペースブロック しかくん 半分 まるくん 半分</p> <p>※まるくんとしかくんはまっすぐ重ねて設置してください。中心軸がずれると倒れやすくなります。</p>
<p>このあそびにはこんな意味があります 重力と動きといった前庭覚の入力を行うことで、姿勢・バランスなどの運動企画の発達を促します。</p>	
<p>応用工夫など 初めはまるくん、しかくん単体でも挑戦してみてください。</p>	

<p>名称 跳び箱（上級）</p>	
<p>あそび方</p>  <p>しかくん半分の置いた上に、まるくん半分を2つ、重ねておいて、跳び箱のように使います。</p>	<p>必要なもの</p> <p>スペースブロック しかくん 半分 まるくん</p> <p>※跳び箱（初級）が出来たら挑戦してください。まるくんとしかくんはまっすぐ重ねて設置してください。中心軸がずれると倒れやすくなります。 ※不安定な姿勢になります。落下した際の対策など、十分ご注意ください。</p>
<p>このあそびにはこんな意味があります 重力と動きといった前庭覚の入力を行うことで、バランス・姿勢など運動企画の発達を促します。</p>	
<p>応用工夫など 周囲の安全にもご注意ください。</p>	

名称 丸太わたり	
あそび方	必要なもの スペースブロック まるくん 半分
	
まるくん半分の置いた上をバランスを取りながら通り抜けます。	
このあそびにはこんな意味があります 重力と動きといった前庭覚の入力を行うことで、運動企画の発達を促します。	
応用工夫など まるくんをもうひとつ加えると、ながい丸太わたりになります。	

6. 保証書

保証書

本製品は品質管理・検査のもとに皆様にお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規定に基づき無料修理いたします。その際は販売店までご連絡下さい。その際、本書が必要になりますので大切に保管してください。

品名	
ご購入年月日	
お客様名	
ご住所	
電話番号	
販売店名	

- (1) ご購入年月日、販売店の欄に記入のない場合は無効となります。必ず記入の有無をご確認下さい。ご記入の無い場合は直ちに販売店にお申し出てください。
- (2) 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- (3) この保証書は、本書および保証規定に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- (4) 保証期間が過ぎた後の修理などについてご不明の場合は、販売店までお問い合わせください。

保証規定

- (1) 保証期間はご購入の日から1年間です。保証期間内に発生した故障につきましては無料修理いたします。
- (2) 保証の対象となる部分はこの製品一式です。ただし、本製品を設置した建物への影響や、面ファスナー・張地の劣化による故障・損傷や鋭利なものによる破損、裂傷は除きます。
- (3) 無料修理には保証書の提出を要します。
- (4) 次の場合には保証できませんが、特にご要望の方には実費にて修理致します。その際、出張・配送費用を頂く場合があります。
 - ① 保証書を紛失された場合。
 - ② 誤ったご使用方法による故障・損傷。
 - ③ 火災、地震等の天災地変による故障・損傷。
 - ④ 保証書にご購入年月日、お客様名の記入の無い場合、または不当変更を加えられた場合。
 - ⑤ ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷。
- (5) ご相談窓口は販売店にて承ります。
- (6) 転居・引越しをされる場合には新しいご住所と電話番号を販売店までご連絡ください。
- (7) その他
 - ① 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ② 本書の再発行は致しません。
 - ③ 他人への譲渡を行った場合は無効となります。

8. 廃棄方法

・各自治体の規則に従ってください。

9. 仕様

・本製品の仕様は下記の通りです。

	仕様	
本体	外形寸法	まるくん : 直径約800×800mm さんかくん : 約1300×800×800mm しかくん : 約800×800×800mm
	重量	まるくん : 約14kg さんかくん : 約12kg しかくん : 約18kg
	材質	表面生地 : 塩化ビニール 内部 : 発泡スチレン、スポンジ

●販売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

本 社

〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1
TEL 072(875)8008 FAX 072(875)8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2022.04 改訂