

【1】テレスコピックスロープ

★193cmタイプ


★282cmタイプ

- アルミの一体成型で強度が高い
- 伸縮の長さ調整は無段階
- 最短状態でのロック機構あり
- 本体パンチング加工により軽量化
(従来品から20~25%)
- 折り畳み式ハンドル

品名	使用時(cm)	対応する段差高 (cm)	耐荷重(kg)
193cm	87~193	14~47	300
282cm	116~282	17~56	250



【2-1】テレスコピックスロープの使い方

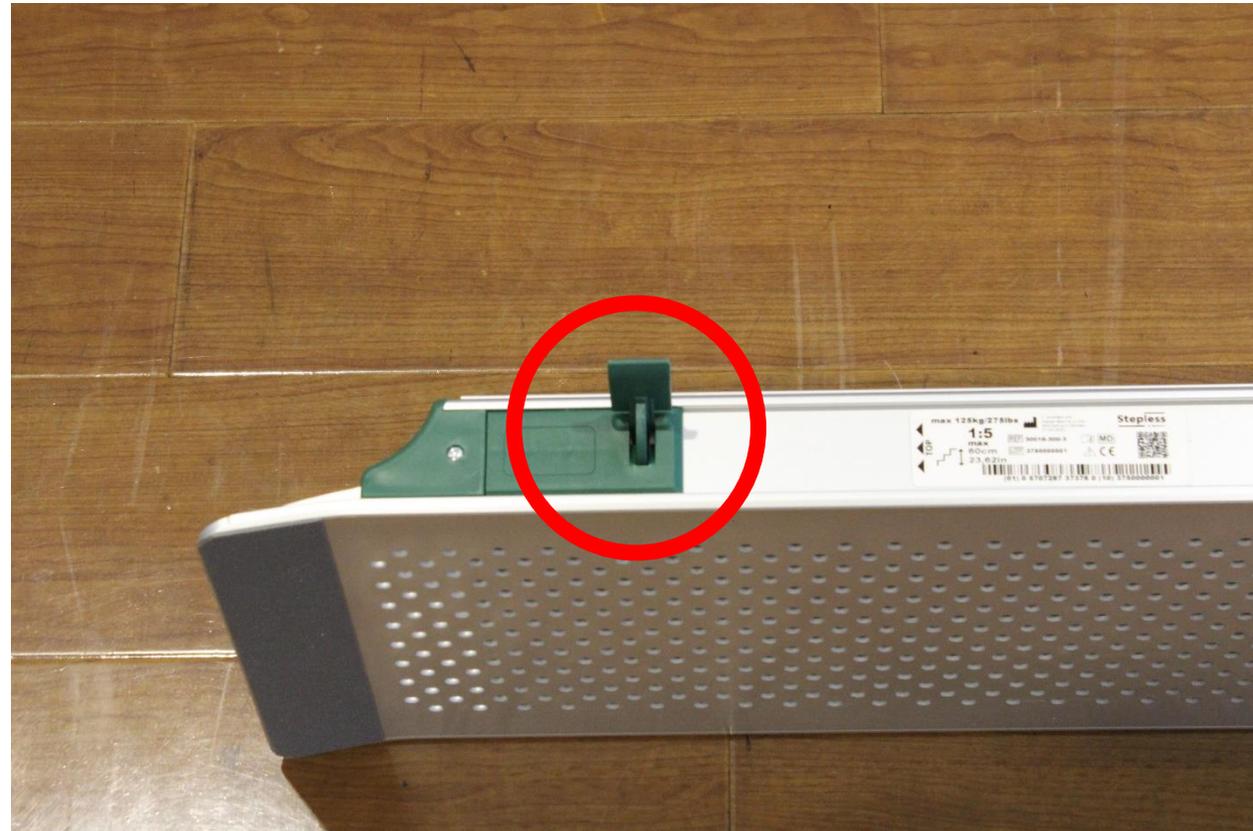


- スライド防止ロックを外して、スロープを希望する長さへ伸ばします。

【2-2】テレスコピックスロープの使い方



- スライド防止ロックを外したスロープは傾けると伸びていきます。
- 上端側をしっかりと段差にかけてください。(裏側滑り止め部分をかける)
- 車いすの前輪、後輪の幅に合わせて2本のスロープを設置します。

【2-3】テレスコピックスロープの使い方

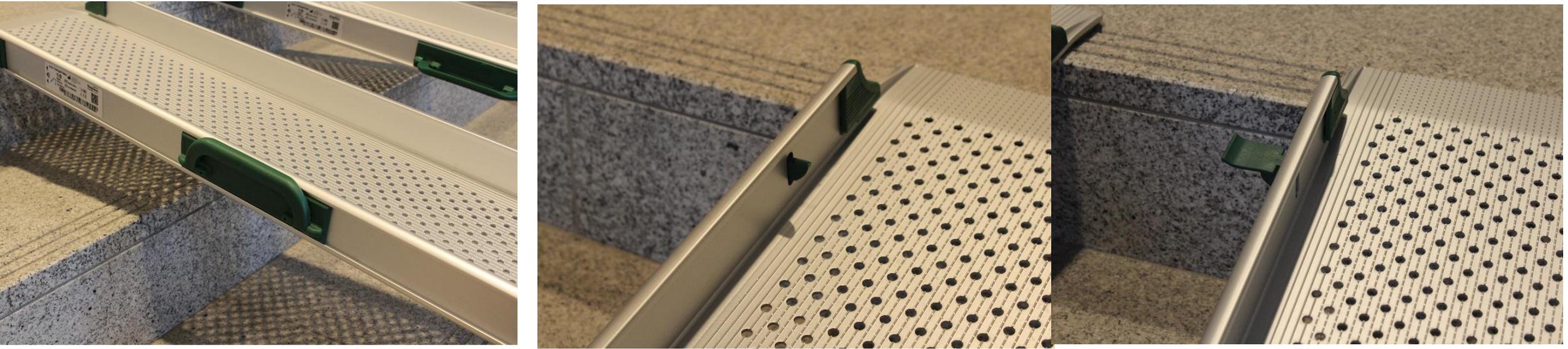

- ハンドルは折りたたみます。
- スロープを伸ばした際に、スライド防止ロックを閉めると先端が内側に飛び出ます。

【2-4】テレスコピックスロープの使い方



- スロープの耐荷重は250kg～300kgです。
- 車いす、車いす搭乗者、付属品（吸引器、呼吸器等）の合計重量が耐荷重を上回らないようにしてください。
- 3輪車には使用できません。