

足底装具

# ORTOP®

オルトトップ

# ウエッジR

## 取扱説明書

この度は、オルトトップウエッジRをお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

本取扱説明書は、オルトトップウエッジRの機能を十分に活かす装着方法や、安全にご使用いただくための注意事項などを記載しています。


ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みの上、

安全に正しくご使用いただくようお願い

いたします。その後は本取扱説明書を

大切に保管し必要に応じて

繰り返しお読みください。

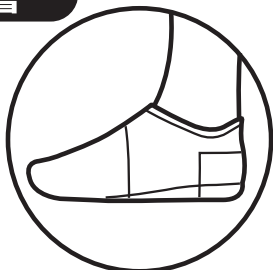

※このイラストは  
ひだり用です。



**注意**

この製品は多くの方に装着していただけるよう、形状などを考慮して設計しています。所定の手順で装着しても適合がよくない場合や、装着による痛みが生じた場合は、直ちにご使用を止め、医師にご相談ください。

**K. Pacific Supply**

製品に関するお問い合わせは最終ページをご参照ください。

転載複写厳禁

著作権について

取扱説明書の著作権は、パシフィックサプライ株式会社帰属しており、許可なく取扱説明書の内容の全て、または一部を複製することはお断り致します。

# 1. 安全上のご注意

この取扱説明書には、安全にお使いいただくため次のような表示をしています。表示内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



この表示の注意事項を守らないと、人が重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 装着は医師及び義肢装具士の指示に従い、正しく装着してください。
- 使用目的以外のご使用はしないでください。
- 装着部に傷・痛み・しびれ・はれもの・湿疹・発赤やかぶれなどの不具合が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
- アレルギー体質の方や皮膚が敏感な状態にある場合、あるいは装着部位に傷・痛み・しびれ・はれもの・湿疹・発赤やかぶれなどの異常がある場合は異常の発生や症状の悪化を防ぐ為、医師及び義肢装具士にご相談ください。



この表示の注意事項を守らないと、人がけがをしたり、物的損害のおそれがある内容を示しています

- 本品のホルダーは色落ちや他の生地の色移りする可能性があります。

## 重要な お知らせ


本製品をご使用いただく上でのご注意と、本取扱説明書の重要なお知らせです。

- 本書は本品とともに常に手元に保管し、必要に応じて繰り返し読んでください。
- 本品の不断の改良により、詳細において本書と内容の異なる場合があります。不明点は販売店までお問い合わせください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全を保証できません。
- 本書の図や写真は一部を省略したり抽象化した表現になっているものがあります。
- 本書を紛失または損傷した場合は速やかに販売店までご連絡ください。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り・乱丁・落丁・記載漏れなどに気付いた場合は販売店までご連絡ください。
- 本品は改良の為、色や形状などを予告なしに変更する場合があります。
- 本品は必ず靴下の上から装着し、直接肌には当てないでください。

## 取扱説明書の使用について

取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更する場合がございます。必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きますようお願いいたします。

## 2. 各部の名称

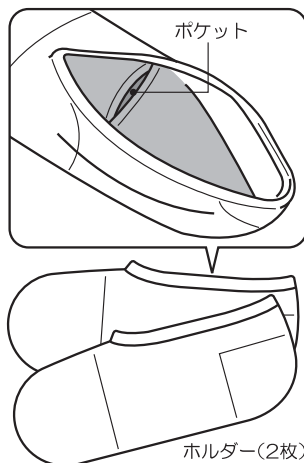


## 3. 製品の特徴

### シリコン本体の特徴

- シリコンを使用しています。
- 表側(足裏が当たる側)のアーチ部(土踏ます)に「みぎ(又はひだり)」と表示してわかりやすくしています。
- 裏側(床に当たる側)のかかと部にサイズ表示をしています

### ホルダーの特徴

- 綿100%の糸を使用しています。
- 絹のような光沢感を持たせています。
- 通常の靴下の感覚で装着できます。
- 左右兼用ですので、みぎ・ひだりどちらにも使用できます。
- 薄くて伸縮性がありますので、重ねて靴下を履いても目立ちません。
- ホールド感を向上させる為に中央部は締め付けの強い編み方をしています。
- 抗菌防臭加工をしています。  
(つま先・かかと・内ポケット部分)  
〈SEKマーク取得済み〉

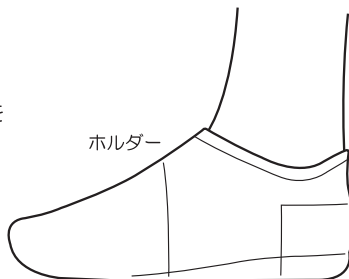


## 4. 装着手順

※本品には左右があります。図は左用で明記しておりますので、右用の場合は左右が逆になります。

### ホルダーにシリコン本体を挿入する


①ホルダーを裏返しにする。

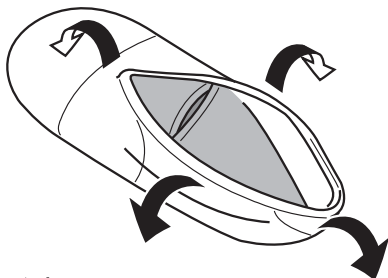

<注意>

履き口を引っ張りすぎると履き口が伸びきってしまうので、引っ張りすぎないようにご注意ください。


②ポケットのかかと側を裏返しにする。

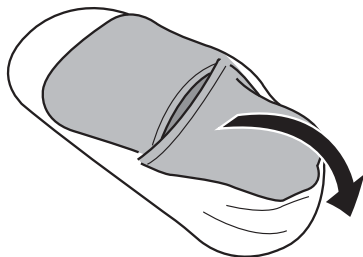

<注意>

ポケットを引っ張りすぎると縫製部がほつれたり、切れたりしてしまうので、引っ張りすぎないようにご注意ください。

③シリコン本体をかかと側から足先に向かって差し込む。

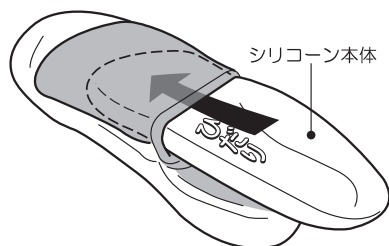

<注意>

シリコン本体とホルダーが滑りにくいので、多少入れにくいですが、奥まで差し込んでください。奥まで差し込んでいないとかかと側のポケットが入れにくくなります。



④かかと側のポケットをもとに戻す。



<注意>

ポケットを引っ張りすぎると縫製部がほつれたり、切れたりしますので、引っ張りすぎないようにご注意ください。シリコン本体は柔軟性があるので、曲げるようにしてポケットをかかと側にかぶせてください。

## ⑤ホルダーをもとに戻す。

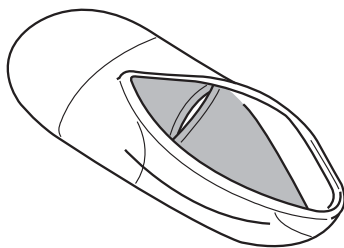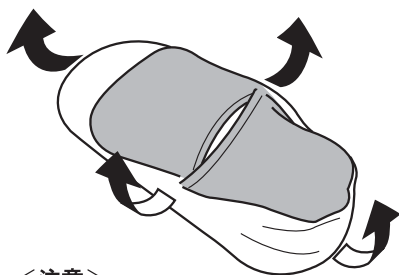

### <注意>

※履き口を引っ張りすぎると縫製部がほつれたり、切れたりしてしまうので、引っ張りすぎないようにご注意ください。

※シリコン本体は柔軟性があるので、本体を曲げるようにしてホルダーをかぶせてください。


※シリコン本体を取り出す際は、「4.装着手順」の逆の手順にて行ってください。

※シリコン本体のフチを強く引っ張るとちぎれる可能性がありますので、ご注意ください。

### ⚠ 警告

裏表・前後・左右が間違った方向でセットされていないか確認してください。

ポケットの口を開くと本体のシリコンが見えるので、ひだりとなっていることを確認してください。

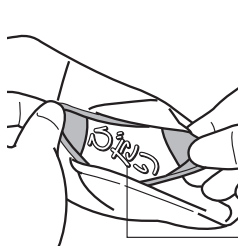


※左図はひだり用の悪いセットの例です。




※本品には左右があります。図は**左用**で明記しておりますので、右用の場合は左右が逆になります。

## 足底装具を装着する

- ①足に装着する準備をします。 ②くつ下を履くように足先を入れてください。


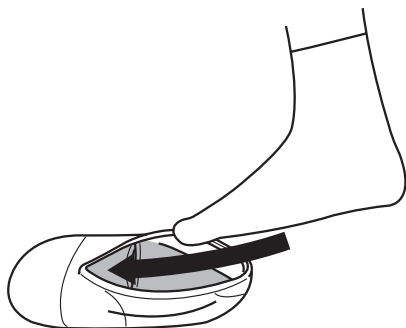


ホルダーにシリコン本体が正しくセットできれば、次は足に装着します。

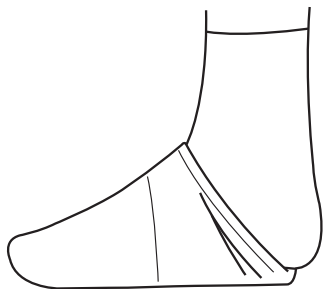

奥までしっかりと履き込んでください。

- ③かかと部を引っ掛けるように履いてください。 ④シリコン本体がずれていないか確認してください。

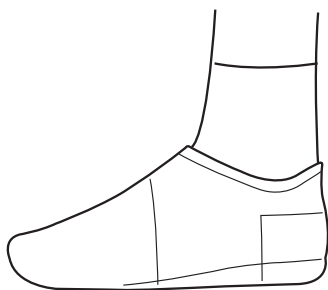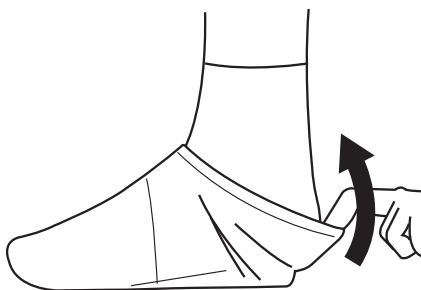

### <注意>

※足先を奥までしっかりと履き込んでからかかと部を引っ掛けるように履かないとホルダーの履き口の縫製部がほつれることがあります。  
履き口を引っ張り過ぎないようにご注意ください。

## 5. 日常のお手入れ方法

---

### ＜ホルダー＞

- ①日常の洗濯の際は水と中性洗剤で押し洗いし、陰干ししてください。
- ②本品のホルダーは色落ちや色移りする可能性がありますので単体で洗濯してください。
- ③製品をいためる原因となりますので、乾燥機での乾燥、ドライクリーニングは絶対に行わないでください。
- ④アイロン・塩素系洗剤(漂白剤)・酵素系洗剤・柔軟剤は使用しないでください。

### ＜シリコーン本体＞

- ①薄めた中性洗剤を染み込ませた布などで汚れを拭き取り、乾いた柔らかい布で水分を取り除いてください。
- ②製品を劣化させる原因となりますので、シンナーやアルコール系の溶剤は、絶対 사용하지しないでください。

## 6. 保管方法

---

### ＜ホルダー＞

- 常温の範囲で水分や直射日光等を避け日陰で保管してください。

### ＜シリコーン本体＞

- 常温の範囲で保管してください。長時間高温の場所に放置しますと、変色や変形をする恐れがあります。変形した製品は使用しないでください。
- 水分や直射日光等を避け日陰で保管してください。

### ＜取扱説明書＞

- 本書は保管し、紛失しないようにしてください。紛失または破損した場合は速やかに販売店までご連絡ください。

## 7. 廃棄方法

---

各地方自治体の指示に従い廃棄処分してください。

## 8. 仕様

---

	主材料	色	サイズ
シリコーン本体	シリコーン	ブルー	S・M・L(左右あり)
ホルダー	綿100%(本体) ナイロン100%(フチ縫い)	グレー ベージュ	S・M・L(左右兼用)

●発売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

本社営業部 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1  
TEL 072(875)8008 FAX 072(875)8010

<http://www.p-supply.co.jp/>

●販売店