

ブルー2FT

AbleNet®

取扱説明書

この度は「ブルー2FT」を購入いただきまして誠にありがとうございます。本製品の機能を生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解ください。その後、大切に保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。



k パシフィックサプライ株式会社

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合があります。

※必ずご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認ください。

転載複製厳禁

「ブルー2FT」の特徴

「ブルー2FT」とは…

●Bluetooth®スイッチインターフェイス

タブレット、スマホ、パソコンなど（以下、デバイス）にBluetooth®を介して接続します。本機のスイッチ、あるいは外部スイッチ（別売）を使用し、接続側のスイッチ制御ソフトウェアを介して、デバイスの操作ができます。

もくじ



1. 安全にご使用いただくために	3~4
2. 各部の名称・仕様	5~6
3. 初期設定	7~13
4. お手入れ・保管・廃棄方法	13
5. 保証書	14
6. 修理	15

1. 安全にご使用いただくために

本製品を活用し、安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は必ず保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

1-1 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

1-2 警告に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品の使用により傷害を生じる可能性があります。使用中に身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
- 修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行わないでください。
- 使用中に異音や異臭、機器からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 使用する方または支援する方は本製品の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

1-3 注意に関する事項




この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 本製品は精密な電子部品が組み込まれております。以下のような場所で本製品を使用又は保管した場合、動作不良や故障の原因となりますので絶対に避けてください。
 - (1)直射日光の当たる場所、高温多湿な場所、ほこり・ちりの多い場所
 - (2)冷暖房機・加湿器のそば
 - (3)水に濡れやすい場所
 - (4)振動のある場所
- 濡れた手で本製品に触れないでください。故障及び感電の恐れがあります。
- 本製品本体に唾液、水、粉塵、ごみ等がかからないようにしてください。動作不良や故障の原因となります。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- ベンジン、シンナー、アルコール等で拭かないでください。材質の変色や変形の原因となります。
- 直射日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具(ストーブなど)の近くで使用しないでください。熱により変形を起こす原因となります。
- 酸素やオゾン等、腐食性ガスの発生する場所でのご使用はお止めください。
- 本製品の内容については改良の為予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までご連絡ください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません、またその際発生した損傷、利益損失に関しては弊社では責任を負うことはできませんのでご了承ください。
- 本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品と異なっている場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。
- ケーブルを曲げたり、引っばったり、強い力を加えないでください。断線する恐れがあります。

2.各部の名称・仕様

2-1 構成部品と各部の名称

「ブルー2FT」は次の部品で構成されています。
付属品に不足はないかご確認ください。

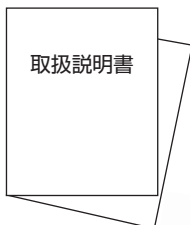


取扱説明書 /
保証書 (本書)


USB Cケーブル



ブルー2FT

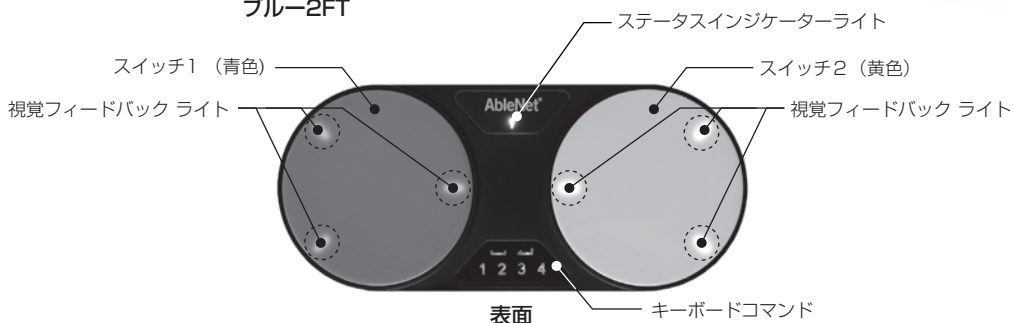

表面

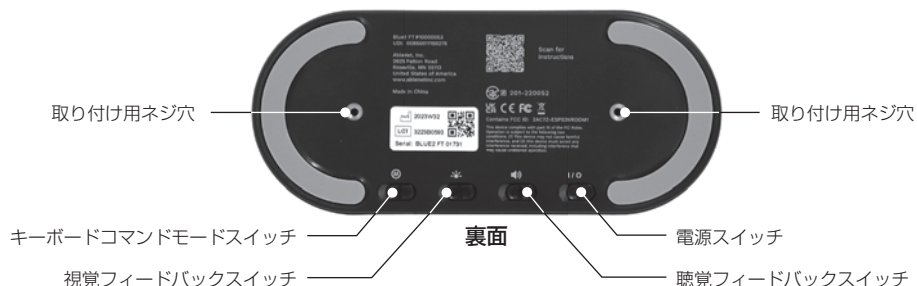


裏面



側面

USB-C 充電ジャック

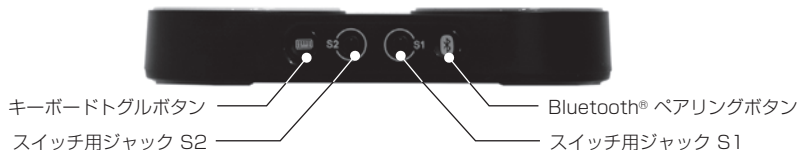

2-2 製品仕様

名称	仕様	
ブルー2FT	本体サイズ	高さ26×幅160×奥行70(mm)
	重量	160g
	電源	充電式
	付属	USB-Cケーブル (USB-AオスーUSB-Cオス)
	対応OS	iPad®OS 16、iOS® 16、mac®OS Ventura、 Android® OS 5以降、Chrome® OS、Windows® OS 11
	取付用ネジ穴	インチネジ6-32 深さ約6 mm



キーボードコマンド



シリアル番号 (本体裏面)

3. 初期設定

3-1 ご使用前に

セットアップ（デバイスとの接続）

1. ブルー2 FTと接続するデバイスの電源をオンにし、Bluetooth®をオンにします。
2. ブルー2 FTの電源をオンにすると、ステータスインジケータライトが青色に点滅しペアリングモードになります。ペアリングモードは約1分で終了します。ペアリングモードを再開するには、スイッチ1またはスイッチ2をタッチします。
3. デバイスのBluetooth®設定で、BLUE2 FT XXXXX を選択します（Xはブルー2FTのシリアル番号を示します）。
4. ステータスインジケータライトが青色に点灯（約3秒）すればペアリングは完了です。



ステータスインジケータライト



シリアル番号（本体裏面）

初めてブルー2 FTを使用するとき、スイッチは以下のように設定されています。

- ・スイッチ1（青色）は、キーボードコマンドのSpace
- ・スイッチ2（黄色）は、キーボードコマンドのEnter



キーボードコマンド

メモ帳など文字を入力できるアプリを開き、スイッチ1または2を入力してください。上記のキーボードコマンドが出力されていればセットアップ完了です。（キーボードコマンドを変更する方法は10ページに掲載しています）

ブルー2FTを新しいデバイスに接続する場合

ブルー2FTは1度に1台のデバイスのみとペアリングできます。デバイスとペアリングされている状態から、新しいデバイスとペアリングする方法は、次の3通り (A、B、C) あります。

- A. ペアリングしていたデバイスのBluetooth®をオフにします。
ブルー2FTのステータスインジケーターが青色で点滅しペアリングモードになるので、新しく接続するデバイスでBluetooth®をオンにしてペアリングを行います。
- B. ペアリングしているデバイスからブルー2FTのペアリング情報を削除します。
ブルー2FTのステータスインジケーターが青色で点滅しペアリングモードになるので、新しく接続するデバイスでBluetooth®をオンにしてペアリングを行います。
- C. 本体側面のBluetooth®ペアリングボタンをステータスインジケーターライトが青色に点滅するまで約10秒間長押しします。
新しく接続するデバイスでBluetooth®をオンにしてペアリングを行います。

ペアリングモードは約1分で終了します。

ペアリングモードを再開するにはスイッチ1またはスイッチ2をタッチします。

BとCの方法でペアリング先を変更した場合、再び元のデバイスとペアリングをするには、新たにペアリング設定を行う必要があります。また、Cの方法を行った場合、デバイスに以前のペアリング情報が残っていると新しくペアリングが行えないため、古いペアリング情報を削除する必要があります。

3-2 スイッチの利用

視覚フィードバックと聴覚フィードバック

初期設定では、ブルー2FTのスイッチを押すと、視覚と聴覚のフィードバックがあります。視覚と聴覚フィードバックは、それぞれ本体裏面のスイッチでオン/オフが切り替えられます。オンにするとスイッチの背面が緑色になり、オフにすると赤色になります。



本体裏面

デバイスのスイッチ設定

デバイスをブルー2FTで操作するためには、デバイスとブルー2FTをペアリングした後、デバイス側でスイッチ設定を行う必要があります。

<iOS® / iPad®OS / mac®OSの場合> スイッチコントロール

【設定>アクセシビリティ>スイッチコントロール】で、スイッチの設定を行ってからスイッチコントロールをオンにします。

設定の詳細については、以下のサイトをご確認ください。

Apple® Support (iOS®/iPad®OS) URL : <https://x.gd/ORfp8> (短縮URL)

mac®OSユーザーガイドURL : <https://x.gd/cjIOF> (短縮URL)

上記の設定によりブルー2FTでスイッチコントロールを利用することが可能になります。



Apple® Support (iOS®/iPad®OS)



mac®OSユーザーガイド

スイッチコントロールの設定において、ブルー2FTをスイッチとしてアクティベート(登録)できる数は、キーボードコマンドの「Space」、「Enter」、「1」、「2」、「3」、「4」の6つです。詳細は11ページの<スイッチコントロールの設定とキーボードコマンドの関係について>を参考ください。



キーボードコマンド

<Android® OS / Chrom® OSの場合> スイッチアクセス

【設定】の検索窓で「スイッチ アクセス」と入力してスイッチアクセスを開き※、スイッチの設定を行ってからスイッチアクセスをオンにします。
※スイッチアクセスが見つからない場合は、プレイストアでダウンロードが必要です。

設定の詳細については、以下のサイトをご確認ください。

Android®ヘルプURL : <https://x.gd/HiLHt> (短縮URL)

Chromebook®ヘルプURL : <https://x.gd/wL6no> (短縮URL)

上記の設定によりブルー2FTでスイッチアクセスを利用することが可能になります。



Android®ヘルプ



Chromebook®ヘルプ

<Windows® OSの場合> スクリーンキーボード

初めにブルー2FTのスイッチ1またはスイッチ2にキーボードコマンド「Space」を設定します。

【設定】の検索窓で「スクリーン キーボード」と入力してスクリーンキーボードをオンにします。

表示されたスクリーンキーボードの「オプション」キーをクリックし、「キーをスキャンする」にチェックを入れます。この時「キーボードキー」がSpaceキーになっていなければ、Spaceキーに設定します。

設定の詳細については、以下のサイトをご確認ください。

Microsoft®サポート URL : <https://x.gd/xpiPQ> (短縮URL)

右記の設定によりブルー2FTでスクリーンキーボードを利用することが可能になります。



Microsoft®サポート

キーボードコマンドについて

スイッチコントロール、スイッチアクセス、スクリーンキーボードなどを操作するにはスイッチ設定が必要ですが、設定を行わない場合は、キーボードコマンドが実行されます。

キーボードコマンドは、初期設定ではスイッチ1(青色)は「Space」、スイッチ2(黄色)は「Enter」に設定されております。それぞれ、「Space」、「Enter」、「1」、「2」、「3」、「4」に変更可能です。この内いずれか2つまでのキーを使って操作できるアプリの場合は、操作に必要なキーをスイッチ1と2に設定することでアプリを利用できます。

スイッチのキーボードコマンドを変更する方法は、次の通りです。

1. ブルー2FTの電源をオンにします。
2. キーボードコマンドモードスイッチをオンの位置に移動します。
3. ブルー2FTのスイッチ、または ブルー2FTに接続された外部スイッチを押して、新しいキーボードコマンドを選択します。
4. キーボードコマンドモードスイッチをオフの位置に移動して、キーボードコマンドを保存します。
※スイッチ1とスイッチ2を同じキーボードコマンドに設定することも可能です。



本体裏面

<スイッチコントロールの設定とキーボードコマンドの関係について>

スイッチコントロールでブルー2FTをスイッチとして登録できるのは、キーボードコマンドの6つです。例)キーボードコマンドの設定がスイッチ1(青色)＝「Space」、スイッチ2(黄色)＝「Enter」の場合

スイッチコントロールの設定において、スイッチ1(青色)をタップしてアクティベート(登録)し、アクションに【項目を選択】を設定してからスイッチコントロールをオンにすると・・・

➡スイッチ1(青色)のタップで、【項目を選択】が実行されます。

スイッチ2(黄色)は、スイッチコントロールで何も設定していないため、タップするとキーボードコマンドの「Enter」が実行されます。しかし、スイッチ2(黄色)のキーボードコマンドを「Space」に設定すると・・・➡スイッチ2(黄色)のタップで、【項目を選択】が実行されます。

一方、スイッチ1(青色)のキーボードコマンドを「Space」以外に設定すると・・・


➡スイッチ1(青色)のタップで、設定したキーボードコマンドが実行されます。

3-3 外部スイッチ（別売）の設定

外部スイッチを利用する場合は、外部スイッチの3.5mmスイッチ用プラグをスイッチ用ジャックS1またはS2に差し込んでください。外部スイッチでデバイス上のアプリを制御できます。

外部スイッチ操作時も視覚と聴覚のフィードバックは有効です。

※外部スイッチがブルー2FTに接続されている場合、本体でのスイッチ操作は無効となります。

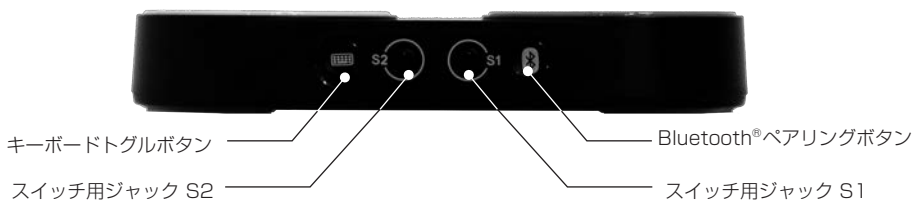

3-4 バッテリーの充電方法

ブルー2FTの電源は充電式です。

ご使用前にブルー2FTを100%充電してください。

1. 付属のUSB-Cケーブルをブルー2FTのUSB-C充電ジャックに差し込み、充電用ACアダプターをコンセントへ接続します。（充電用ACアダプターは別売）
2. 充電中は、ステータスインジケータライトが赤色で点滅します。完全に充電されると、ブルー2FTが充電用ACアダプターに接続されている限り、ステータスインジケータライトは赤色に点灯したままになります。

※バッテリー残量が約5%になると、ステータスインジケータライトが1秒ごとに赤色で2回点滅します。



3-5 ソフトウェアキーボードの表示

iPad®またはiPhone®で文字を入力する場合、ブルー2FT側面にあるキーボードトグルボタンを押すと、ソフトウェアキーボードが表示されます。ソフトウェアキーボードを非表示にするには、再度キーボードトグルボタンを押します。



3-6 スリープモード

20 分間動作がなかった場合、ブルー2FTはスリープモードになります。
スリープモードから復帰するにはスイッチ 1 またはスイッチ 2 をタッチしてください。

3-7 取り付け

ブルー2FTは本体裏面に取り付け用のネジ穴があります。
ネジの仕様は6-32インチネジで、ブルー2FTを取り付ける材料の厚さに約6mmを加えた長さが
必要です。12mmを超える長さのネジは使用しないでください。なお、ブルー2FTを固定する専
用の固定用具はございません。

4. お手入れ・保管・廃棄方法

- 本製品のお手入れの際は、接続されているスイッチがある場合は全て外してください。
- 固く絞った布で汚れを拭き取ってください。
- 本製品は湿気やほこりの多い場所、高温になる場所や振動のある場所には保管しないでください。
- 本製品が故障した場合、販売店までご連絡ください。
- 本製品を廃棄する際は、各自治体の規則に従ってください。

5.保証書

本製品は、当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規程に基づき無償修理致します。その際は現品に本保証書を添えて弊社またはご購入の販売店までご提出ください。

品名	ブルー2FT			
お客様	ご住所 〒	TEL		
	(フリガナ)			
	お名前			
ご購入年月日 西暦 年 月 日				
販売店名				
保証期間	2年間			

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障又は不具合が発生した場合、弊社もしくはご購入の販売店までご連絡ください。

保証規程

1. 保証期間はご購入年月日から2年間です。保証期間内に発生した故障については、無償修理致します。
2. 無償修理には、保証書の提出を要します。
3. 次の場合には保証はできませんが、特にご希望の方には実費にて修理致します。
 - (1) 保証書を紛失された場合
 - (2) 取扱説明書に記載されていない誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造・分解による故障・損傷
 - (3) 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
 - (4) 保証書にご購入年月日、お客様名の記入のない場合、または不当変更を加えられた場合
 - (5) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
4. ご相談窓口は、弊社営業所またはご購入の販売店にて承ります。
5. 保証書の保証対象とならない故障および損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無償修理致します。
 - (1) 保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - (2) 保証書の再発行はいたしません。
6. ケーブルは消耗品ですので、修理のご依頼は受付けておりません。

6.修理

故障した場合はお買い上げ頂きました販売店を通じて修理を致します。

- 本製品の修理は、ご購入後5年目迄お受けいたします。
- 2年目迄の修理については14ページの保証規程に従い、
3年目以降5年目迄の修理は有償となります。
- 修理には保証書の提示を要しますので、大切に保管してください。
- 修理は部品の補修、取り換えではなく、新品との交換になります。

●輸入・販売元

パシフィックサプライ株式会社

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072 (875) 8008 FAX 072 (875) 8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

販売店

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2024.6