

MYスリング／NEBAスリング

豊富なタイプから選べるスタンダードスリングシート（吊り具）




MYスリング&NEBAスリングの特徴



※MYスリング フル84ND
※脚分離型交差式懸吊

- MYスリングはNEBAスリングの技術を元に、より日本人に適合しやすい形状に設計されたスリングです。
- デンマークで蓄積されたノウハウに支えられた優れた形状と高い品質によりデンマークをはじめ各国のリフト(ホイスト)メーカーに支持されている商品です。
- 日本国内で使用されているリフトの殆どの機種に適合します。
- ※リフトのフック形状が平板で角のあるものは、スリングのストラップが擦り切れる恐れがあります。 ※フック間距離が410~520mmのリフトにご使用頂けます。
- タイプ、サイズも豊富で体格・身体状況・目的・用途により専門家にご相談のうえ最適なスリングをお選びください。
- ストラップの長さを調整することにより懸吊姿勢を変えることができます。 左右の掛け違いをなくするため、色分けをしています。
- 脚分離型スリングは、座位のまま着脱が可能です。

	タイプ	標準タイプ	メッシュタイプ	クロスベルトタイプ
材質	メインシート	強化ナイロン	ポリエステルニット	ポリ塩化ビニール
	吊带 縁取部 補強部 ポア部		ポリエステル	
耐荷重		140kg		
耐熱温度		60℃		

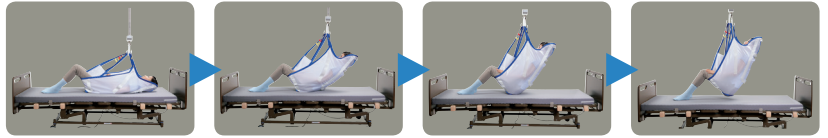

立体裁断により床やフラットなベッドから頸椎に負担をかけることなく吊り上げることができます。

MYスリング ハーフ

脚分離型 ハーフサイズ


- 大腿支持部に、補助テープを採用したことにより、装着時、大腿部分にしわがでにくく、局所的な圧迫が軽減されました。
- スリング上端部分に補助テープが入ったことにより、装着時、背部の局所的な圧迫が軽減されました。
- フィンガーポケットの採用により、座位での装着が容易になりました。
- 通気性がよく、洗濯時乾きの早いメッシュタイプもございます。

対象者

- 頭部、体幹の支持力があり、座位が取れる方が対象となります。



※MYスリング ハーフ83ND

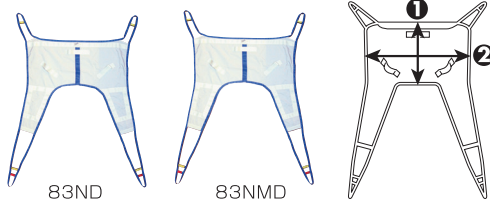

品番	26170001	26170002
タイプ	標準タイプ	メッシュタイプ
サイズ	中	中
型番	83ND	83NMD (在庫限り)
	¥50,000 (JAN 4524491004546) (TAIS 01087-000004)	¥52,000 (税抜) (JAN 4524491004553) (TAIS 01087-000004)

寸法 (cm)

品番	型番	サイズ	①	②
26170001/26170002	83ND/83NMD	中	43	100

MYスリング フル(4点吊)

脚分離型 フルサイズ 4点吊

- 吊り上げ時、着床時ともに頸椎が過度に屈曲したり、伸展したりしない設計になっている為、安全で快適に懸吊することができます。
- 大腿支持部に、補助テープを採用したことにより、装着時、大腿部分にしわがでにくく、局所的な圧迫が軽減されました。
- フィンガーポケットの採用により、座位での装着が容易になりました。
- 84BPは脳性まひなど身長に対し、骨盤の成長が少ない方用に設計されています。

対象者

- 頭部、体幹の支持力が弱く、座位が保持できない方が対象となります。



品番	26170004	26170003	9786
タイプ		標準タイプ(4点吊)	
サイズ	骨盤幅狭	中	大
型番	84BP	84ND	84LD(在庫限り)
	¥60,000 (JAN 4524491004577) (TAIS 01087-000005)	¥65,000 (JAN 4524491004560) (TAIS 01087-000005)	¥68,000 (JAN 4524491005703) (TAIS 01087-000005)

(税抜)

寸法 (cm)

品番	型番	サイズ	①	②	③
26170005	84LD	大	102	98	104
26170003	84ND	中	91	96	89
26170004	84BP	特	84	79	74

NEBASリング 83シリーズ

脚分離型 ハーフサイズ

- 衣類のように包み込まれて吊り上げられ、体重を分散して支えられるので大変快適です。
- 簡単に装着でき吊り上げることでより身体にフィットします。違和感もありません。


対象者

- 頭部、体幹の支持力があり、座位が取れる方が対象となります。



※NEBASリング 83N

品番	5765	5764	5766	5924	5923	5925
タイプ	標準タイプ			メッシュタイプ		
サイズ	小	中	大	小	中	大
型番	83B	83N	83L	83BM	83NM	83LM
	¥53,000	¥56,000	¥60,000	¥54,000	¥57,000	¥61,000
(JAN)	(4524491000302)	(4524491000296)	(4524491000319)	(4524491000425)	(4524491000418)	(4524491000432)
(TAIS)	(01087-000031)	(01087-000031)	(01087-000031)	(01087-000031)	(01087-000031)	(01087-000031)

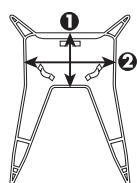

寸法 (cm)

品番	型番	サイズ	①	②
5765/5924	83B/83BM	小	38	76
5764/5923	83N/83NM	中	43	96
5766/5925	83L/83LM	大	57	100


NEBASリング 84シリーズ(6点吊)

脚分離型 フルサイズ 6点吊

- 83シリーズの機能に加え、頭部ストラップの位置を変えることで、頭部の角度調整ができます。


対象者

- 頭部、体幹の支持力が弱く、座位が保持できない方が対象となります。

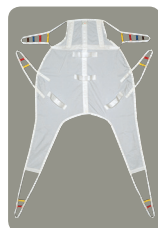

※NEBASリング 84N

品番	5768	5767	5769	9767	5930	5929	5931
タイプ	標準タイプ(6点吊)				メッシュタイプ(6点吊)		
サイズ	小	中	大	極小	小	中	大
型番	84B	84N	84L	84BB	84BM	84NM	84LM
	¥68,000	¥73,000	¥75,000	¥69,000	¥68,000	¥70,000	¥78,000
(JAN)	(4524491000333)	(4524491000326)	(4524491000340)	(4524491000517)	(4524491000487)	(4524491000470)	(4524491000494)
(TAIS)	(01087-000032)	(01087-000032)	(01087-000032)	(01087-000032)	(01087-000032)	(01087-000032)	(01087-000032)

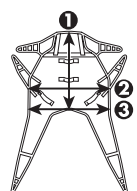

寸法 (cm)

品番	型番	サイズ	①	②	③
9767	84BB	極小	65	69	73
5768/5930	84B/84BM	小	73	69	73
5767/5929	84N/84NM	中	86	93	95
5769/5931	84L/84LM	大	101	96	99

NEBASリング 83A/84A

在庫限り

脚分離型 小径開口部タイプ

- 開口部が狭い特殊なタイプです。

対象者

- 体幹に比べて、骨盤が小さい方が対象となります。
- 下肢切断者に閉脚吊り用として使用する場合があります。
注意:切断の部位によっては使用できません。
シートタイプの選択をしてください。
- 頭部、体幹の支持力が弱い方には、フルサイズ84Aをご使用ください。



品番	5919	5771
タイプ	小径開口部タイプ	小径開口部タイプ
サイズ	中	中
型番	83A (在庫限り)	84A (在庫限り)
	¥54,000	¥75,000 (税抜)
(JAN)	4524491000371	4524491000357



NEBASリング 85RM/85TM

シートタイプ

- 全体を包み込むハンモックタイプの敷き込みスリングです。
- メッシュなので入浴にも使用できます。
- 臥位のみでの着脱になります。

対象者

- 脚分離型スリングが使用できない方が対象となります。
- 頭部、体幹の支持力が弱い方には、フルサイズ85TMをご使用ください。

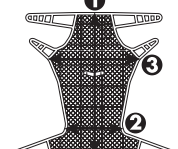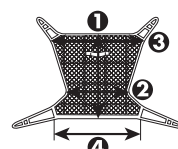


※NEBASリング 85RM

品番	9775	9776
品名	メッシュヘッドサポート無し(ハーフサイズ)	メッシュヘッドサポート付き(フルサイズ)
型番	85RM	85TM
	¥53,000	¥68,000 (税抜)
(JAN)	4524491000579	4524491000586
(TAIS)	01087-000034	01087-000035

寸法 (cm)

品番	型番	仕様	①	②	③	④
9775	85RM	ハーフサイズ	86	62	94	88
9776	85TM	フルサイズ	136	62	96	88

NEBASリング 85HT

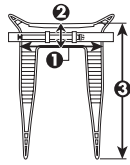

脚分離型トイレ用

- トイレ用に開発された特殊スリングです。
- トイレなどで、胴まわりと大腿部を安定保持しながら、ズボン、下着などの衣類の着脱が簡単にできるような形状になっています。

対象者

- 頭部、体幹の支持力があり、自力で座位を保持でき、股関節の固定力がある方のみ対象となります。

			寸法(cm)		
品番	型番	仕様	①	②	③
9773	85HT	バックルタイプ	95	26	95

品番	9773
品名	トイレ用(バックルタイプ)
型番	85HT

¥69,000 (税抜)
(JAN 4524491000555)
 (TAIS 01087-000036)

NEBASリング 85F





クロスベルトタイプ

- 体幹のベルトと脚部のベルトを交差することにより従来のベルトスリングに比べ、臀部の落下の危険性が軽減されました。

対象者

- 頭部、体幹の支持力があり、自力で座位を保持でき、股関節の固定力がある方のみ対象となります。

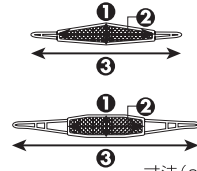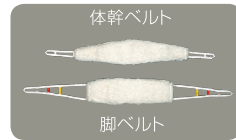


		寸法(cm)			
品番	型番	部品	①	②	③
9777	85F	体幹ベルト	22	102	105
		脚ベルト	24	80	190

品番	9777
品名	2本ベルト(ボア付き)
型番	85F

¥45,000 (税抜)
(JAN 4524491000593)
 (TAIS 01087-000036)

使用上のポイント

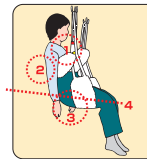

1. 体幹ベルトをボアのところまでクロスさせること
2. 体幹ベルトは腋窩(ワキの下)にかからないこと
3. 脚ベルトは大腿の中央部にかけること
4. 左図の姿勢が正しい姿勢です。
5. 従来のベルト型スリングと装着方法が異なり、ストラップをクロスさせて使用します。

スリングの正しい選択がリフト導入の成功の決め手です。

- ご本人の体格、身体の状態、用途によって最適なモデルを選ぶことが大切です。
- 身体に合わないスリングの使用はご本人が快適でないばかりでなく、危険です。
- スリングには、サイズ、素材、形状により、多くのモデルがあります。そのモデルの中から最適なものを選んでください。選択にあたっては、専門家にご相談ください。

スリングは体格や障がいの種類、程度、合併症などによって、その適用が異なります。選択の際には、専門家にご相談ください。



※MYスリングハーフ83ND、MYスリング84シリーズ(4点吊)、NEBASリング83シリーズ、NEBASリング84シリーズ、NEBASリング85HT、NEBASリング83A、NEBASリング84Aの装着方法は脚分離型交差式懸吊をしています。

k パシフィックサプライ株式会社

- 本社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
- 東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

- 札幌営業所 TEL.011-218-5801 FAX.011-218-5805
- 仙台営業所 TEL.022-227-1820 FAX.022-227-1821
- 東京営業所 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
- 名古屋営業所 TEL.0568-34-2696 FAX.0568-34-2697
- 大阪営業所 TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015
- 広島営業所 TEL.082-535-8300 FAX.082-535-8301
- 福岡営業所 TEL.092-641-8151 FAX.092-641-0444

<https://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ 検索

*最新情報は弊社ホームページをご覧ください。

<https://www.p-supply.co.jp/company/request/>



※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
 ※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。
 ※価格は、消費税抜きの価格を表記しています。