

immedia[®]

a part of Etac

エタック移乗用具カタログ
2025





エタックサテンシートベース(左右スライド)




デモ機あり immedia[®]
a part of Etac

左右方向の移動が楽に

- 左右方向にのみ滑りやすい低摩擦素材がベッド上での位置修正や寝返りを容易にします。
- ベッドシーツとしてマットレスへの常時装着が可能です。
- シートの両サイドは滑りにくい生地となっており、端座位が可能です。

品番	26180317	26180318	26180319
品名	サテンシートベース(左右スライド)	サテンシートベース(左右スライド) L	サテンシートベース(左右スライド) Lボックス
サイズ	幅200×長さ140cm	幅200×長さ200cm	幅90×長さ200×マチ20cm
重量	510g	640g	580g
最大使用者体重	200kg		
材質	綿60%、ポリエステル40%(サテン低摩擦面/ポリエステル)		
JAN	4524491005314	4524491005321	4524491005338
	¥30,800	¥40,700	¥46,200
	(税込)		

利用者自身による臥位から端座位への起き上がり

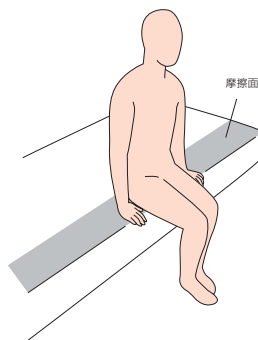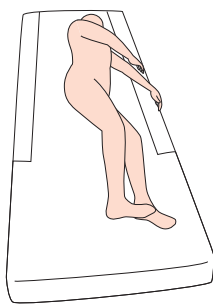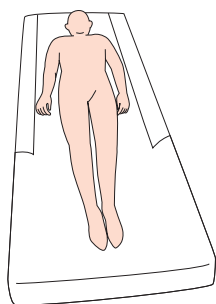


エタックサテンシートコンビ(上下スライド)


デモ機あり immedia[®]
a part of Etac

介助による対象者の位置修正に

- エタックサテンシートベース(左右スライド)の上に重ねて使用します。
- サテンシートコンビを持って介助すれば、上下左右いずれの方向へも位置修正が可能です。
- エタックアシストシートのように体位変換にもお使いいただけます。
- 身体の下に敷いたままお使いいただけます。

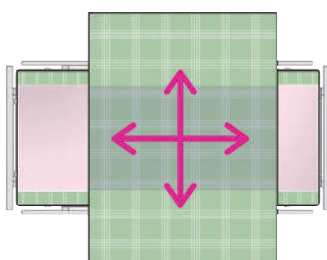

品番	26180322
サイズ	幅200×長さ140cm
重量	450g
最大使用者体重	200kg
材質	綿60%、ポリエステル40%(サテン低摩擦面/ポリエステル)
JAN	4524491005369
	¥50,600 (税込)

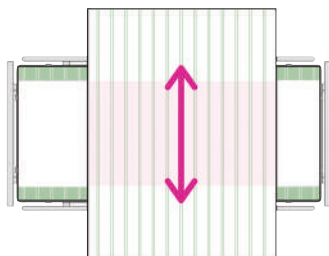

エタックアシストシート

デモ機
あり

immedia
a part of Etac


介助による対象者の左右方向の位置修正に

- エタックサテンシートベース(左右スライド)の上に重ねて使用します。
- アシストシートを持って介助すれば対象者の身体に直接触れず、優しい位置修正や体位変換が可能です。
- 身体の下に敷いたままお使いいただけます。

品番	26180320	26180321
品名	エタックアシストシート(小)	エタックアシストシート(大)
サイズ	幅200×長さ100cm	幅200×長さ140cm
重量	320g	330g
最大使用者体重	200kg	
材質	綿60%、ポリエステル40%	
JAN	4524491005345	4524491005352
	¥16,500 (税込)	¥19,800 (税込)


ベッド上での横移動(エタックサテンシートベース・エタックアシストシート使用)

①

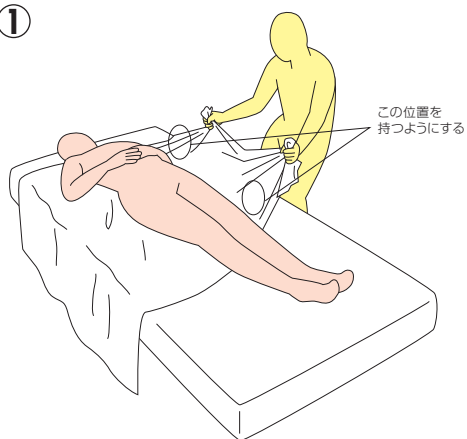

本製品を引き出し、イラストのようにして介助者が持ちます。
このときできるだけ対象者に近い位置で本製品を握るようにします
(イラストでは握り方をお示すために、介助者が対象者から離れています)。

②

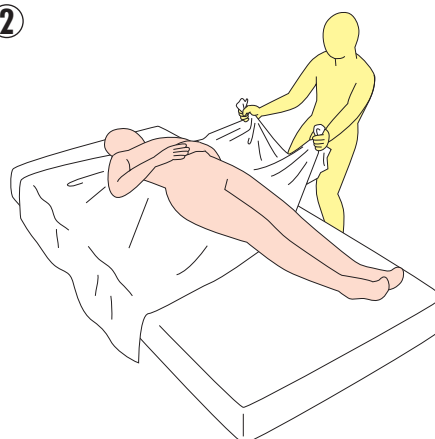

介助者は両足を肩幅に開き、かつ前後に足を開いて立ちます。
背筋を伸ばした状態で、下肢の筋力を使いながらゆっくり
本製品を引いて対象者を移動させます。


介助による体位交換(アシストシート)

①




上記の方法で左右どちらかに移動したあと、
寝返る向きと反対側の本製品で対象者の
身体を包み込みます。

②

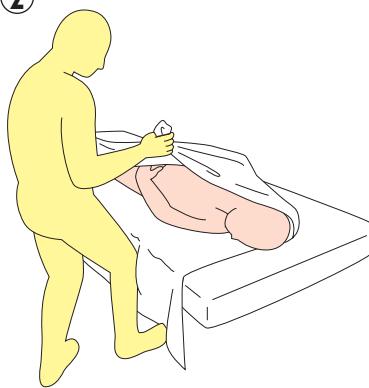

介助者は本製品の端を握り、ゆっくり
手前に引きます。このときできるだけ対象者
に近い位置の本製品を握るようにします。

③

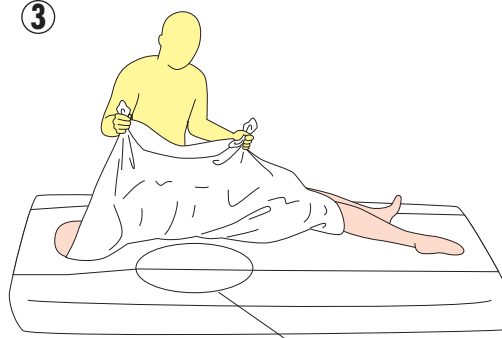

体位変換器等を挿入します。

体位変換器等を利用し、希望する体位を保持します。

デモ機
あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



エタックEボード

デモ機あり **immedia**
a part of Etac


スライディングボード

- ベッド・車椅子間などの移乗に使用します。
- 表面は滑りやすい加工で、裏面には滑り止め加工をしています。

品番	26180328
サイズ	幅33×長さ60×厚さ0.6cm
重量	980g
最大使用者体重	150kg
材質	ポリエチレン
JAN	4524491005703
TAIS	01087-000047

¥39,600 (税込)

自力で移乗できる場合

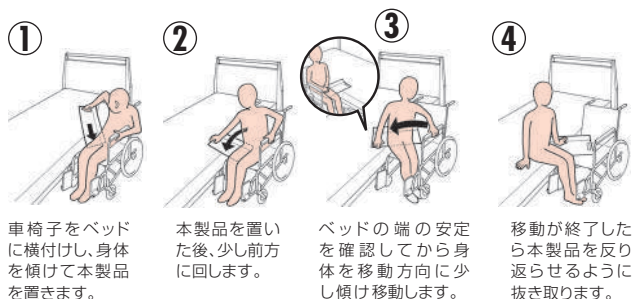


① 車椅子をベッドに横付けし、身体を傾けて本製品を置きます。

② 本製品を置いた後、少し前方に回します。

③ ベッドの端の安定を確認してから身体を移動方向に少し傾け移動します。

④ 移動が終了したら本製品を反り返らせるように抜き取ります。

介助者が前から移乗させる場合

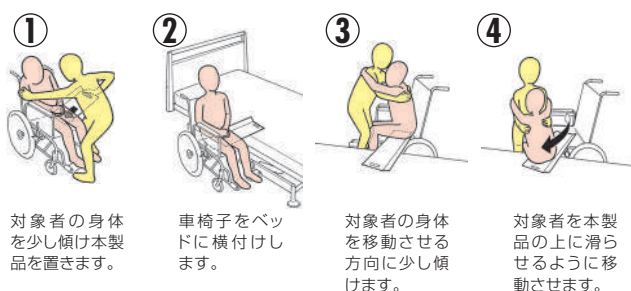

① 対象者の身体を少し傾け本製品を置きます。

② 車椅子をベッドに横付けします。

③ 対象者の身体を移動させる方向に少し傾けます。

④ 対象者を本製品の上に滑らせるように移動させます。



エタックEボードL

デモ機あり **immedia**
a part of Etac


スライディングボード

- 車椅子・自動車間などの移乗に使用します。
- 標準サイズよりも長いタイプです。

品番	26180327
サイズ	幅33×長さ75×厚さ0.6cm
重量	1300g
最大使用者体重	150kg
材質	ポリエチレン
JAN	4524491005697

¥50,600 (税込)

車椅子から自動車への移乗

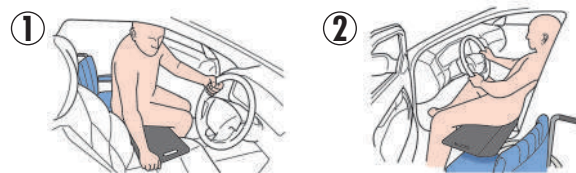

エタックミニボード

デモ機あり **immedia**
a part of Etac

携帯用スライディングボード

- ベッド・車椅子間などの移乗に使用します。
- 外出先に持ち出せる小型サイズです。

品番	26180306
サイズ	幅20×長さ45×厚さ0.5cm
重量	400g
最大使用者体重	150kg
材質	ポリエチレン
JAN	4524491005222

¥35,200 (税込)



エタックサポート

デモ機あり immedia®
a part of Etac


介助用ベルト

- 握りやすいグリップにより、一人では車椅子から入浴用いす等への移乗が難しい方を、安全で安定した姿勢で支えることができます。
- 立ち上がり・着座の介助、移乗や歩行時の介助に使用します。


品番	26180302	26180301
仕様	大	小
幅	13cm	13cm
適応ウエストサイズ	90~130cm	65~105cm
重量	500g	400g
最大使用者体重	150kg	
材質	表材・裏材/ナイロン 中材/ポリエチレン 握り手/ポリプロピレン、ポリエステル	
JAN	4524491005123	4524491005116

¥29,700 (税込)

介助者だけがサポートを装着した着座

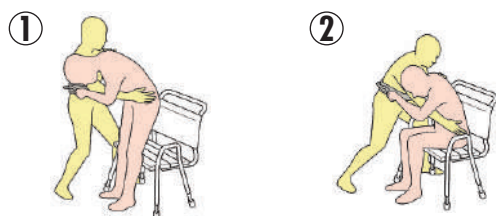

対象者・介助者の両方がサポートを装着した立ち上がり

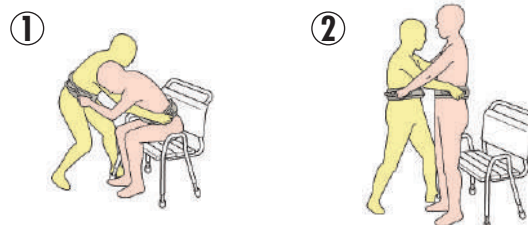

エタックターンフロア

デモ機あり immedia®
a part of Etac

移乗介助回転盤

- 立位での方向転換の介助が容易にできます。
- ソフトは室内向け、ハードは室外向けです。

品番	26180303	26180304
仕様	ソフト	ハード
サイズ	直径40cm	直径38cm
重量	480g	1350g
最大使用者体重	150kg	150kg
材質	内側/ナイロン 中材/ポリエチレン 表面/底面/タフテック	表面/底面/ABS樹脂、TPU 中材/ポリエチレン 取付部/真鍮、鉄
JAN	4524491005239	4524491005246
TAIS	01087-000019	01087-000020


¥33,000

¥79,200

(税込)

自力で移乗できる場合

車椅子からベッドへの移乗

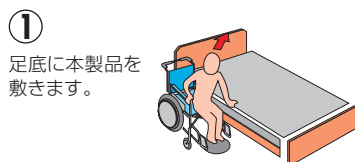

自力で移乗できない場合

ベッドから車椅子への移乗

※エタックサポート(別売品)などを併用することをおすすめいたします。



デモ機あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

本体+カバー



本体

エタックストレッチャーボード

デモ機
あり

immedia
a part of Etac

スライディングシートの中に 芯材を組み合わせたユニークなボード


- 摩擦を軽減し、少ない力で移動・位置修正ができます。
- ベッド上での位置修正やベッド・ストレッチャー間の臥位移乗に使用します。
- カバーは交換可能です。
- 最大移動距離は20cmです。

ベッドからストレッチャーへの移乗

- ① 下記②～④の要領で対象者をベッドの端に寄せます。その後、ストレッチャーをベッドに横付けします。



- ② 対象者をスライドさせた後、対象者を少し傾けて本製品の下側を持って引き抜きます。

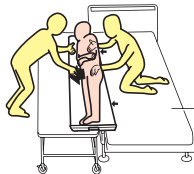


品番	26180329(本体+カバー)	26180330(本体)	26180331(カバー)
サイズ	幅50×長さ190cm		幅50×長さ170cm
最大使用者体重	300kg		本体準拠
材質	プラスチック+ナイロン	プラスチック	ナイロン
	¥165,000	¥143,000	¥33,000

(税込)

ベッドでの位置修正方法

- ① 位置修正前

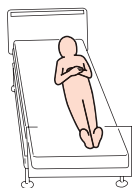


- ② 対象者を側臥位にし、本製品を対象者の下に敷き込みます。





- ③ 本製品を敷いた後、対象者を仰臥位に戻します。



- ④ 対象者を側方へ位置修正します。

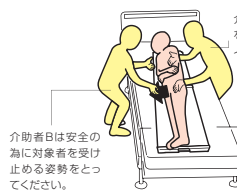

- ⑤ 対象者をスライドさせた後、対象者を少し傾けて本製品の下側を持って引き抜きます。

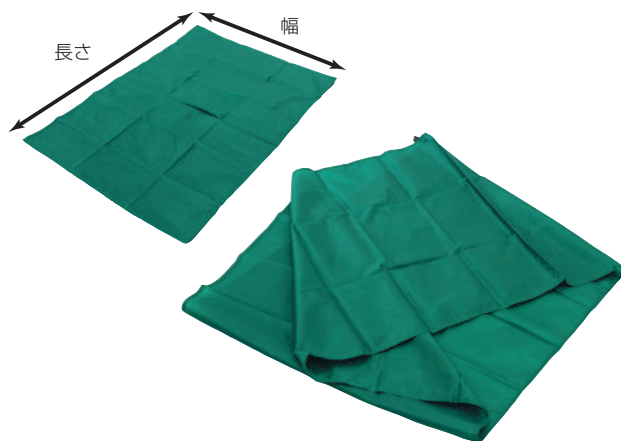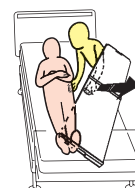

エタックスライディングシート

デモ機
あり

immedia
a part of Etac

スライディングシート

- 摩擦を軽減し、少ない力で移動・位置修正ができます。
- ベッド上での位置修正やベッド・車椅子間の移乗に使用します。


品番	26180311	26180312
仕様	小	大
サイズ	幅72×長さ100cm	幅72×長さ130cm
重量	120g	170g
最大使用者体重	300kg	300kg
材質	ナイロン	
JAN	4524491005291	4524491005307
	¥19,800	¥22,000

(税込)

ベッド上での上方移動

- ①

本製品を頭の下に敷き込みます。

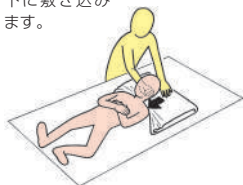

- ②

肩の下にも敷き、シートの両側を引っ張って広げます。



- ③

両足を合わせ、脚を曲げます。



- ④

対象者上方向にスライドさせます。



- ⑤

スライドした後、本製品を引き抜きます。





エタックヒップハンドル

デモ機あり **immedia**
a part of Etac

安全で快適な移動・移乗の助助に


- エタックスライディングシート(別売品)、エタックボード(別売品)等と併用すると移動・移乗助助がより安全に、快適に行えます。
- 握り手が8ヶ所あり、使用状況、用途に応じて使い分けができます。

品番	26180323
サイズ	幅16×長さ120cm
重量	350g
最大使用者体重	150kg
材質	表材/ナイロン 裏材/ナイロン・ポリウレタン 中材/ポリエチレン・ポリエステル 握り手/ポリエステル
JAN	4524491005130

¥35,200 (税込)

ベッド上での上方への位置修正

(エタックスライディングシート(別売品)との併用)

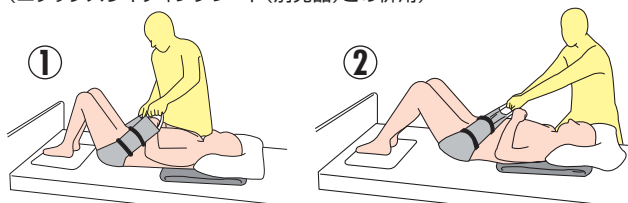


① 本製品の握り手を、右手側が短く、左手側が長めになる位置で持ち、腰をひねらない作業姿勢で構えます。

② 足を前後に開いて立ち、腕力で引っ張るのではなく、前側の足から後側の足に体重を移動して、対象者をベッドの上方へ移動します。

ベッド・車椅子間の移乗

(エタックボード(別売品)との併用)

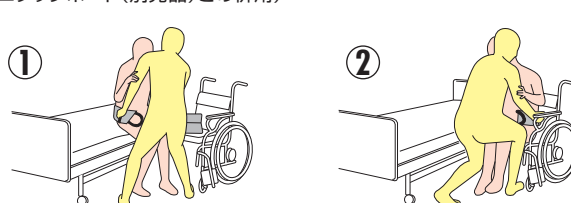

① 対象者の体側にすべり止めがくるように本製品を臀部に位置し、介助者は腰を落として握り手を持ちます。

② 対象者の身体をボード(別売品)側へ傾けながら、ボード上を滑らせて移乗させます。

エタックベッドストリング

デモ機あり **immedia**
a part of Etac

ベッドフレームに固定して自由に使える握り手です


- 利用者自身による自立移動をサポートします。
- 握り手が8ヶ所あり、使用状況、場面に応じて使い分けが可能です。



品番	26180315
サイズ	幅7.5×長さ170cm
重量	400g
最大使用者体重	150kg
材質	ポリエステル
JAN	4524491005147

¥26,400 (税込)

臥位から長座位へ起き上がり

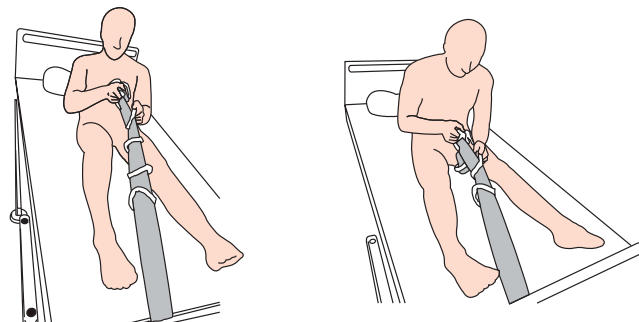

ベッドの足側フレームに固定した本製品を使用し、握り手を順に手繰り寄せて体を起こす。

デモ機あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

エタックレスキュー

デモ機
あり

immedia®
a part of Etac

緊急避難用具


- マットレスの下に常時セットしておくことで、万が一の災害時にマットレスと掛け布団と一緒に対象者を安全なところまで移動させることができます。
- マットレスと掛け布団を一緒に移動させるので、衝撃・振動・冷氣から対象者を守ります。



品番	26180324	26180310
仕様	レギュラー	ワイド
サイズ	幅75×長さ200cm	幅85×長さ200cm
重量	800g	900g
最大使用者体重	150kg	
材質	本体/ナイロン 縁/ポリエステル	
JAN	44524491005413	4524491007363

¥60,500(税込) | **¥63,800**(税込)


設定方法

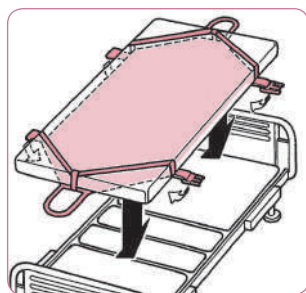

マットレスの下にセットしておきます。


災害がおこったら…

①

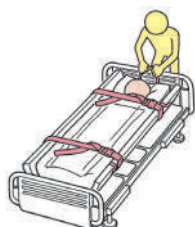


マットレスの下にセットしてあった赤ベルトを取り出してバックルをはめ、マットレスの両端が折れ曲がるくらいまで締め、対象者がきちんと固定されているか確認します。

②

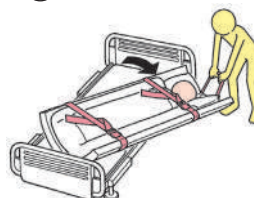

頭部側の握り手を持ってマットレスごとゆっくりベッドから引きずり出し、避難行動をとってください。

③

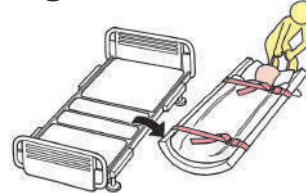

k パシフィックサプライ株式会社

本 社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

札幌営業所 TEL.011-218-5801 FAX.011-218-5805
東京営業所 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
名古屋営業所 TEL.0568-34-2696 FAX.0568-34-2697
大阪営業所 TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015
福岡営業所 TEL.092-641-8151 FAX.092-641-0444



<https://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ 検索



Instagram

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。